

Fresenius Medical Care

Bezpečnostně technická kontrola přístroje Module DPS

(podle zákona č. 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Tuto kontrolu je třeba provést nejpozději po 12 měsících od poslední bezpečnostně technické kontroly autorizovaným servisem.

Upozornění: před bezpečnostně technickou kontrolou plně nabijte (16 hodin) akumulátor přístroje

typ: DPS

umístění přístroje: FN Olomouc-IPCHO

výrobní číslo: *7P2 733 33*

I 0 20597-000

OK

- | | | | |
|----|---|-------|-------------------------------------|
| 1. | Zobrazení ubíhajícího času mezi dvěma BTK (tEST1) | H/J/M | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. | Datum poslední údržby (tEST1) | J/M/A | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. | Celkový čas na displeji (tEST6) | H/J/M | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. | Kontrola LED (tEST2) | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. | Kontrola tlačítek klávesnice (tEST3 (viz. Technický manuál, kapitola 3) | | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Kontrola čidla tlaku (tEST9) Překontroluj, zda zobrazená hodnota je mezi 0 a 100g (nezatížené čidlo). Stiskni a uvolni čidlo, zobrazená hodnota musí být mezi 0 a 100g Pokud ne, viz. kalibrační mód EtAL9. | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. | Kontrola ADC převodníku (tESTb) vstup 3 hodnota mezi $066 \leq \dots^{07E} \dots \text{LSB} \leq 08F$ zobrazená hodnota-amplituda výstupu (0,6 V + 0,05) pokud je mimo toleranci, viz kalibrační mód EtAL9 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. | Kontrola čidla polohy (tEST C) použij kalibr T300775-B nebo T300940E a T300775G horní poloha $114,5 \leq \dots^{115} \dots \text{mm} \leq 115,5$ spodní poloha..... $19,5 \leq \dots^{20} \dots \text{mm} \leq 20,5$ | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | pokud je mimo toleranci, viz kalibrační mód EtAL6 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9. | Kontrola držáku stříkačky (tESTf) pro stříkačku používanou na zařízení, ověř zobrazený typ stříkačky použitím ověřovací pomůcky (VG3: T301453). Pozn.: VG3 znamená: (V) ověřovací pomůcka, (G3) skupina stříkaček č.:3 | | <input type="checkbox"/> |

OK

rozdíl X1-X2leží mezi

74,96 ≤⁷⁰..... ≤ 76,47



17. Kontrola zámku

- připojit Module na Base
- připojit Base k napájení
- stisknout ON na Module
- kontrola, zda je č. Module zobrazeno na Base a na Module
- kontrola, zda zobrazené číslo souhlasí s polohou Module na Base
- pomalů odpojit Module
- kontrola, že se rozsvítí kontrolka „C“



Pokud se objeví nějaká anomálie, postupujte podle „adjusting ILS“ v TM

18. Kontrola akumulátoru

- nabijte dostatečně akumulátor
- test při rychlosti podávání 40 ml/h



Pokud je autonomie menší než 3 hod., vyměň akumulátor.

Pozn: akumulátor může ztratit 25 až 50 % své kapacity deklarované výrobcem kvůli svým chemickým článkům z důvodu stáří nebo nepřítomností nabíjecích a vybíjecích cyklů.

19. Test elektrické bezpečnosti

- neutrální vodič a kovový plášť
- fáze a kovový plášť



Poznámky:


Zdravotnický prostředek je není

funkční a bezpečný pro použití k výrobcem určenému účelu při poskytování zdravotní péče.

Doporučené datum příští bezpečnostně technické kontroly: 10.7.08

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje požadavky národní legislativy potřebné k uvedeným činnostem.

datum: 10.7.07

podpis: 
TECHNICKÝ SERVIS