



Fresenius Medical Care

Bezpečnostně technická kontrola přístroje MODULE MVP PT/ST

(podle zákona č. 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Tuto kontrolu je třeba provést nejpozději po 12 měsících od poslední bezpečnostně technické kontroly autorizovaným servisem.

Upozornění: před bezpečnostně technickou kontrolou dostatečně nabijte akumulátor přístroje

typ: *MP-PT*

výrobní číslo přístroje: *1P2 493 24* Umístění přístroje: *71P PHIP. OBORU*

OK

- | | | | |
|-----|--|-------|-------------------------------------|
| 1. | Kontrola vzhledu krytu, síťové šňůry, nálepek a membrány | | ☒ |
| 2. | Doba chodu na displeji (test 1) | H/D/M | ☒ |
| 3. | Datum poslední údržby (test1) | H/D/M | ☒ |
| 4. | Celková doba chodu (test 6) | H/D/M | ☒ |
| 5. | Kontrola LED, bzučáku a indikací (test 2) | | ☒ |
| 6. | Kontrola tlačítek klávesnice (test 3) | | ☒ |
| 7. | Kontrola bezpečnostní klapky | | ☒ |
| | | | |
| | Naplněný set vložit do pumpy, zavřít dvířka: | | ☒ |
| | alarmy nepřítomny. | | ☒ |
| | Zavřít a otevřít dvířka: | | ☒ |
| | zkontroluj funkci klapky na setu: na konci setu žádné kapky. | | ☒ |
| 8. | Kontrola systému připojení | | ☒ |
| | Připoj Module k Base | | ☒ |
| | Zapoj Base do elektrické sítě | | ☒ |
| | Zapni Module: | | ☒ |
| | Zkontroluj, že na Module a na Base se zobrazí číslo Module | | ☒ |
| | Zkontroluj, zda zobrazené číslo odpovídá umístění Module | | ☒ |
| | Pomalů odpoj Module: | | ☒ |
| | zkontroluj, zda v okénku číslo Module bliká „C“ | | ☒ |
| | Pokud je problém v systému připojení, nastav zámek modulů (viz. § 4.7) | | ☒ |
| 9. | Kontrola kontrolky napájení: | | ☒ |
| | Připojte Base k síti a zapněte Module: | | ☒ |
| | Kontrolka sítě (symbol zástrčky) svítí | | ☒ |
| | Odpojte Base od sítě: | | ☒ |
| | Kontrolka provozu z akumulátoru svítí | | ☒ |
| 10. | Kontrola kapkového detektoru (pokud je k dispozici) | | ☒ |
| | Překontroluj jeho neporušenost (známky poškození, čistota, pružina, šňůra) | | ☒ |
| | Připoj detektor k Module, vlož set naplněný vodou, spusť podávání infuze: | | ☒ |
| | zkontroluj, zda zelená kontrolka svítí při každé kapce. | | ☒ |
| | Odpoj detektor: alarm „drip sensor“ | | ☒ |
| | Připoj kapkový detektor, nastav infuzi na 60 ml/h a vyjmi komůrku z kapkového detektoru. Ověř alarm: 40s < 2min30sec | | ☒ |

OK

11. Kontrola vzduchového detektoru

Pumpa zapnutá, bez setu: svítí červená kontrolka a vzduchový detektor na displeji ☒

Vlož infuzní set naplněný vodou:

červená kontrolka a vzduchový detektor na displeji zhasnou ☒

Nastav rychlost 60 ml/hod a spusť podávání infuze.

Podrž kapkovou komůrku dnem vzhůru alespoň 20s aby se generovalo více než 0,25 ml vzduchových bublin pro pumpu, nastavenou na detekování nakumulovaného vzduchu 0,25 ml v 15 minutách.

Zkontroluj alarm „air bubble“ při průchodu bublin čidlem. ☒

12. Tlakový detektor

Vlož do pumpy infuzní set naplněný vodou s manometrem na konci (viz. §5.4.2).

Nastav hranici protitlaku 750 mm Hg.

Spusť infuzi 100 ml/h.

Zkontroluj, že manometr ukazuje 750 mm Hg $\pm$ 75 v okamžiku tlakového alarmu. ☒

Zopakuj to pro hranici tlaku 500 mm Hg. ☒

13. Kontrola rychlosti podávání

Konec infuzního setu vlož do odměrného válce.

Nastav 80 ml/h

Poznač si zachycený objem a čas

Nastav rychlost podávání (viz. 3.2.3): 76 ml < zachycený objem: ... 80 ml < 84 ml ☒

14. Kontrola akumulátoru

Nabijte dostatečně akumulátor

Spusť infuzi při 125 ml/h, síťová šňůra odpojená

Autonomie > 1h 30 min.

Důležité: Pokud není autonomie delší než 1h 30min, vyměň akumulátor. ☒

15. Test elektrické bezpečnosti ☒

- neutrální vodič a SUBD 15 (každý pin)

- fáze a SUBD 15 (každý pin)

Poznámky:

Zdravotnický prostředek je ☒

není ☐

funkční a bezpečný pro použití k výrobcem určenému účelu při poskytování zdravotní péče.

Doporučené datum příští bezpečnostně technické kontroly: 27.8.07

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje požadavky národní legislativy potřebné k uvedeným činnostem.

datum: 27.8.06

podpis: ~~FRESENIUS MEDICAL CARE~~
Česká republika spolek s r.o.
Lužná 591, 160 05 Praha 6
Tel.: 235 355 212
DIČ: CZ45761864
TECHNICKÝ SERVIS -9-