



Fresenius Medical Care

Bezpečnostně technická kontrola přístroje MODULE MVP PT/ST (podle zákona č. 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Tuto kontrolu je třeba provést nejpozději po 12 měsících od poslední bezpečnostně technické kontroly autorizovaným servisem.

Upozornění: před bezpečnostně technickou kontrolou dostatečně nabijte akumulátor přístroje

typ: MVP-PT

výrobní číslo přístroje: 181 798 54 Umístění přístroje: JIP PHIP. OBORŮ

OK

- | | | | |
|-----|--|-------|-------------------------------------|
| 1. | Kontrola vzhledu krytu, síťové šňůry, nálepek a membrány | | ☒ |
| 2. | Doba chodu na displeji (test 1) | H/D/M | ☒ |
| 3. | Datum poslední údržby (test 1) | H/D/M | ☒ |
| 4. | Celková doba chodu (test 6) | H/D/M | ☒ |
| 5. | Kontrola LED, bzučáku a indikací (test 2) | | ☒ |
| 6. | Kontrola tlačítek klávesnice (test 3) | | ☒ |
| 7. | Kontrola bezpečnostní klapky | | ☒ |
| | Naplněný set vložit do pumpy, zavřít dvířka: | | ☒ |
| | alarmy nepřítomny. | | |
| | Zavřít a otevřít dvířka: | | ☒ |
| | zkontroluj funkci klapky na setu: na konci setu žádné kapky. | | |
| 8. | Kontrola systému připojení | | |
| | Připoj Module k Base | | |
| | Zapoj Base do elektrické sítě | | |
| | Zapni Module: | | ☒ |
| | Zkontroluj, že na Module a na Base se zobrazí číslo Module | | ☒ |
| | Zkontroluj, zda zobrazené číslo odpovídá umístění Module | | |
| | Pomalu odpoj Module: | | ☒ |
| | zkontroluj, zda v okénku číslo Module bliká „C“ | | |
| | Pokud je problém v systému připojení, nastav zámek modulů (viz. § 4.7) | | |
| 9. | Kontrola kontrolky napájení: | | |
| | Připojte Base k síti a zapněte Module: | | ☒ |
| | Kontrolka sítě (symbol zástrčky) svítí | | |
| | Odpojte Base od sítě: | | ☒ |
| | Kontrolka provozu z akumulátoru svítí | | |
| 10. | Kontrola kapkového detektoru (pokud je k dispozici) | | ☒ |
| | Překontroluj jeho neporušenost (známky poškození, čistota, pružina, šňůra) | | |
| | Připoj detektor k Module, vlož set naplněný vodou, spusť podávání infuze: | | |
| | zkontroluj, zda zelená kontrolka svítí při každé kapce. | | ☒ |
| | Odpoj detektor: alarm „drip sensor“ | | ☒ |
| | Připoj kapkový detektor, nastav infuzi na 60 ml/h a vyjmi komůrku z kapkového detektoru. Ověř alarm: 40s < 2min30sec | | ☒ |

☒☒☒☒☒☐☒ie ☒

není ☐

FORENSIC MEDICAL CASE
Datum: 27-6-06 S.F.O.

Datum: 27.6.05
Česká republika spol. s r.o.
Lužná 591, 160 05 Praha 6
podpis: Tel.: 235 358 212
235 358 212

podpis: ~~Tel.: 235 358 212~~
~~PIC: 3745790884~~

TECHNICKÝ SERVIS

-9-