

Periodická prohlídka přístroje

B | BRAUN

Perfusor compact

Výrobce: B. Braun Melsungen AG

Obj. číslo přístroje: **8714827**

Výrobní číslo přístroje: **46887**

Uvedeno do provozu:

Prohlídka musí být prováděna pravidelně každých 24 měsíců. Periodickou prohlídku provádějte v souladu s návodem k použití a servisním návodem. Používejte výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje. Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Příslušenství a jeho doprovodná dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Kontrolovat		Zjištěné nedostatky		Potvrz.
1. Vizuální prohlídka (čistota, kompletnost, poškození)				
1.1	Uchycení stříkačky (držák, axiální uchycení, páčka a západka pohonu, senzor založení stříkačky)			☒
1.2	Klávesnice			☒
1.3	Síťová zásuvka a kabel			☒
1.4	Multifunkční konektor MFC a kabel			☒
1.5	Baterie/akumulátor, kontakty			☒
1.6	Nožičky			☒
1.7	Svorka na stojan, západka svorky			☒
2. Funkční zkouška				
2.1	Zapněte přístroj Porovnejte průběh testu LCD s návodem Zkontrolujte zvukový signál Porovnejte zadanou rychlost s displejem			☒
2.2	Prověřte funkci přivolání obsluhy (pomocí MFC) Pozn.: může být nastaveno a) statická signalizace b) dyn. signalizace s aktivací rozepnutí smyčky c) dyn. signalizace bez aktivace rozepnutí smyčky			☒
2.3	Přepněte přístroj do aku/bat. režimu a sledujte průběh testu Pozn.: při vybitém akumulátoru/baterii ji vyměňte a zopakujte test			☒
2.4	Prověřte signalizaci displeje „000b“ resp. „000a“ s aku			☒
2.5	Tlačítko umlčení alarmu			☒
2.6	Senzor založení pistu stříkačky			☒
3.0	Okluzní tlaky (alternativně jednou z metod)	manometr +střík. 50 ml přípravek 770161/6	1(<0,6bar) ☒ 2(<0,9bar) ☒ 3(<1,2bar) ☒	☒
4.0	Volba stříkačky	OPS ☐ interní ☒ Eeprom ☐		XXX
4.1	Přepínání stříkaček 20 /50 ml	Výrobce použ. stříkaček 20 ml B. Braun 50 ml B. Braun	Souhlasí s nastavením Ano Ano	☒ ☒ ☒
4.2	Čitelnost tabulky stříkaček			☒
5.0	Zkouška elektrické bezpečnosti podle ČSN EN 60601			
	Síťové napětí 230 V	Odpor ochranného vodiče kabelu (<0,2 Ohm) 0,07 Ohm	Unikající proud (<10 µA) 4 µA	☒
6.0	Dokumentace přístroje: • návod k obsluze • provozní kniha • bezpečnostní prohlídky • evidence oprav			☒ ☒ ☒ ☒
7.0	Příslušenství (MFC, kabel napájení 12 V, kabel přivolání obsluhy) ☒			
8.0	Speciální nastavení: Omezení rychl. dávkování: ...99,9 ml/h. Omezení rychl. dávkování bolusu 800 ml/h.			
Výsledek prohlídky: Byly zjištěny nedostatky, které mohou způsobit ohrožení pacienta, obsluhy nebo okolí. ☒ ANO ☒ NE Pokud ano, které:				
Doporučená opatření:				
Provozovatel: Fakultní nemocnice v Olomouci Inv.č. D053041-000				
Datum příští prohlídky: 6/2010	Prohlídku provedl: 29.5. 2008 Radomír Tománek podpis:		Přístroj předán: 29.5..2008 podpis: Vrchní S. Ludmila Lysá	

B | BRAUN

11
IČ: 485 86 285
DIČ: CZ48586285

B. Braun Medical s.r.o.
Servisní centrum

HOTLINE
Tel. +420-271 091 555
Fax +420-271 091 552