

Periodická kontrola a prověření ZP

podle zákona 123/2000 sb., §28:

Výrobce B.Braun Melsungen AG

B | BRAUN

Perfusor compact

Obj. číslo přístroje: 8714827

Výrobní číslo přístroje: 46887

Středisko: IPEHO E.E.D053041-000

Prohlídka musí být prováděna pravidelně každých 24 měsíců. Periodickou prohlídku provádějte v souladu s návodem k použití a servisním návodem. Používejte výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje. Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Příslušenství a jeho doprovodná dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Kontrolovat		Zjištěné nedostatky		Potvrz.
1. Vizuální prohlídka (čistota, kompletnost, poškození)				
1.1	Uchycení stříkačky (držák, axiální uchycení, páčka a západka pohonu, senzor založení stříkačky)			☒
1.2	Klávesnice			☒
1.3	Síťová zásuvka a kabel			☒
1.4	Multifunkční konektor MFC a kabel			☒
1.5	Baterie / akumulátor, kontakty			☒
1.6	Nožičky			☒
1.7	Švorka na stojan, západka svorky			☒
2. Funkční zkouška				
2.1	Zapněte přístroj Porovnejte průběh testu LCD s návodem Zkontrolujte zvukový signál Porovnejte zadanou rychlost s displejem			☒
2.2	Prověřte funkci přivolání obsluhy (pomocí MFC) Pozn.: může být nastaveno a) statická signalizace b) dyn. signalizace s aktivací rozepnutí smyčky c) dyn. signalizace bez aktivace rozepnutí smyčky			☒
2.3	Přepněte přístroj do aku/bat. režimu a sledujte průběh testu Pozn.: při vybitém akumulátoru/baterii ji vyměňte a zopakujte test			☒
2.4	Prověřte signalizaci displeje „000b“ resp. „000a“ s aku			☒
2.5	Tlačítko umlčení alarmu			☒
2.6	Senzor založení pístu stříkačky			☒
3.0	Okluzní tlaky (alternativně jednou z metod)	manometr +střík. 50 ml Kalibrační léra v.č CO 7712 770161/6	1(<0,6bar) 2(<0,9bar) 3(<1,2bar)	☐
			1(<40N) <u>20N</u> 2(<59N) <u>38N</u> 3(<75N) <u>55N</u>	☒
4.0	Volba stříkačky	OPS ☒ interní ☐ Eeprom ☐		XXX
4.1	Přepínání stříkaček 20 / 50 ml	Výrobce použ. stříkaček 20 ml Omnix 20 B Braun 50 ml OPS 50 B Braun	Souhlasí s nastavením 20 50	☒ ☒ ☒
4.2	Čitelnost tabulky stříkaček			☒
5.0	Zkouška elektrické bezpečnosti podle ČSN EN 60601 Měřeno přístrojem Meditest 50 v.č.200298			
	Síťové napětí <u>230</u> V	Odpor ochranného vodiče vč. kabelu (<0,2 Ohm) <u>208</u> Ohm	Unikající proud (<10 µA) <u>1</u> µA	☒
6.0	Dokumentace přístroje: • návod k obsluze • provozní kniha • bezpečnostní prohlídky • evidence oprav			☐ ☐ ☐ ☐
7.0	Příslušenství (MFC, kabel napájení 12 V, kabel přivolání obsluhy)			☒
8.0	Speciální nastavení: Omezení rychl. dávkování: <u>99.9</u> ml/h. Omezení rychl. dávkování bolusu <u>800</u> ml/h.			

Výsledek prohlídky:

Byly zjištěny nedostatky, které mohou způsobit ohrožení pacienta, obsluhy nebo okolí. ☒ ANO ☒ NE

Zdravotnický prostředek splňuje požadavky uvedené výše a vyhovuje technickým předpisům, popř. technickým dokumentům, technickým normám, podle nichž byl vyroben.

Doporučená opatření:

Datum příští prohlídky:


6.2008

Prohlídku provedl: datum: 28.6.2006

podpis: Bičánek M.

Přístroj předán: 301

podpis: 593

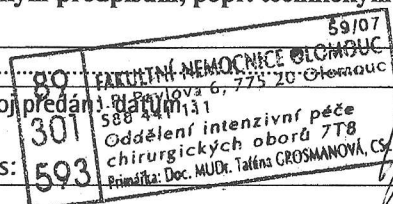

B | BRAUN

B. Braun Medical s.r.o.

servisní středisko

HDS EuroCare s.r.o.

Konská 543

Tel.: +420 558 304 420

Fax: +420 558 338 322

Záznam o provedené kontrole uložte u provozní dokumentace přístroje.