

Protokol o provedení periodické prohlídky

Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům zákona 123/2000Sb. v platném znění

Zákazník: Fakultní nemocnice Olomouc
IPCHO
 Přístroj: Defibrilátor
 Typ: Responder 3000 + 517-201207
 Výrobní číslo: 101023230 + 101026549

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené testy, zkoušky, měření.
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
		Funkční kontrola
☒	☐	Auto test po zapnutí
☒	☐	Test tlačítek start, výboj, synchronizace
☒	☐	Test tiskárny
☒	☐	Test stimulátoru
☒	☐	Test EKG obvodů, zobrazení amplitudy a periody QRS
☒	☐	Test kardioverze
☒	☐	Test akumulátoru
☒	☐	Čas nabití na maximální energii 360J – maximum 9 sec.
		Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,52 mA max. 1 mA
	Příložná část	0,044 mA max. 0,1 mA
Izolační odpor	>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče	0,07 Ω	max 0,2 Ω

Kontrola energie defibrilačního výboje

Nastavená energie	Naměřená hodnota	Povolená tolerance
2	2,2	0,5-3,5
5	5,1	3,5-6,5
7	7,4	5,5-8,5
10	10,5	8,5-11,5
20	20,9	18,5-21,5
30	30,8	27,7-32,2
50	48,0	46,2-53,7
100	101,2	92,5-107,5
150	151,8	138,7-161,2
200	204,6	185,0-215,0
300	305,7	277,5-322,5
360	363,0	333,0-387,0

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají – ~~neodpovídají~~ hodnotám předepsaným výrobcem. Zkontrolovaný přístroj je – ~~není~~ plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50	v.č.	200 341
Tester defib. QE-5	v.č.	59971

Technik	Kovář Pavel
Podpis technika	
Datum kontroly	1.6.2006
Datum další dop. kontroly	5/2007