

OK

11. Kontrola vzduchového detektoru

Pumpa zapnutá, bez setu: svítí červená kontrolka a vzduchový detektor na displeji



Vlož infuzní set naplněný vodou:

červená kontrolka a vzduchový detektor na displeji zhasnou



Nastav rychlost 60 ml/hod a spusť podávání infuze.

Podrž kapkovou komůrku dnem vzhůru alespoň 20s aby se generovalo více než 0,25 ml vzduchových bublin pro pumpu, nastavenou na detekování nakumulovaného vzduchu 0,25 ml v 15 minutách.

Zkontroluj alarm „air bubble“ při průchodu bublin čidlem.



12. Tlakový detektor

Vlož do pumpy infuzní set naplněný vodou s manometrem na konci (viz. §5.4.2).

Nastav hranici protitlaku 750 mm Hg.

Spusť infuzi 100 ml/h.

Zkontroluj, že manometr ukazuje 750 mm Hg $\pm$ 75 v okamžiku tlakového alarmu.

Zopakuj to pro hranici tlaku 500 mm Hg.



13. Kontrola rychlosti podávání

Konec infuzního setu vlož do odměrného válce.

Nastav 80 ml/h

Poznač si zachycený objem a čas

Nastav rychlost podávání (viz. 3.2.3): 76 ml < zachycený objem: *82*ml < 84ml



14. Kontrola akumulátoru

Nabijte dostatečně akumulátor

Spusť infuzi při 125 ml/h, síťová šňůra odpojená

Autonomie > 1h 30 min.

Důležité: Pokud není autonomie delší než 1h 30min, vyměň akumulátor.



15. Test elektrické bezpečnosti



- neutrální vodič a SUBD 15 (každý pin)

- fáze a SUBD 15 (každý pin)

Poznámky:

Zdravotnický prostředek je ☒ není ☐
funkční a bezpečný pro použití k výrobem určenému účelu při poskytování zdravotní péče.

Doporučené datum příští bezpečnostně technické kontroly: *28.6.07*

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje požadavky národní legislativy potřebné k uvedeným činnostem.

datum: *28.6.06*
podpis: *[Signature]*
FRESHNUS MEDICAL CARE
Česká republika spol. s r.o.
Luzná 591, 160 05 Praha 6
Tel.: 235 358 212
DIČ: CZ45790834
TECHNICKÝ SERVIS -9-

Servisní výkaz

Servisní oddělení
Kancelář tel.: 235 358 212
Hot line: 605 204 747

FRESENIUS MEDICAL CARE
Česká republika spol. s r.o.
Lužná 591 160 05 Praha 6
DIČ: CZ45790884

FN Olomouc
I.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
JIP chirurgických oborů

Dispečink oprav

Fakturační č. zákazníka :
311063

Číslo SV CZ2060090462		Datum : 28.06.2006		Typ přístroje : MVP PT	
Označení přístroje : *A8002		Výrobní číslo přístroje : 17614028		Provozní hodiny :	
Technik : 009	Status přístroje : 00	Kód činnosti 100F	Č. jednotka 1 :	Doba čekání :	Č. jednotka 2 :
Technik : Petr Slaviček		Označení u zákazníka :		Objednavatel : pí.Ludvíková-588443125-D O	
Objednávka číslo : DO 8629		Začátek :	Konec :	Přesčas :	Kód přesčasu :

Dodací č. zákazníka : 311063 FN Olomouc		Smlouva :		Chybové kódy : 1A 16 1T	
Číslo dílu BTK	Název dílu Bezpečnostně technická kontrola (údržba)	Poznámka	Množství 1	Sklad evidence	
Důvod návštěvy : BTK		Příčina závady: BTK	Odstranění závady: Provedena bezpečnostně technická kontrola		
Doplňující informace :					
Pouze přístroj použité přístroje: multimetr vč.010506398, SW Control, Meditest-200 166 Provedena bezp. technická kontrola dle protokolu. BTK protokol předán!					
Odpor ochranného vodiče : 0,09 Ohm		Unikající proud : 190 µA			
Byl/-a jste spokojen/-a s kvalitou provedené práce: ANO - NE a termínem provedení: ANO - NE		Podpis a razítko technika:  Česká republika spol. s r.o. Lužná 591, 160 05 Praha 6 Tel.: 235 358 212 DIČ: CZ45790884 TECHNICKÝ SERVIS -9-		Potvrzujeme provedení práce : 29-06-2006 Fakultní nemocnice Olomouc odbor hlavního mechanika dispečink oprav I.P. Pavlova 6, 775 20 OLMOUC tel.: 588 444 311 fax: 588 442 529 	