



Fresenius Medical Care

Bezpečnostně technická kontrola přístroje MODULE MVP PT/ST (podle zákona č. 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Tuto kontrolu je třeba provést nejpozději po 12 měsících od poslední bezpečnostně technické kontroly autorizovaným servisem.

Upozornění: před bezpečnostně technickou kontrolou dostatečně nabijte akumulátor přístroje

typ: MVP-PT

výrobní číslo přístroje: 176 14 0 35 Umístění přístroje: JIP PHIR. OBORU

OK

- | | | | |
|-----|--|-------|---|
| 1. | Kontrola vzhledu krytu, síťové šňůry, nálepek a membrány | | ☒ |
| 2. | Doba chodu na displeji (test 1) | H/D/M | ☒ |
| 3. | Datum poslední údržby (test 1) | H/D/M | ☒ |
| 4. | Celková doba chodu (test 6) | H/D/M | ☐ |
| 5. | Kontrola LED, bzučáku a indikací (test 2) | | ☒ |
| 6. | Kontrola tlačítek klávesnice (test 3) | | ☐ |
| 7. | Kontrola bezpečnostní klapky | | |
| | Naplněný set vložit do pumpy, zavřít dvířka:
alarmy nepřítomny. | | ☒ |
| | Zavřít a otevřít dvířka:
zkontroluj funkci klapky na setu: na konci setu žádné kapky. | | ☒ |
| 8. | Kontrola systému připojení
Připoj Module k Base
Zapoj Base do elektrické sítě
Zapni Module:
Zkontroluj, že na Module a na Base se zobrazí číslo Module
Zkontroluj, zda zobrazené číslo odpovídá umístění Module
Pomalou odpoj Module:
zkontroluj, zda v okénku číslo Module bliká „C“ | | ☒
☒
☒ |
| | Pokud je problém v systému připojení, nastav zámek modulů (viz. § 4.7) | | |
| 9. | Kontrola kontrolky napájení:
Připojte Base k síti a zapněte Module:
Kontrolka sítě (symbol zástrčky) svítí | | ☒ |
| | Odpojte Base od sítě:
Kontrolka provozu z akumulátoru svítí | | ☒ |
| 10. | Kontrola kapkového detektoru (pokud je k dispozici)
Překontroluj jeho neporušenost (známky poškození, čistota, pružina, šňůra)
Připoj detektor k Module, vlož set naplněný vodou, spusť podávání infuze:
zkontroluj, zda zelená kontrolka svítí při každé kapce. | | ☒ |
| | Odpoj detektor: alarm „drip sensor“ | | ☒ |
| | Připoj kapkový detektor, nastav infuzi na 60 ml/h a vyjmi komůrku z kapkového detektoru. Ověř alarm: 40s < 2min30sec | | ☒ |

OK

11. Kontrola vzduchového detektoru

Pumpa zapnutá, bez setu: svítí červená kontrolka a vzduchový detektor na displeji ☒

Vlož infuzní set naplněný vodou:

červená kontrolka a vzduchový detektor na displeji zhasnou ☒

Nastav rychlost 60 ml/hod a spusť podávání infuze.

Podrž kapkovou komůrku dnem vzhůru alespoň 20s aby se generovalo více než 0,25 ml vzduchových bublin pro pumpu, nastavenou na detekování nakumulovaného vzduchu 0,25 ml v 15 minutách.

Zkontroluj alarm „air bubble“ při průchodu bublin čidlem. ☒

12. Tlakový detektor

Vlož do pumpy infuzní set naplněný vodou s manometrem na konci (viz. §5.4.2).

Nastav hranici protitlaku 750 mm Hg.

Spusť infuzi 100 ml/h.

Zkontroluj, že manometr ukazuje 750 mm Hg $\pm$ 75 v okamžiku tlakového alarmu. ☒

Zopakuj to pro hranici tlaku 500 mm Hg.

13. Kontrola rychlosti podávání

Konec infuzního setu vlož do odměrného válce.

Nastav 80 ml/h

Poznač si zachycený objem a čas

Nastav rychlost podávání (viz. 3.2.3): 76 ml < zachycený objem: *82*ml < 84ml ☒

14. Kontrola akumulátoru

Nabijte dostatečně akumulátor

Spusť infuzi při 125 ml/h, síťová šňůra odpojená

Autonomie > 1h 30 min.

Důležité: Pokud není autonomie delší než 1h 30min, vyměň akumulátor. ☒

15. Test elektrické bezpečnosti ☒

- neutrální vodič a SUBD 15 (každý pin)

- fáze a SUBD 15 (každý pin)

Poznámky:

Zdravotnický prostředek je ☒ není ☐

funkční a bezpečný pro použití k výrobcem určenému účelu při poskytování zdravotní péče.

Doporučené datum příští bezpečnostně technické kontroly: *27.6.07*

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje požadavky národní legislativy potřebné k uvedeným činnostem.

datum: *27.6.06*

FRESENIUS MEDICAL CARE

podpis: *[signature]* česká republika spol. s r.o.

Lužnická 160 05 Praha 6

Tel.: 235 358 212

DIČ: CZ45790884

TECHNICKÝ SERVIS -9-