



Fresenius Medical Care

Bezpečnostně technická kontrola přístroje MODULE MVP PT/ST (podle zákona č. 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Tuto kontrolu je třeba provést nejpozději po 12 měsících od poslední bezpečnostně technické kontroly autorizovaným servisem.

Upozornění: před bezpečnostně technickou kontrolou dostatečně nabijte akumulátor přístroje

typ: MVP-PT

výrobní číslo přístroje: 477044 10

Umístění přístroje: FN Olomouc- IPCHO

1019653-000

OK

- | | | | |
|-----|---|-------|-------------------------------------|
| 1. | Kontrola vzhledu krytu, síťové šňůry, nálepek a membrány | | ☒ |
| 2. | Doba chodu na displeji (test 1) | H/D/M | ☒ |
| 3. | Datum poslední údržby (test1) | H/D/M | ☒ |
| 4. | Celková doba chodu (test 6) | H/D/M | ☒ |
| 5. | Kontrola LED, bzučáku a indikací (test 2) | | ☒ |
| 6. | Kontrola tlačítek klávesnice (test 3) | | ☒ |
| 7. | Kontrola bezpečnostní klapky | | ☒ |
| | | | |
| | Naplněný set vložit do pumpy, zavřít dvířka: | | ☒ |
| | alarmy nepřítomny. | | |
| | Zavřít a otevřít dvířka: | | ☒ |
| | zkontroluj funkci klapky na setu: na konci setu žádné kapky. | | |
| 8. | Kontrola systému připojení | | |
| | Připoj Module k Base | | |
| | Zapoj Base do elektrické sítě | | |
| | Zapni Module: | | ☒ |
| | Zkontroluj, že na Module a na Base se zobrazí číslo Module | | ☒ |
| | Zkontroluj, zda zobrazené číslo odpovídá umístění Module | | |
| | Pomalů odpov. Module: | | ☒ |
| | zkontroluj, zda v okénku číslo Module bliká „C“ | | |
| | Pokud je problém v systému připojení, nastav zámek modulů (viz. § 4.7) | | |
| 9. | Kontrola kontrolky napájení: | | |
| | Připojte Base k síti a zapněte Module: | | ☒ |
| | Kontrolka sítě (symbol zástrčky) svítí | | |
| | Odpojte Base od sítě: | | ☒ |
| | Kontrolka provozu z akumulátoru svítí | | |
| 10. | Kontrola kapkového detektoru (pokud je k dispozici) | | ☒ |
| | Překontroluj jeho neporušenost (známky poškození, čistota, pružina, šňůra) | | |
| | Připoj detektor k Module, vlož set naplněný vodou, spusť podávání infuze: | | |
| | zkontroluj, zda zelená kontrolka svítí při každé kapce. | | ☒ |
| | Odpoj detektor: alarm „drip sensor“ | | ☒ |
| | Připoj kapkový detektor, nastav infuzi na 60 ml/h a vyjmi komůrku z kapkového | | ☒ |

detektoru. Ověř alarm: 40s < 2min30sec

OK

11. Kontrola vzduchového detektoru

- Pumpa zapnutá, bez setu: svítí červená kontrolka a vzduchový detektor na displeji ☒
- Vlož infuzní set naplněný vodou:
- červená kontrolka a vzduchový detektor na displeji zhasnou ☒
- Nastav rychlost 60 ml/hod a spusť podávání infuze.
- Podrž kapkovou komůrku dnem vzhůru alespoň 20s aby se generovalo více než 0,25 ml vzduchových bublin pro pumpu, nastavenou na detekování nakumulovaného vzduchu 0,25 ml v 15 minutách.
- Zkontroluj alarm „air bubble“ při průchodu bublin čidlem. ☒

12. Tlakový detektor

- Vlož do pumpy infuzní set naplněný vodou s manometrem na konci (viz. §5.4.2).
- Nastav hranici protitlaku 750 mm Hg.
- Spusť infuzi 100 ml/h.
- Zkontroluj, že manometr ukazuje 750 mm Hg +/- 75 v okamžiku tlakového alarmu. ☒
- Zopakuj to pro hranici tlaku 500 mm Hg. ☒

13. Kontrola rychlosti podávání

- Konec infuzního setu vlož do odměrného válce.
- Nastav 80 ml/h
- Poznač si zachycený objem a čas
- Nastav rychlost podávání (viz. 3.2.3): 76 ml < zachycený objem:ml < 84ml ☒

14. Kontrola akumulátoru

- Nabijte dostatečně akumulátor
- Spusť infuzi při 125 ml/h, síťová šňůra odpojená
- Autonomie > 1h 30 min.
- Důležité: Pokud není autonomie delší než 1h 30min, vyměň akumulátor. ☒

15. Test elektrické bezpečnosti ☒

- neutrální vodič a SUBD 15 (každý pin)
- fáze a SUBD 15 (každý pin)

Poznámky:

Zdravotnický prostředek je ☒ není ☐
funkční a bezpečný pro použití k výrobcem určenému účelu při poskytování zdravotní péče.

Doporučené datum příští bezpečnostně technické kontroly: 10.7.2008

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje požadavky národní legislativy potřebné k uvedeným činnostem.

datum: 10.7.2007

podpis:

FRESCOMEDICAL CARE s.r.o.
Ceslářská 601, 250 05 Písek 6
IČ: 238 08 212
DIČ: CZ40780884
TECHNICKÝ SERVIS -9-9-

Rev. 02(NT0730 Rev.C0)24.5.2005