

Infusomat P

Výrobce: B. Braun Melsungen AG

Objednací číslo:	Výrobní číslo:	Uvedení do provozu:	Provozovatel / Vlastník:
8712344	5273		Fakultní nemocnice v Olomouci Inv.č. I022788-000

Periodická prohlídka musí být prováděna každých 24 měsíců podle přiloženého seznamu kontrol, návodu k obsluze a servisního návodu, případně technických změn a její provedení musí být dokumentováno. Používejte pouze kalibrované a schválené měřicí přístroje a pomůcky.

Kontrolovat	Poznámky	Vyhovuje / Nevyhovuje
Vizuální kontrola		
1.0 Čistota, kompletnost, nepoškozený stav		☒ ☐
1.1 Membrána prstové pumpy		☒ ☐
1.2 Foliová klávesnice, gumové nožky		☒ ☐
1.3 Ovládání, uzávěr dvířek, víko pumpy		☒ ☐
1.4 Uzavírací svěrka setu		☒ ☐
1.5 Síťová šňůra včetně koncovek		☒ ☐
1.6 Konektor MFC, včetně kabelu		☒ ☐
1.7 Kapkový senzor (kabel, konektor)		☒ ☐
1.8 Kontrola pojistek	100/110/120V = T0,315A 200/230/240V = T0,16A	☒ ☐

Bezpečnostní kontrola podle IEC EN 60601-1			
2.1 Změřit síťové napětí		230 V	☒ ☐
2.2 Odpor ochr. vodiče včetně přívodu	< 0,2 Ω	0,15 Ω	☒ ☐
2.3 Izolační odpor	>> 2 MΩ	> 20 MΩ	☒ ☐
2.4 Proud ochranným vodičem	<= 30 μA	16 μA	☒ ☐
2.5 Unikající proud přes pacienta	<= 5 μA	< 5 μA	☒ ☐

Kontrola funkce přístroje		Vyh. / Nevyh.	Vyh. / Nevyh.	
3.1.0 Zapnutí přístroje			3.5.0 Kontrola kapek	
3.1.1 Aut. Test	☒ ☐		3.5.1 Uzavřít svěrku (bez kapek) – alarm	☒ ☐
3.1.2 Všechny symboly LCD	☒ ☐		3.5.2 Průtok – alarm	☒ ☐
3.1.3 Kontrolky	☒ ☐		3.6.0 Okluzní tlaky	
3.2.0 Porovnat s displejem			3.6.1 Vyp. tlak nízký – alarm	0,5 Bar ☒ ☐
3.2.1 Zadání rychlosti	☒ ☐		3.6.2 Vyp. tlak vysoký – alarm	1,25 Bar ☒ ☐
3.2.2 Zadání objemu	☒ ☐		3.6.3 Mech. omezení tlaku	max. 2,9 Bar ☒ ☐ 1,9 Bar min. 1,8 Bar
3.2.3 Zadání času	☒ ☐		3.7.0 Ostatní	
3.2.4 Kontrola každého tlačítka	☒ ☐		3.7.1 Syst. přivolání obsluhy	☒ ☐
3.3.0 Test provozu z aku			3.7.2 Alarm otevř. Pumpy	☒ ☐
3.3.1 Přepnutí síť/aku/síť	☒ ☐		3.7.3 Potlačení alarmu	☒ ☐
3.3.2 Aut. test při zapnutí z aku	☒ ☐		3.7.4 Uzavírací svěrka setu	do 0,8 Baru bez průtoku ☒ ☐
3.4.0 Detektor vzduchu	Testovat s linkou Intrafix Air P 04062957		3.7.5 Přesnost dávkování	± 5% ☒ ☐ +3%
3.4.1 0,4 ml vzduchu – alarm	☒ ☐		3.7.6 Provozní dokumentace	☐ ☐
3.4.2 Hodnota pro vzduch	max. 65 mV 39 mV	☒ ☐	Použité příslušenství	
3.4.3 Hodnota pro vodu	min. 455 mV 572 mV	☒ ☐	☐ Kabel přivolání obsluhy	☐ ☐
3.4.4 Hranice alarmu = 130 mV	Zkontrolovat, případně nastavit !	☒ ☐	☐	☐ ☐
			☐	☐ ☐

Výsledek kontroly:

Byly zjištěny nedostatky, které by mohly způsobit ohrožení pacienta, obsluhujícího personálu nebo třetí osoby:

☒ ANO - ☒ NE

Pokud ano, které:

Přijatá opatření pro další provoz:

Kontrolu provedl:		Termín další kontroly:	Přístroj předán:	
Jméno / Datum	Podpis		Převzal / Datum	Podpis
Radomír Tománek 29.5.2008		6/2010	Vrchní s. Ludmila Lysá 29.5.2008	<i>lysa</i>

Pozn. Zdravotnický prostředek splňuje požadavky uvedené výše a vyhovuje technickým předpisům, popř. technickým dokumentům nebo technickým normám, podle nichž byl vyroben.

B | BRAUN

11
IČ: 485 86 285
DIČ: CZ48586285

B. Braun Medical s.r.o.
Servisní centrum
HOTLINE
Tel. +420-271 091 555
Fax +420-271 091 552