

Periodická kontrola a prověření ZP

podle zákona 123/2000 sb., §28:

Výrobce: B. Braun Melsungen AG

B | BRAUN

Infusomat P

Objednací číslo:	Výrobní číslo:	Uvedení do provozu:	Provozovatel/Mlastník:
8712344	5273	E-1022788-000	FN OLOMOUČ I.PCHO

Periodická prohlídka musí být prováděna každých 24 měsíců podle přiloženého seznamu kontrol, návodu k obsluze a servisního návodu, případně technických změn a její provedení musí být dokumentováno. Používejte pouze kalibrované a schválené měřicí přístroje a pomůcky.

Kontrolovat	Poznámky	Vyhovuje / Nevyhovuje
Vizuální kontrola		
1.0 Čistota, kompletnost, nepoškozený stav		☒ ☐
1.1 Membrána prstové pumpy		☒ ☐
1.2 Foliová klávesnice, gumové nožky		☒ ☐
1.3 Ovládání, uzávěr dvířek, víko pumpy		☒ ☐
1.4 Uzavírací svěrka setu		☒ ☐
1.5 Síťová šňůra včetně koncovek		☒ ☐
1.6 Konektor MFC, včetně kabelu		☒ ☐
1.7 Kapkový senzor (kabel, konektor)		☒ ☐
1.8 Kontrola pojistek	100/110/120V=T0,315A 200/230/240V=T0,16A	☒ ☐

Bezpečnostní kontrola podle IEC EN 60601-1 Měřicí přístroj MEDITEST 50 v.č.200298

2.1 Změřit síťové napětí		...230... V	☒ ☐
2.2 Odpor ochr. vodiče včetně přívodu	< 0,2 Ω	...0,08... Ω	☒ ☐
2.3 Izolační odpor	>> 2 MΩ	...2,2... MΩ	☒ ☐
2.4 Proud ochranným vodičem	<= 30 μA	...16... μA	☒ ☐

Kontrola funkce přístroje	Vyh./Nevyh.		Vyh./Nevyh.
3.1.0 Zapnutí přístroje	☒ ☐	3.5.0 Kontrola kapek	☒ ☐
3.1.1 Aut. test	☒ ☐	3.5.1 Uzavřít svěrku (bez kapek) – alarm	☒ ☐
3.1.2 Všechny symboly LCD	☒ ☐	3.5.2 Průtok – alarm	☒ ☐
3.1.3 Kontrolky	☒ ☐	3.6.0 Okluzní tlaky	☒ ☐
3.2.0 Porovnat s displejem	☒ ☐	3.6.1 Vyp. tlak nízký – alarm	0,6... Bar ☒ ☐
3.2.1 Zadání rychlosti 125ml/h	☒ ☐	3.6.2 Vyp. tlak vysoký – alarm	1,2... Bar ☒ ☐
3.2.2 Zadání objemu 25ml	☒ ☐	3.6.3 Mech. omezení tlaku	max. 2,9 Bar > 2,6... Bar > min. 1,8 Bar ☐ ☐
3.2.3 Zadání času 12min	☒ ☐	3.7.0 Ostatní	☒ ☐
3.2.4 Kontrola každého tlačítka	☒ ☐	3.7.1 Syst. přivolání obsluhy	☒ ☐
3.3.0 Test provozu z aku	☒ ☐	3.7.2 Alarm otevř. pumpy	☒ ☐
3.3.1 Přepnutí síť/aku/síť	☒ ☐	3.7.3 Potlačení alarmu	☒ ☐
3.3.2 Aut. test při zapnutí z aku	☒ ☐	3.7.4 Uzavírací svěrka setu	do 0,8 Baru bez průtoku ☒ ☐
3.4.0 Detektor vzduchu	Testovat s linkou Intrafix Air P 04062957	3.7.5 Přesnost dávkování	± 5% ☒ ☐
3.4.1 0,4 ml vzduchu - alarm	☒ ☐	3.7.6 Provozní dokumentace	☐ ☐
3.4.2 Hodnota pro vzduch	max. 65 mV ...39... mV	Použití příslušenství	☐ ☐
3.4.3 Hodnota pro vodu	min. 455 mV ...611... mV	☐	☐ ☐
3.4.4 Hranice alarmu = 130 mV	Zkontrolovat, případně nastavit !	☐	☐ ☐

Výsledek kontroly:

Byly zjištěny nedostatky, které by mohly způsobit ohrožení pacienta, obsluhujícího personálu nebo třetí osoby:

☐ ANO - ☒ NE

Zdravotnický prostředek splňuje požadavky uvedené výše a vyhovuje technickým předpisům, popř. technickým dokumentům, technickým normám, podle nichž byl vyroben.

Pokud ano, které:

Přijata opatření pro další provoz:

Kontrolu provedl:		Termín další kontroly:	Přístroj předán:
Jméno / Datum	Podpis	Prevzal / Datum	Podpis
Bíčanek 28.6.2006	<i>Bíčanek</i>	6.2008	59/07 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 588 441 111 Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů 778 Primárka: Doc. MUDr. Tatěna GROŠMANOVÁ, CSc.

B | BRAUN

B. Braun Medical s.r.o.

servisní středisko

HDS EuroCare s.r.o.

Konská 543

Tel.: +420 558 304 420

Fax: +420 558 338 322

Záznam o provedené kontrole uložte u provozní dokumentace přístroje.