

Doporučený provozní test

Sériové číslo: T9720058
Kontrolní číslo: D053792-000

Datum: 11. 10. 2007
Jméno technika: Robert Vhlář

1. Očištění (síťový kabel, kryt, rotor, válečky, senzor kapání) OK
2. Tastatura a displej:
 - a) tlačítko "ON" OK
 - b) tlačítko "OFF" OK
 - c) tlačítko "INCREMENT" (1-50, 50-300) OK
 - d) tlačítko "DECREMENT" (300-50, 50-1) OK
 - e) tlačítko "START/HOLD" OK
 - f) tlačítko "VOLUME" OK
 - g) tlačítko "DOSE" OK
3. Vizuální indikátory:
 - a) indikátor zapojení do sítě (AC Light) OK
 - b) indikátor chyby setu (No Set Error) OK
 - c) indikátor chyby průtoku (Flow Error) OK
4. Alarm
 - a) nastavení hlasitosti OK
5. Rychlost motoru (s umístěným setem):
Blíže informace – Test ověření rychlosti motoru
 - a) 295 ml/h (4.54 až 4.84 sekund) 98 ml/h s
 - b) 35 ml/h (12.77 až 13.56 sekund) s
6. Tlačítko "Volume Clear":
 - a) indikátor nulování objemu OK
7. Obvod senzoru:
 - a) napětí na fototranzistoru (0.99 až 1.01 VDC) (pozn.: upravit nastavení R42 pokud je třeba) 0,99 VDC
8. Obvod hlídání nízkého/vybitého stavu baterií:
 - a) indikátor LO BATT se rozsvítí při napětí na bateriích v rozmezí 6.8 až 7.2 VDC 7,0 VDC
 - b) alarm OK
 - c) pumpa se vypne při napětí na bateriích v rozmezí 5.3 až 5.6 VDC 5,4 VDC
9. Provozní test:
 - a) všechny jednotky by měly být v provozu 5 minut při 150 ml/h s umístěným zásobovacím setem OK
 - b) pumpa zapnutá po dobu 16 minut při 5 ml/h OK