

Fresenius Medical Care

Module DPS

Bezpečnostně technická kontrola
(podle zákona 123/2000 Sb. v platném znění dle z. č. 130/2003)

Tuto kontrolu je třeba provést nejpozději po 12 měsících od poslední bezpečnostně technické kontroly autorizovaným servisem.


Upozornění: před bezpečnostně technickou kontrolou plně nabijte (16 hodin) akumulátor přístroje

typ: DPS


FN OLOMOUC - URGENTNÍ PŘÍJEZD

výrobní číslo přístroje: 188 483 47

1. Zobrazení ubíhajícího času mezi dvěma BTK (tEst1)
2. Datum poslední údržby (tEst1)
3. Celkový čas na displeji (tEst6)
4. Kontrola LED (tEst2)
5. Kontrola tlačítek klávesnice (tEst3)
(viz. Technický manuál, kapitola 3)

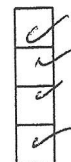

6. Kontrola čidla tlaku (tEst9)
Překontroluj, zda zobrazená hodnota je mezi 0 a 100g.
Stiskni a uvolni čidlo, zobrazená hodnota musí být mezi 0 a 100g
Pokud ne, viz. kalibrační mód EtAL9.

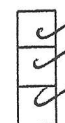

7. Kontrola ADC převodníku (tEstb)
vstup 3
hodnota mezi $066 \leq \dots \text{LSB} \leq 08F$
zobrazená hodnota-amplituda výstupu (0,6 V + 0,05)
pokud je mimo toleranci, viz kalibrační mód EtAL9

8. Kontrola čidla polohy (tEst C)

použij kalibr T300775-B nrbo T300940E a T300775G

horní poloha $114,5 \leq \dots \text{mm} \leq 115,5$
spodní poloha $19,8 \leq \dots \text{mm} \leq 20,2$



pokud je mimo toleranci, viz kalibrační mód EtAL6

9. Kontrola držáku stříkačky tEstF pro stříkačku používanou na zařízení, ověř zobrazený typ stříkačky použitím ověřovací pomůcky (VG3: T301453).
Pozn.: VG3 znamená: (V) ověřovací pomůcka, (G3) skupina stříkaček č.:3



[illegible]☒

Pokud je přístroj v kalibračním módu (EtALd), postupuj takto:

Stiskni tlačítko confirm, pumpa se nastaví do kalibračního módu (EtAL d).

☒☒

☒☒☒

6

☒

16. Kontrola linearity (BD Plastipack 60 ccm) – rychlost 50 ml/hod.....
kontrola polohy pístu $50\text{ml} < X < 60\text{ml}$ ☒
.....57.....mm ☒
rozdíl leží mezi $74,96 \leq \dots \text{7.5} \dots \leq 76,47$
17. Kontrola akumulátoru
nabíjení akumulátoru nejméně 16 hodin
test > 1 hod. při rychlosti podávání 120 ml/hOK.....h ☒
Pokud není autonomie dostatečná, vyměň akumulátor.
Pozn: akumulátor může ztratit 25 až 50 % své kapacity s ohledem na výrobce, stáří
nebo nepřítomnosti nabíjecích a vybíjecích cyklů.
18. Odpor ochranného vodiče (max. 0,2 Ω) ☒
Celkový unikající proud (max. 1 mA)
použitý přístroj: Meditest 50, v. č. ☒

Poznámky:

Výsledek BTK: přístroj vyhovuje ☒ přístroj nevyhovuje ☐

doporučené datum příští bezpečnostně technické kontroly: 3.5.07

datum: 3.5.06

technik: [signature]
Czech Republic spol. s r.o.
Praha 601, 160 05 Praha 6
Tel.: 235 358 212
DIČ: CZ45790884

TECHNICKÝ SERVIS -9-