



Fresenius Medical Care

Bezpečnostně technická kontrola přístroje MODULE MVP PT/ST (podle zákona č. 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Tuto kontrolu je třeba provést nejpozději po 12 měsících od poslední bezpečnostně technické kontroly autorizovaným servisem.

Upozornění: před bezpečnostně technickou kontrolou dostatečně nabijte akumulátor přístroje

typ: PT

výrobní číslo přístroje: 18249310
D309509

Umístění přístroje:

OK

- | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| 1. | Kontrola vzhledu krytu, síťové šňůry, nálepek a membrány | ☒ | |
| 2. | Doba chodu na displeji (test 1) | ☒ | |
| 3. | Datum poslední údržby (test 1) |H/D/M ☒ | |
| 4. | Celková doba chodu (test 6) |H/D/M ☒ | |
| 5. | Kontrola LED, bzučáku a indikací (test 2) |H/D/M ☒ | |
| 6. | Kontrola tlačítek klávesnice (test 3) | ☒ | |
| 7. | Kontrola bezpečnostní klapky | ☒ | |
|
Naplněný set vložit do pumpy, zavřít dvířka:
alarmy nepřítomny. | | | ☒ |
| Zavřít a otevřít dvířka:
zkontroluj funkci klapky na setu: na konci setu žádné kapky. | | | ☒ |
| 8. | Kontrola systému připojení
Připoj Module k Base
Zapoj Base do elektrické sítě
Zapni Module:
Zkontroluj, že na Module a na Base se zobrazí číslo Module
Zkontroluj, zda zobrazené číslo odpovídá umístění Module
Pomalů odpoj Module:
zkontroluj, zda v okénku číslo Module bliká „C“ | ☒
☒
☒ | |
| 9. | Pokud je problém v systému připojení, nastav zámek modulů (viz. § 4.7)
Kontrola kontrolky napájení:
Připojte Base k síti a zapněte Module:
Kontrolka sítě (symbol zástrčky) svítí
Odpojte Base od sítě:
Kontrolka provozu z akumulátoru svítí | ☒
☒
☒ | |
| 10. | Kontrola kapkového detektoru (pokud je k dispozici)
Překontroluj jeho neporušenost (známky poškození, čistota, pružina, šňůra)
Připoj detektor k Module, vlož set naplněný vodou, spusť podávání infuze:
zkontroluj, zda zelená kontrolka svítí při každé kapce.
Odpoj detektor: alarm „drip sensor“
Připoj kapkový detektor, nastav infuzi na 60 ml/h a vyjmi komůrku z kapkového detektoru. Ověř alarm: 40s < < 2min30sec | ☒
☒
☒
☒
☒ | |

OK

11. Kontrola vzduchového detektoru

Pumpa zapnutá, bez setu: svítí červená kontrolka a vzduchový detektor na displeji ☒

Vlož infuzní set naplněný vodou:

červená kontrolka a vzduchový detektor na displeji zhasnou ☒

Nastav rychlost 60 ml/hod a spusť podávání infuze.

Podrž kapkovou komůrku dnem vzhůru alespoň 20s aby se generovalo více než 0,25 ml vzduchových bublin pro pumpu, nastavenou na detekování nakumulovaného vzduchu 0,25 ml v 15 minutách.

Zkontroluj alarm „air bubble“ při průchodu bublin čidlem. ☒

12. Tlakový detektor

Vlož do pumpy infuzní set naplněný vodou s manometrem na konci (viz. §5.4.2).

Nastav hranici protitlaku 750 mm Hg.

Spusť infuzi 100 ml/h.

Zkontroluj, že manometr ukazuje 750 mm Hg +/- 75 v okamžiku tlakového alarmu. ☒

Zopakuj to pro hranici tlaku 500 mm Hg. ☒

13. Kontrola rychlosti podávání

Konec infuzního setu vlož do odměrného válce.

Nastav 80 ml/h

Poznač si zachycený objem a čas

Nastav rychlost podávání (viz. 3.2.3): 76 ml < zachycený objem: ml < 84 ml ☒

14. Kontrola akumulátoru

Nabijte dostatečně akumulátor

Spusť infuzi při 125 ml/h, síťová šňůra odpojená

Autonomie > 1h 30 min.

Důležité: Pokud není autonomie delší než 1h 30min, vyměň akumulátor. ☒

15. Test elektrické bezpečnosti

- neutrální vodič a SUBD 15 (každý pin)
- fáze a SUBD 15 (každý pin)

Poznámky:

Zdravotnický prostředek je ☒ není ☐
funkční a bezpečný pro použití k výrobcem určenému účelu při poskytování zdravotní péče.

Doporučené datum příští bezpečnostně technické kontroly: 15.5.2008

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje požadavky národní legislativy potřebné k uvedeným činnostem.

datum: 15.5.2007

podpis:

FRESENIUS MEDICAL CARE

Česká republika spol. s r.o.
Lužná 591, 160 05 Praha 6

Tel.: 235 358 212

Rev. 02 (NT0790: Rev. 01) 24.5.2005

TECHNICKÝ SERVIS

Meditest v.č. 200215

HMED v.č. 10951103

Multimetr v.č. 122264ABH