

Tuto kontrolu je třeba provést nejpozději po 12 měsících od poslední bezpečnostně technické kontroly autorizovaným servisem.

Zde neuvedená čísla kontrol nejsou součástí bezpečnostně technické kontroly.

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje požadavky národní legislativy potřebné k uvedeným činnostem.

Provedení a výsledek kontroly musí být vyznačeno v provozní knize přístroje.

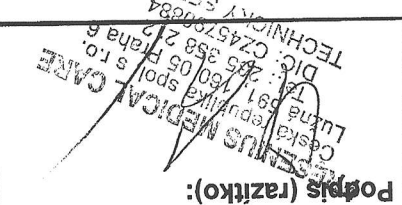
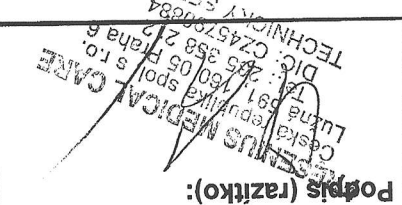
Technik: Štěpán Zrna

Zákazník: FN Olomouc

Výrobní číslo: 18904339

Typ přístroje: BASE Intensive SV č.: CZ 086430215

Č.	Procedura	Naměřeno	Stav
1.	Kontrola krytu, nálepek a funkčnosti Base		☒
2.	Klávesnice, kontrola otočného voliče		☒
3.	Kontrola výstupního napětí - zajistíte Module na Base - base připojíte k síťovému napětí - změřte napětí mezi pin 1 a pin 8 na konektoru 15-pin Sub-D Napětí: $7,25\text{ V} < 7,3 < 7,35\text{ V}$		☒
4.	Kontrola zkratu na výstupním napětí - zkrat mezi pin 1 a 8 na konektoru 15 pin Sub-D Base vypne. Po odstranění zkratu Base normálně restartujete		☒
5.	Kontrola elektrického propojení na konektoru 15 pin Sub-D - zajistíte Module na Base - base připojíte k síťovému napájení - zapnete Module - během samočinného testu (2-3 s) zkontroluj, že všechny indikace na Base se rozsvítí alespoň jednou - nainstaluj stříkačku - potvrď rychlost podávání - kontroluj, že údaje displeje na Base jsou v souladu s provozními parametry instalovaného Module - vyvolej alarm na (např. .) - zkontroluj, že červená indikace na Base bliká		☒
7.	Kontrola překročení počtu Module - devátý Module nainstalovaný na osmém se nerozpozná a vyvolá chybové hlášení		☒
8.	Překontroluj síťové napájení a zajisti Module na Base - připoj Base k síťovému napájení - překontroluj, že síťové napájení (oranžové) na Module a na Base svítí kontinuálně		☒

Datum: 16.10.2008		Vystavil: Štěpán Zrna		Podpis (razítko): 	
Poznámka:					
Zdravotnický prostředek je funkční a bezpečný pro použití k výrobcem určenému účelu při poskytování zdravotní péče a je uvolněn k dalšímu používání					
Datum: 16.10.2008		Kontrolu provedl: Štěpán Zrna		Podpis (razítko): 	
☒ Ano ☐ Ne Účel při poskytování zdravotní péče a je uvolněn k dalšímu používání					

10.	Kontrola elektrické bezpečnosti - ověř odpor > 10 megaohm mezi: táží a GND (pin7 na konektoru 15 pin SubD) Použité měřicí pomůcky: Revex 2051	☒
9.	Test "Battery autonomy" - nabíjejte dostatečně baterii - připojte Module na Base - připojte Base k síťovému napájení - zapněte Module a naprogramujte průtok - zkontrolujte, že indikace (oranžová) napájení Module a Base trvale svítí. - odpojte síťovou šňůru. - zkontrolujte, že indikace alarmu napájení (červená) na Base bliká. - zkontrolujte alarm: jedno přerušení každých 15 sekund první dvě minuty. - test výdrže baterie > 45 min Pokud výdrž baterie není dostatečná, vyměňte baterii. Změnění výdrže 25 až 50 % oproti originální hodnotě je normální a může být způsobeno buď zeslánutím chemických článků nebo když intervaly mezi nabítkami a vybitím jsou příliš dlouhé.	☒