

tel./fax: 596 728 055

E-mail: servis@technicare.cz



Technicare CZ, spol.s r.o.

Horní 73, 700 30 Ostrava 3, IČ: 268 17 802

Protokol o provedení bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku dle §27 zákona 123/2000 Sb.

Zákazník: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6 Olomouc 775 20

Přístroj: Elektrická odsávačka

Typ: ATMOS C361

Výrobní č. 20793803 URGENTNÍ PŘÍJEZD INT. AMBULANCE

Vizuální kontrola			
Kontrolovaná část přístroje	Zjištěné závady	Vyhovuje	Nevyhovuje
Kryt přístroje		✓	
Ovládací a signalizační prvky		✓	
Funkční a mechanické části		✓	
Síťový kabel		✓	
Síťové pojistky		✓	

Funkční testy		
Funkční test	Zjištěné závady	Vyhovuje
Test funkčnosti ovládacích tlačítek		✓
Test signalizačních a zobrazovacích prvků		✓
Test těsnosti odsávacího okruhu		✓
Kontrola funkčnosti filtrů a těsnění		✓

Kontrolní měření a kalibrace		
Kontrolní měření / Kalibrace	Naměřené hodnoty / Zjištěné závady	Vyhovuje
Max. podtlak	- 0,9 BAR	✓
Přesnost měření tlakoměru 0/-0,8Bar [±10%]		✓
Regulace omezení podtlaku -0,2Bar	- 0,18 BAR	✓
Regulace omezení podtlaku -0,4Bar	- 0,37 BAR	✓
Regulace omezení podtlaku -0,6Bar	- 0,58 BAR	✓
Regulace omezení podtlaku -0,8Bar	- 0,77 BAR	✓

Měření elektrických bezpečnostních parametrů přístroje		
Měřený parametr	Naměřená hodnota	Vyhovuje
Izolační odpor	> 340MΩ	✓

Použité měřicí přístroje:

Secutest SIII s.č.:3.117.183.01 , Digit. tlakoměr Greinsinger v.č:

Výsledek prohlídky:

Proveřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční, bezpečný a je možné jej používat při poskytování zdravotnické péče v souladu s návodem k použití.

Datum kontroly: 25. 4. 08

Datum příští kontroly: 25. 4. 09

Kontrolu provedl: KLÍMEK

Podpis: P. Klimek