

tel./fax: 596 728 055

E-mail: servis@technicare.cz



TECHNICARE

Technicare CZ, spol.s r.o.

Horní 73, 700 30 Ostrava 3, IČ: 268 17 802

Protokol o provedení bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku dle §27 zákona 123/2000 Sb.

Zákazník: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6 Olomouc 775 20

Přístroj: Elektrická odsávačka

Typ: ATMOS C401

Výrobní č.: 207 982 05

Vizuální kontrola			
Kontrolovaná část přístroje	Zjištěné závady	Vyhovuje	Nevyhovuje
Kryt přístroje		✓	
Ovládací a signalizační prvky		✓	
Funkční a mechanické části		✓	
Síťový kabel		✓	
Síťové pojistky		✓	

Funkční testy			
Funkční test	Zjištěné závady	Vyhovuje	Nevyhovuje
Test funkčnosti ovládacích tlačítek		✓	
Test signalizačních a zobrazovacích prvků		✓	
Test těsnosti odsávacího okruhu		✓	
Kontrola funkčnosti filtrů a těsnění		✓	

Kontrolní měření a kalibrace			
Kontrolní měření / Kalibrace	Naměřené hodnoty / Zjištěné závady	Vyhovuje	Nevyhovuje
Max. podtlak	-0,9 Bar	✓	
Přesnost měření tlakoměru 0/-0,8Bar [±10%]	±10%	✓	
Regulace omezení podtlaku -0,2Bar	-0,2 Bar	✓	
Regulace omezení podtlaku -0,4Bar	-0,5 Bar	✓	
Regulace omezení podtlaku -0,6Bar	-0,7 Bar	✓	
Regulace omezení podtlaku -0,8Bar	-0,9 Bar	✓	

Měření elektrických bezpečnostních parametrů přístroje			
Měřený parametr	Naměřená hodnota	Vyhovuje	Nevyhovuje
Izolační odpor	$R_{50} > 310 M\Omega / 500V$	✓	

Použité měřicí přístroje:

Secutest SIII s.č.:3.117.183.01 , Digit. tlakoměr Greinsinger v.č.:

Výsledek prohlídky:

Proveřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční, bezpečný a je možné jej používat při poskytování zdravotnické péče v souladu s návodem k použití.

Datum kontroly:

20. 6. 08


Datum příští kontroly:

20. 6. 09

Kontrolu provedl:

Podpis:

P.K.

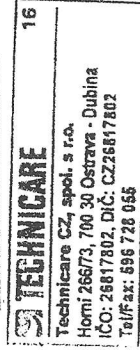

TECHNICARE

16

Technicare CZ, spol. s r.o.
Horní 266/73, 700 30 Ostrava - Dubina
IČO: 26817802, DIČ: CZ26817802
Tel/fax: 596 728 055