

DOPORUČENÁ KAŽDOROČNÍ ÚDRŽBA PŘÍSTROJE PRO VELKOOBJEMOVÝ OHŘEV KRVE A TEKUTIN

Model: Level 1® Fast Flow Fluid Warmer

Ref: H-1000, H-1100, H-1025, H-1200

Protokol pro každoroční údržbu přístroje Level 1*

Tento protokol pro každoroční údržbu je určený pro přístroj pro velkoobjemový ohřev krve a tekutin, zahrnuje použití roztoku 0.3% peroxidu vodíku/destilované vody, které po dobu jednoho roku zaručuje sterilitu systému.

Doporučená každoroční údržba:

Údržbu a kontrolu přístroje by měl provádět kvalifikovaný pracovník.

Datum uvedení do provozu: _____

Výrobní číslo: _____

	datum	datum	datum	datum
Výměna roztoku 0.3% Hydrogen Peroxidu / destilované vody	21.2.2005 Tardil	25.2.2006 Tardil		
výměna O-kroužků				
Vyčištění filtru větráku				
Test alarmu přehřátí vody	21.2.2005 Tardil	25.2.06 Tardil		
Test spínače plováku	21.2.2005 Tardil	25.2.06 Tardil		
Test spínače jednorázového setu	21.2.2005 Tardil	25.2.2006 Tardil		
Ověření kalibrace teploty				

*Tento každoroční protokol o údržbě je dodatek k protokolu o údržbě uvedeného v návodu k použití přístroje.