

Důležité pokyny a upozornění k používání stropních závěsných systémů

- Příklad musí být obsluhován pouze kvalifikovaným nemocničním personálem.
- Očistu přístroje musí provádět pouze kvalifikovaný personál úklidu.
- Zatížení přístroje nesmí překročit maximální povolenou zátěž, maximální zátěž je závislá na nosnosti jednotlivých ramen a na jejich kombinaci a je uvedena na ramenech.
- Příklad není určen k práci v explosivním prostředí a v prostředí s hořlavou směsí anestetika se vzduchem, kyslíkem nebo N₂O.
- Okolní teplota musí ležet v rozsahu 10° C - 40° C a relativní vlhkost nesmí překročit 75 %.
- Při umístění nebo odebrání koncových přístrojů z pružinového ramene musí být rameno zaaretováno (nebezpečí vymrštění).
- Pružinové rameno je nastaveno pro konkrétní koncové zatížení, při jeho změně musí servisní technik provést nové nastavení.
- Koncový přístroj je nutné vždy uzemnit zapojením do zásuvky vyrovnávače potenciálu, neuzemněný koncový přístroj může v případě poruchy způsobit elektrické napětí a ohrozit tak pacienta nebo obsluhu.
- K předejití možnému poškození přístroje nedorážíte tvrdě na vymezení zářky.
- Při pohybu motorového ramene nesmí být v manipulačním prostoru ramen žádné překážky.
- Pro čištění přístroje nepoužívejte kyselé prostředky ani prostředky s obsahem alkoholu.
- Dezinfekce přístroje nesmí být prováděna prostředky, které obsahují alkohol.
- Všechna zařízení firmy ONDAL musí být jednou ročně podrobena kontrole autorizovanou osobou.
- V případě problémů kontaktujte servisního technika, prodejce nebo výrobce.