



**Dodatek k Návodu k použití pro nástroje a příslušenství pro
VIO dV a neintegrované ESU**

PN 553640-01 Rev. A 2016.01 (Czech)

Copyright

© 2015 Intuitive Surgical, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Ochranné známky

Intuitive, Intuitive Surgical, Beyond the Limits of the Human Hand, da Vinci, da Vinci S, da Vinci Si, da Vinci Xi, EndoWrist, TilePro a InSite jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intuitive Surgical, Inc. Ochranné známky jiných stran jsou majetkem jejich příslušných vlastníků a je nutno k nim takto přistupovat.

Pouze na předpis

Dodatek k Návodu k použití pro nástroje a příslušenství

Tento dodatek k Návodu k použití pro nástroje a příslušenství *da Vinci Xi* popisuje nové pokyny, platné pro:

- Kapitulu Používání elektrochirurgických jednotek (ESU)
 - Používání ERBE VIO dV s kompatibilní neintegrovanou elektrochirurgickou jednotkou (ESU).

Zde popsané prvky jsou kompatibilní s integrovaným generátorem ERBE VIO® dV (VIO dV) a s kompatibilním neintegrováním ESU. Podrobné informace o používání VIO dV viz Příručka pro uživatele ERBE VIO dV a Příručka pro uživatele nástrojů a příslušenství *da Vinci Xi*. Podrobné informace o kompatibilních neintegrováních jednotkách ESU viz Příručka pro uživatele nástrojů a příslušenství *da Vinci Xi* a pokyny výrobců neintegrováních jednotek ESU.

Dodatek založte do složky s dokumentací systému *da Vinci Xi*.


Integrovaná ERBE VIO dV ESU

Tato část přináší nové pokyny týkající se části Integrovaný systém ERBE VIO dV ESU Příručky pro uživatele nástrojů a příslušenství *da Vinci Xi*.

Popisy ikon indikátorů přiřazení (VIO dV)

Následuje aktualizace tabulky ikon indikátoru přiřazení ovládání.

Tabulka 1 Ikony indikátoru přiřazeného ovládání

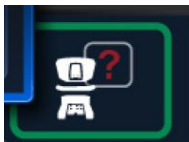Ikona	Význam
	<u>Pokud používáte současně VIO dV a neintegrované ESU,</u> • jsou VIO dV a neintegrované ESU zapojeny a napájeny.

Informace týkající se plného popisu ikon indikátorů viz Příručka pro uživatele nástrojů a příslušenství *da Vinci Xi*.

Příprava kompatibilní jednotky ESU

Tato část přináší nové pokyny týkající se části Příprava kompatibilní jednotky ESU Příručky pro uživatele nástrojů a příslušenství *da Vinci Xi*.

Předchozí dokumentace uvádí, že napájena a připojena k systému *da Vinci Xi* může být pouze jedna jednotka ESU. Avšak jednotka VIO dV a kompatibilní neintegrování jednotka ESU mohou být nyní připojeny a napájeny současně.

- i Poznámka:** Jestliže jsou jednotky VIO dV a kompatibilní neintegrování jednotka ESU současně připojeny k systému *da Vinci Xi* a jsou napájeny, jednotka VIO dV podporuje pouze používání nástroje na zatahování žil *da Vinci Xi* a neintegrování jednotka ESU podporuje pouze použití bipolárních nebo monopolárních nástrojů.


Řešení problémů

Aktivování je vypnuto, jestliže je monopolární nebo bipolární nástroj připojen k jednotce VIO dV když je připojena a napájena druhá, neintegrováná jednotka ESU. Připojte kabel pro kauterizaci k neintegrované jednotce ESU, nebo ESU odpojte.



Obrázek 1 Příklady zpráv o připojení kabelu pro kauterizaci k neintegrované jednotce ESU

Jestliže jsou nástroj na zatavování žil *da Vinci Xi* a bipolární nástroj nainstalovány na systém se dvěma připojenými jednotkami ESU, ale nástroj na zatavování žil není připojen k jednotce VIO *dV*, je bipolární aktivace vypnutá. Připojte nástroj na zatavování žil k jednotce VIO *dV* nebo nástroj na zatavování žil odstraňte.

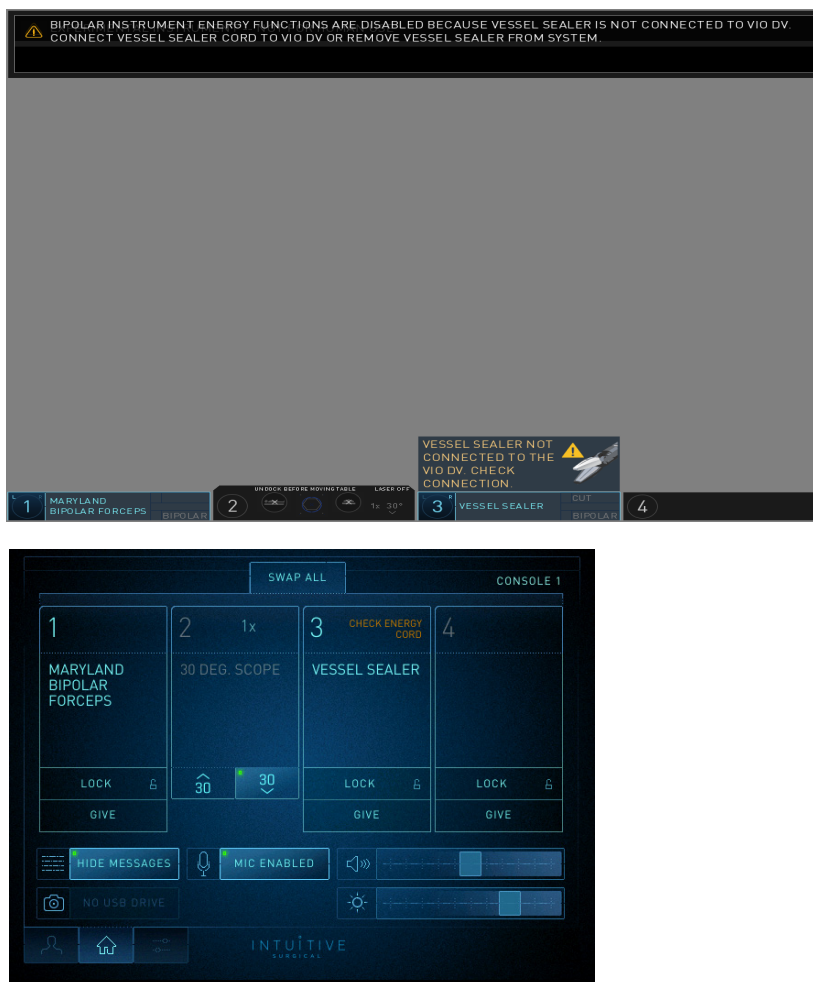

Obrázek 2 Zkontrolujte příklady zpráv týkající se připojení nástroje na zatavování žil

Konec