

da Vinci S[®], Si[®], Xi[®]

Dodatek k Návodu k použití pro nástroje a příslušenství

PN 553675-01 Rev. A 2016.03 (Czech)



Intuitive Surgical, Inc.
1266 Kifer Road
Sunnyvale, CA 94086 USA
www.intuitivesurgical.com



Intuitive Surgical, Sàrl
1, chemin des Mûriers,
1170 Aubonne Switzerland



0543

Copyright

© 2016 Intuitive Surgical, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Ochranné známky

Intuitive, Intuitive Surgical, Beyond the Limits of the Human Hand, da Vinci, da Vinci S, da Vinci Si, da Vinci Xi, EndoWrist, TilePro a InSite jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intuitive Surgical, Inc. Ochranné známky jiných stran jsou majetkem jejich příslušných vlastníků a je nutno k nim takto přistupovat.

Pouze na předpis

Úvod

Tento dodatek k Návodu pro použití pro nástroje a příslušenství *da Vinci S*, *da Vinci Si* a *da Vinci Xi* (IS2000, IS3000 a IS4000) popisuje informace specifické pro:

- Řádné používání nástrojů *da Vinci S*, *da Vinci Si* a *da Vinci Xi* pro manipulaci se srdečními ablačními sondami při srdečních zákrocích.

Tento dodatek uložte společně se systémem/systémy *da Vinci S*, *da Vinci Si* a *da Vinci Xi*.

Výstraha:

Při manipulaci se srdeční ablační sondou dbejte na následující výstrahy:

-  **VÝSTRAHA:** Při manipulaci se srdeční ablační sondou používejte pouze grasper srdeční sondy. Protože při jakémkoliv chirurgickém zákroku může dojít ke vzniku mikroskopických kovových úlomků, ukazuje se, že použití dalších nástrojů *da Vinci* (např. velký jehelec) při manipulaci se srdeční ablační sondou zvyšuje vznik kovových částic.

-Konec-