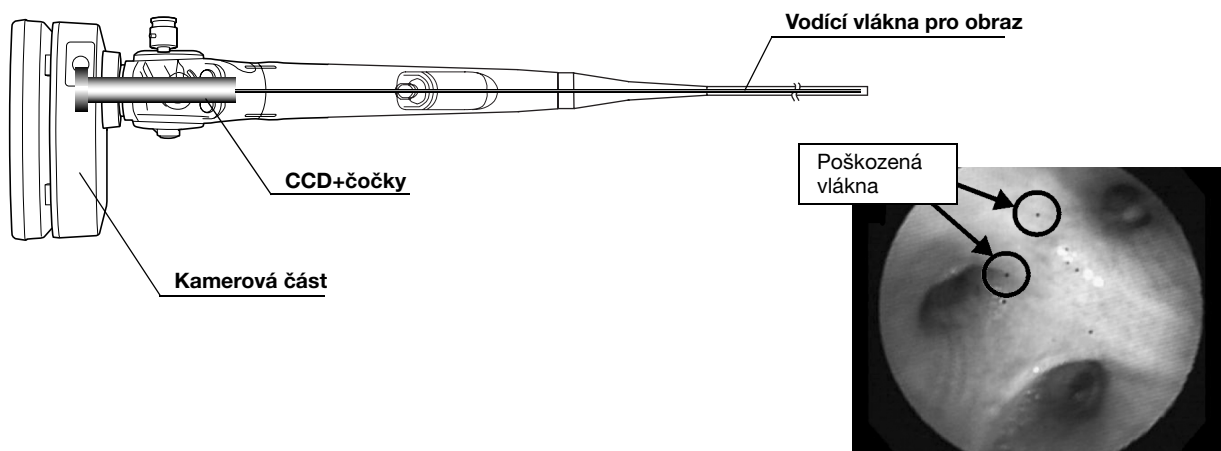


MOBILNÍ ENDOSKOP PRO DÝCHACÍ CESTY**OLYMPUS MAF-GM, MAF-TM****Důležité upozornění**

- Na rozdíl od běžných videoskopů, které mají nábojově vázaný prvek (CCD) na distálním konci zaváděcí části, MAF-GM a MAF-TM mají odlišný mechanismus:
Endoskopický obraz je přenášen vodícími vlákny pro obraz do kamerové části a je konvertován na elektrický signál pomocí CCD, který je v kamerové části.
Proto pokud jsou poškozena vodící vlákna pro obraz, mohou se v endoskopickém obraze objevit malé černé tečky. Je to obdobná situace jako u standardních fibroskopů.

Mechanismus

- Před ručním čištěním určitě proveďte zkoušku těsnosti endoskopu. Nepoužívejte endoskop, u kterého zjistíte jakoukoliv netěsnost. Používáním endoskopu, který netěsní, může dojít k náhlé ztrátě endoskopického obrazu, poškození ohybového mechanismu nebo jiným závadám.
- V porovnání s běžným endoskopem je přístroj těžší na proximálním konci z důvodu připojené kamery. Při manipulaci buďte opatrní, protože pád endoskopu na zem jej může těžce poškodit.

— Výrobce —**OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP.**

2951 Ishikawa-cho,
Hachioji-shi,
TOKYO 192-8507, JAPAN
Telefonní číslo: +81 42642-2111
Faxové číslo: +81 42646-2429

— Zplnomocněný zástupce —**OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS EUROPA GMBH**

Wendenstraße 14 -18
20097 HAMBURG, GERMANY
Postfach 10 49 08
20034 HAMBURG, GERMANY
Telefonní číslo: +49 40 23773-0
Faxové číslo: +49 40 23773-4656

— Distributor —**OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O.**

Evropská 176, 160 41 PRAHA 6,
CZECH REPUBLIC
Telefonní číslo: +420 221 985204
Faxové číslo: +420 221 985505