

NÁVOD K POUŽITÍ PZT

POMŮCKY A VYBAVENÍ PRO DOMACÍ PÉČI



Podložky antidekubitní
typ:

PC 1
PC 2
PC 3
PC 4
PC 6
PC 7
PC 9
PC 12

DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00

Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice

tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335

www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Antidekubitní podložky, které tvoří součást řady ortopedických, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility, jsou velmi účinným prostředkem v prevenci a terapii dekubitů. Jsou vhodné především k použití do invalidních vozíků, na klozetová křesla (sedící osoby) a pro pacienty dlouhodobě upoutané na lůžko. Svým tvarem a provedením umožňují snížit tlak způsobený vahou těla. Tlakové špičky, které působí převážně v oblastech kostních výčnělků, se při použití antidekubitní podložky vyhladí a tlak se rozloží na větší plochu. Zároveň zabezpečují rovnoměrné prokrvení celé pokožky, která je ve styku s antidekubitní podložkou, čímž je udržován krevní oběh a stálá tělesná teplota. Jádro podložky, které je umístěno v bavlněném prošívaném potahu (z jedné strany opatřen vodotěsnou povrchovou úpravou), je tvořeno speciálními polyesterovými dutými vlákny, která jsou velmi lehká a vzdušná a mají velmi dobré izolační vlastnosti.

Tabulka rozměrů :

Typ	Popis a Rozměry (cm)
PC 1	podložka pod patu
PC 2	podložka pod loket
PC 3	polštář omyvatelný 46 * 36
PC 4	sedací polštář omyvatelný vnitřní průměr 24 cm, vnější průměr 40 cm
PC 6	polštář pod záda
PC 7	lůžkový polštář 68 * 46
PC 9	sedací polštář do vozíku s bočnicemi a opěrkou zad omyvatelný 45 * 40 * 45
PC 12	sedací polštář do vozíku omyvatelný 45 * 40

ÚDRŽBA :

Podložky jsou vyrobeny z nehořlavých materiálů. Podložku lze čistit praním při teplotě 70 °C. Podložky se nesmí žehlit, obarvovat a čistit chemickými prostředky.

ZÁRUKA :

Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v přiloženém Záručním listě.