

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne koupě pomůcky. Záruka se nevztahuje na poškození vlivem nesprávného použití nebo mechanického poškození.

Varování! Úprava neschválená dodavatelem DMA Praha s. r. o. mohou ovlivnit délku poskytované záruky.

NÁVOD K POUŽITÍ PZT



PODLOŽKY ANTIDEKUBITNÍ



Zdravotní polštáře:

C 50

C 100

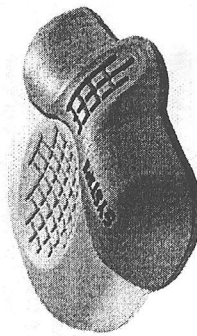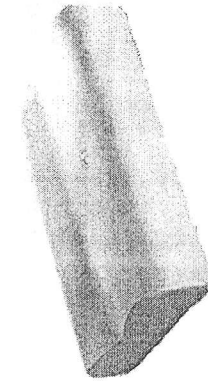

DODAVATEL:

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, 149 00 Praha 4

Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice

tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335

www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalení výrobků si firma DMA Praha s. r. o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.


POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ

Zdravotní ergonomické polštáře jsou velmi účinným prostředkem v prevenci i terapii při bolestech hlavy a krční páteře. Svým tvarem a provedením materiálu zabezpečují ergonomickou polohu krční páteře a hlavy během spánku, což umožňuje přirozenou relaxaci šíjového svalstva, a dokonale přizpůsobení tvaru namáhavých částí čimž dochází k maximálně rovnoměrnému rozložení tlaku způsobeného vahou hlavy. Tím je také zabezpečeno rovnoměrné prokrvení celé pokožky, která je ve styku s polštářem, což umožňuje udržování optimálního krevního oběhu a zachování stále tělesné teploty. Polštáře jsou anatomicky předvarovány a jsou vyrobeny z vysoce odolné viskoelastické polyuretanové (PU) pěny s paměťovým efektem. Polštáře jsou standardně dodávány s antialergickým hygienickým ochranným potahem.

APLIKACE

Polštář umístíte na matraci tak jak je uvedeno na obrázku:

Univerzální velikost polštářů je zvolena pro všechny morfologické typy, nicméně i přesto je potřeba několikadenní adaptace, než si tělo zbaví předešlých návyků.

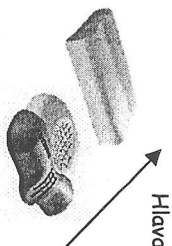

VAROVÁNÍ A DOPORUČENÍ

- Ujistěte se, že je polštář na matraci správně umístěn (viz obr).
- Polštář by měl být umístěn pouze na vodorovnou plochu.
- Pro správnou funkci doporučujeme používat polštář výhradně s originálním potahem.
- Z hygienických důvodů doporučujeme užívat polštář pouze jedním člověkem.
- Pokud dojde ke kontaminaci nebo k jinému znečištění potahu, doporučujeme ho ihned vyprat či vyměnit za obal náhradní (nutno zakoupit zvlášť).
- Polštář nedoplníte žádnou jinou podložkou.
- Dbejte na to aby se mezi polštář a kontaktní část pokožky nedostal žádný cizí předmět.
- V případě takového zjištění předmět ihned odstraňte.
- Polštář nepoužívejte k podkládání jiných částí těla. Je určena výhradně pro oblast hlavy.
- V případě dlouhodobé přetrvávající bolesti kontaktujte svého lékaře.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ	ŠxHxV (cm)	Váha (kg)	Materiál polštáře	Materiál potahu	Optimální uživatelské teplotní rozhraní (°C)
C 50	45x30x10	0,9	viskoelastický	19% polyester, 81% bavlna	-5 - 45
C 100	50x40x10	1,2 kg	viskoelastický polyuretan	54% polyester, 45% bavlna	-5 - 45

SKLADOVÁNÍ

Polštář skladujte v horizontální poloze.
Polštář nevystavujte přímému slunečnímu světlu, ohni a žáru.
Pro dlouhodobé zachování optimálních vlastností polštář skladujte na suchém a teplém místě.

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

Nežehlete a k odstranění nečistot nepoužívejte žravé a leplavé látky nebo hrubé předměty.

- Polštář: 
Omývejte v mýdlové vodě, poté nutno opláchnout vodou čistou. Sušte v otepleném prostoru na větraném místě.

- Potah: 
Perte maximálně na 40°C. Nepoužívejte aviváž a potah nežehlete. K suchému čištění používejte rozpouštědlo typu P. Sušte v otepleném prostoru na větraném místě

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podložku ani potah nespalujte a neodkládejte nikam do volné přírody.