

FYSIO ML 3

Elektricky polohovatelné lehátko

Návod k obsluze

POUŽITÍ

Lehátko je určeno k použití v rehabilitačních zařízeních pro vyšetření, manipulaci, cvičení a dalším potřebným výkonům v rámci léčby.

Umožňuje elektrické nastavení výšky plochy ke snadnějšímu nastupování pacienta a také pohodlné elektrické nastavení plochy s pacientem podle potřeby terapeuta a potřebného výkonu

Po stranách jsou umístěny upevňovací lišty, na nich jsou posunovatelné fixační pásy a nastavitelné rukojeti.

OBSLUHA:

Lehátko umístěte tak, aby z každé strany zůstal volný manipulační prostor cca 0,5 m. Po umístění na místo používání zablokujte přepravní kolečka sešlápnutím brzdy.

Nerovnost podlahy je možno korigovat nastavením rektifikačních šroubů v nohách lehátka.

Nastavení výšky: po připojení přívodního kabelu do síťové zásuvky 230V nastavit potřebnou výšku tlačítky na nožním ovládači.

POZOR

Kabel pro napájení umísťujte tak, aby nemohl být poškozen a osoby pohybující se kolem stolu na něj nešlapaly.

Elektrický pohon je dimenzovaný na přemísťování pacienta s max. hmotností 115 kg v přerušovaném cyklu 2/18 minut.

Čas přemístění s max zatížením 115 kg směrem nahoru je do 45 sec.

ÚDRŽBA:

Koženka je umyvateľná. Doporučujeme bežný saponátový prostriedok. Pro desinfekci je možno pridať desinfekčný prostriedok např. ajatin, chloramin. Nepoužívejte na čištění organická rozpouštědla – líh, benzín, toluen, ředidla.
Pohyblivé části jsou samomazné, nevyžadují další domazávání

Technické údaje:

Napájecí napětí	230V/50Hz
Příkon	max 100VA
Bezpečnostní třída	I
Nastavení výšky	50 – 90 cm elektricky
Dovolené zatížení	115 kg
Hmotnost lehátka	65 kg

ZÁRUKA:

Výrobce poskytuje 24 měsíční záruku mimo běžného opotřebení koženky a mechanického poškození způsobeného nesprávným použitím a nesprávnou údržbou koženky.

Datum prodeje:

31. 6. 2005

fysiomed CS s.r.o.

Konšká č.p. 453, Třinec 739 61

Tel., Fax: +420 558 304 774

DIČ/ICO: 364-25378058

Výrobní číslo:

5132

Servis: FYSIOMED CS s.r.o., areál nem. Podlesí, 73961 Třinec tel. 558 - 304774