

Příležitostně naolejování pohyblivých částí vozíku přispěje k bezporuchovému provozu a prodlouží jeho životnost.

Záruka a opravy

Na vozík je poskytována záruka 2 roky na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a vady vzniklé nesprávným používáním. Se záručními a ale i s pozáručními opravami se vždy obračejte z důvodu zachování záruky pouze na naše odborná pracoviště na níže uvedených adresách. Věříme, že Vám vozík ulehčí Vaši situaci a že s ním budete spokojeni.

Váš

Dodavatel

Středisko Praha
Ronkova 13/353
180 00 Praha 8
tel: 266 313 652
fax: 266 313 652-11

Středisko Opava
Pivovarská 7/71
746 01 Opava
tel/fax: 553 775 226

Středisko České Budějovice
Staroměstská 2608
370 04 České Budějovice
tel/fax: 387 432 502

Středisko Brno
Minská 100
616 00 Brno
tel/fax: 541 240 393


- ① Dodavatel ujišťuje spotřebitele, že na tento výrobek bylo
vystaveno prohlášení o shodě.

Návod ze dne 15.12.2013

Verze 12.13

ORTOSERVIS
Ronkova 13/353, 180 00 Praha 8,
tel: 266 313 652, fax: 266 313 652-11

VITA MAXIMA

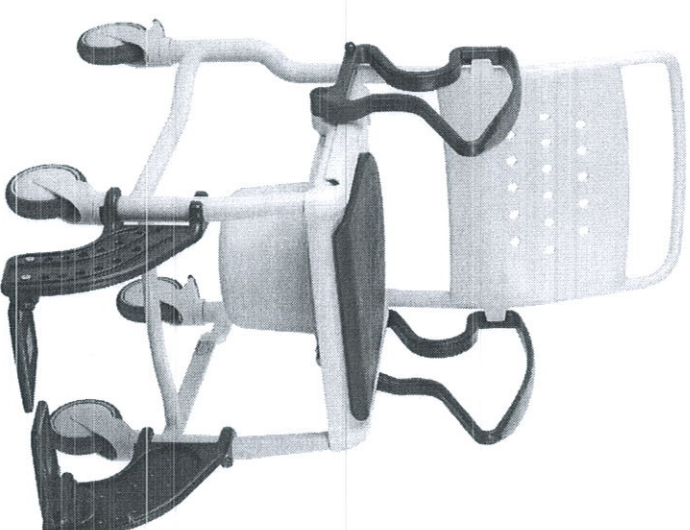

Návod k použití
toaletního a sprchovacího
vozíku **BONN**

Popis vozíku

Toaletní a sprchovací vozík Bonn je určen pro usnadnění hygienických potřeb uživatele. Toaletní vozík je vybaven plastovou nádobou, přičemž dvoudílný sedák umožňuje vyjmutí nádoby jak zezadu, tak shora. Vozík je konstruován tak, že po vyjmutí nádoby lze s vozíkem nadejít nad běžnou klozetovou mísu, jejíž horní hrana je max. 44 cm od země. Konstrukce vozíku a použité materiály dále umožňují jeho využití v mokřém prostředí. Po odejmutí měkčeného krytu otvoru sedačky a vyjmutí toaletní nádoby lze velmi snadno provést všechny základní hygienické úkony včetně sprchování. Vozík je určen pro pohyb v interiéru. Není vhodný pro dlouhodobé sezení.

Rozměry vozíku jsou následující:

Šířka sedačky	46 cm
Výška sedačky od země	53 cm
Hloubka sedačky	45 cm
Průměr koleček	12,5 cm
Celková šířka	56 cm
Celková délka	87 cm
Hmotnost	14,5 kg
Nosnost: max	130 kg

Výrobce: REBOTEC Rehabilitationsmittel GmbH, Artlandstrasse 57-59, D49610 Quackenbruck

Komponenty

PODRUČKY

Područky vozíku jsou odklopitelné směrem dozadu. Vytažením aretačního kolíku ve spodní části loketní opěrky lze celou postranici sklopit směrem dozadu. Toto odklopení usnadňuje přesedání na vozík z postele či židle. Po zpětném přiklopení postranice vždy zkontrolujte, zda je řádně zaaretována.

ZÁDOVÁ OPĚRKA

Zádová opěrka je celoplastová, je opatřena tlačným madlem v horní části a otvory, které umožňují protékání vody ale i prodyšnost. Zádovou opěrku lze opatřit (s doplatkem) přídatným polstrováním, které se připevňuje do

otvorů. Zádovou opěrku lze odejmout po odklopení područěk vytažením směrem nahoru.

SEDÁK A NÁDOBA

Sedačka je tvořena dvěma díly. Spodním dílem a vrchní tvarovanou deskou s otvorem. Tento otvor je dále překryt ozdobným, vyměkčeným krytem. Nádobu je zavěšena ve spodní části sedačky a je možno ji vyjmout zezadu. Po zvednutí horního dílu sedačky je možno nádobu vyjmout i směrem nahoru. Nádobu je opatřena víkem a uchem. Před použitím je nutno odstranit víko a ozdobný kryt sedáku.

STUPAČKY

Vozík je vybaven dvěma plastovými stupačkami. Obě stupačky jsou samostatně odklopitelné do strany a jejich nášlapné plochy jsou sklopitelné vzhůru. Chcete-li stupačku odklopit, nejprve sklopte nášlapnou plochu, poté mírně zvedněte celou stupačku a otočte ji směrem ven z vozíku až do polohy rovnoběžné s bočnicí.

Nášlapnou plochu stupačky lze i výškově upravit dle požadavků uživatele. Toto nastavení lze provést po demontáži dvou šroubů. Po nastavení šrouby opět pevně utáhněte.

POZOR: při nasedání na vozík, či vstávání z něj mějte vždy nášlapné plochy ve svislé poloze, či stupačky plně odklopené! Nikdy se nestavějte na stupačky, mohlo by dojít k jejich zlomení!

KOLEČKA

Vozík je vybaven čtyřmi malými plnými otočnými kolečky. Zadní kolečka jsou vybavena brzdami. Nasedáte-li na vozík, mějte jej vždy zabrzděný. Vozík zabrzďte tak, že sešlápnete vnější část červené plochy brzdy, odbrzdíte jej pak sešlápnutím vnitřní části nášlapné plochy brzdy.

Údržba vozíku

Vozík je vyroben z kvalitní umělé hmoty. Plastové povrchy odpuzují nečistoty, jsou odolné vůči oděru a jsou příjemné ve styku s pokožkou. Při čištění používejte obvyklé čisticí prostředky (saponáty) v návodem stanovené koncentraci. Na vozík lze použít i běžné dezinfekční prostředky.