

NÁVOD K POUŽITÍ

LIPOVAC 500

(výběr z originálu - česká verze)

Tyto přístroje vyrábí firma ALSA , Apparecchi Medicali, srl., Castel Maggiore, Italy. Firma odpovídá za bezpečnost, spolehlivost a výkonnost pouze tehdy, je-li umístění, zapojení, kalibraci, změny nebo opravy provádí personál oprávněný firmou Alsa a je-li přístroj umístěn v místnosti odpovídající příslušným bezpečnostním předpisům a dále je-li používán v souladu s těmito směrnicemi.

Pozor: Je třeba, aby přístroj při provozu stál na vodorovné podložce (podlaze).

Při transportu je z přístroje vypuštěn olej; pouze při transportu ve svislé poloze může olej zůstat v agregátu.

Při všech úkonech, které vyžadují sejmутí zadního krytu je třeba odpojit síťový kabel od sítě.

PŘEDBĚŽNÉ ÚKONY při prvním uvedení do provozu

1. Sejmout zadní kryt, odšroubovat plnicí /horní/ zátku na čerpadle, naplnit olejem do poloviny olejovzdušného nádrže.
2. Přesvědčit se, že síťové napětí odpovídá údajům na identifikačním štítku přístroje a že je napájecí zásuvka připojena na zemnicí vodič.

PROVOZ

Zapnutí přístroje: 1. Hlavním spínačem (zelený)
2. a) nepřetržitý provozní režim - žlutý spínač
b) diskretní provozní režim - spínání pneumatickým pedálem (druhá poloha žlutého spínače)

Nastavení úrovně podtlaku: provádí se černým otočným knoflíkem (+/-) podle údaje manometru v závislosti na režimu, v němž byl přístroj zapnut.

ÚDRŽBA A KONTROLA

1. Pravidelně kontrolovat hladinu oleje na olejovzdušném nádrži a po 800 provozních hodinách provést kompletní výměnu oleje tímto způsobem:
 - demontovat zadní kryt
 - demontovat obě zátky na nádrži (plnicí a vypouštěcí)
 - nádrž vyčistit propláchnutím cca 0,1 l motorové nafty - tuto po minutovém provozu vypustit
 - znovu naplnit nádrž originálním olejem na úroveň podle olejovzdušného nádrže

2. Udržujte systémy pro zamezení přeplnění sběrných nádrží v čistotě a pravidelně ověřujte jejich funkčnost.
3. Pro snadnou demontáž hadicových spojů udržujte v čistotě gumové těsnící kroužky, které můžete potřít silikonovou vazelínou.

ČIŠTĚNÍ A STERILIZACE

Skleněné nádoby, víčka, kanuly i s držáky a spoje jsou odolné proti korozi a mohou být sterilizovány a čištěny běžnými způsoby.

Průsvitné plastové hadice mohou být sterilizovány sterilizačními roztoky.

Po sterilizaci se doporučuje pro snadnou demontáž potřít rozebíratelné spoje silikonovou vazelínou.

STANDARTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 2 skleněné nádoby o obsahu 4 litry
- průhledné hadice 4 ks x 3 m
- hadicová koncovka 1 ks
- pneumatický pedál
- pedálový ovladač výstupního výkonu
- nádobka s olejem

Speciální příslušenství pouze na objednávku dle katalogu.

TECHNICKÁ DATA


- plechová skříňka na kolečkách s odnímatelným zadním krytem
- rotační aspirační pumpa s periodou výměny oleje po 500-800 hodinách
- hlavní vypínač s kontrolní žárovkou
- přepínač provozních režimů
- vstup pro pneumatický nožní spínač
- vstup pro pneumatický regulátor výstupního výkonu
- regulační prvek nastavení podtlaku a manometr v cm/Hg
- dvě lahve po 2 l
- pracovní podtlaková hadice s rychlo-uzávěrem

- maximální hodnota vakua 730.750 mm/Hg
- sací výkon 50 l /min.
- reakční doba 10 sek.
- provozní napětí 230V/50Hz jednofázové
- vstupní proud 1,8 Amp
- jištění - tavná pojistka T 3 Amp (5x20mm)
- bezpečnostní třída: I B v souladu s CEI 62-5-80
- elektrická ochrana: zemnění pomocí střední kolíku v zástrčce napájecího kabelu
- rozměry: 28 x 40 x 74 cm
- hmotnost: 25 kg

DIAMETRO MM.7

CL3-
diritta, 1. mm. 185
straight


CL4-
curva, 1. mm. 185
curved

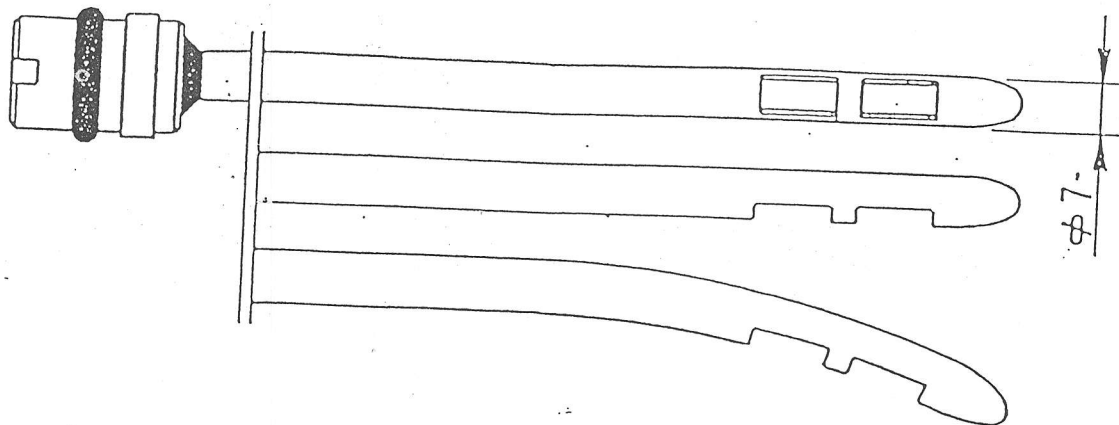

DIAMETRO MM.8

CL5-
diritta, 1. mm. 210
straight


CL6-
curva, 1. mm. 240
curved

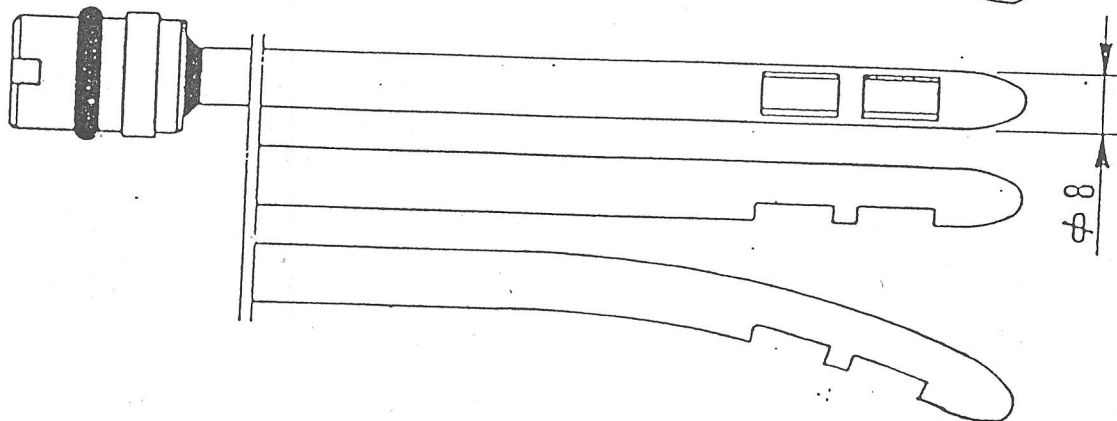

DIAMETRO MM.9

CL7-
diritta, 1. mm. 210
straight


CL8-
curva, 1. mm. 240
curved

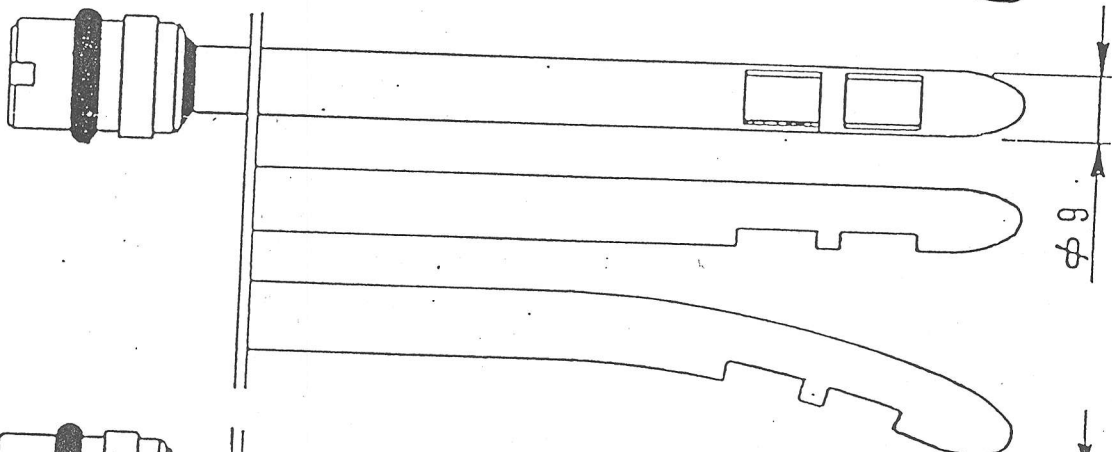

DIAMETRO MM.10


CL9-
diritta, 1. mm. 210
straight

CL10-
curva, 1. mm. 240
curved

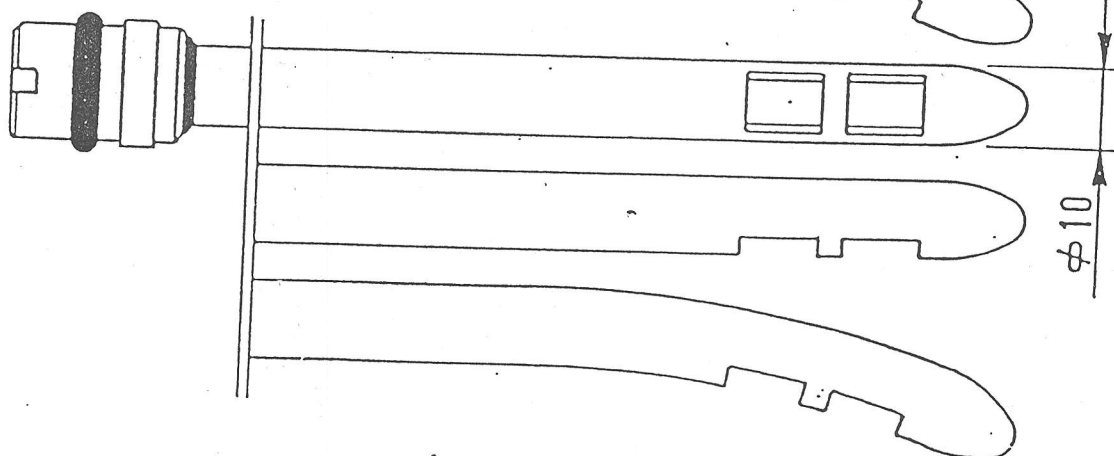


FORMA 1

FORM

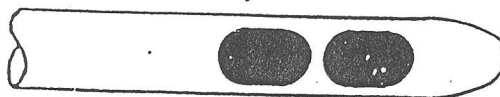

FORMA 2

FORM

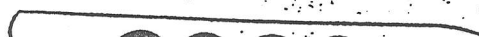

ALF1/PS

ALF1/PA

ALF2/PS


ALF2/PA

ALF3/PS

ALF3/PA

LPF1

LPF2

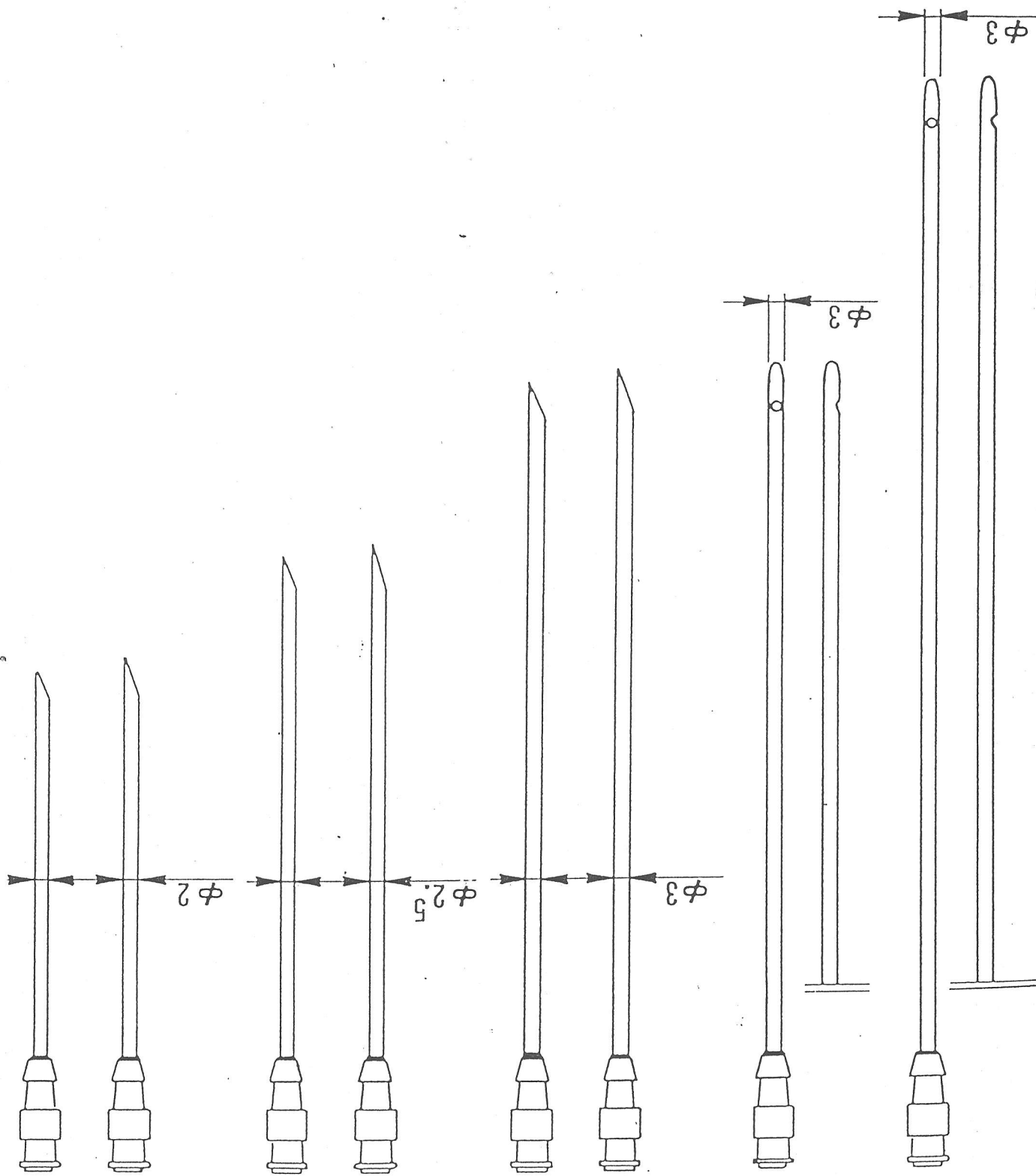

DIAMETRO MM.2


CANNULE

CANNULAE

CL21-

diritta, 1.mm.140
straight

CL22-curva, 1.mm.140
curved

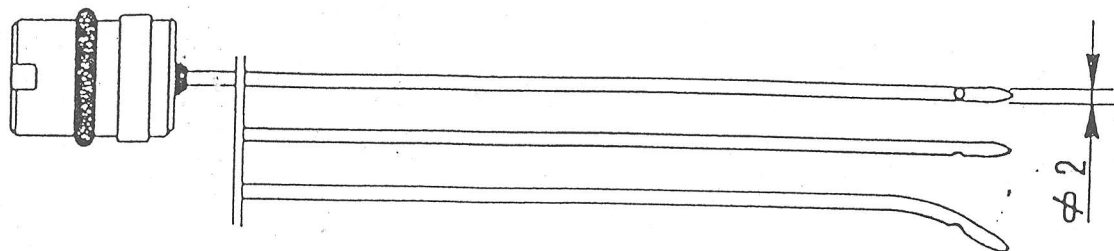


DIAMETRO MM.3

CL23-

diritta, 1.mm.160
straight

CL24-curva, 1.mm.160
curved

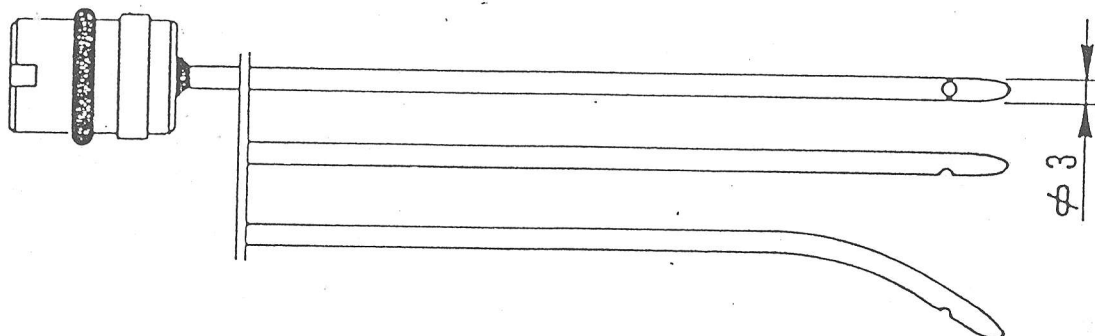


DIAMETRO MM.4

CL25-

diritta, 1.mm.180
straight

CL26-curva, 1.mm.180
curved

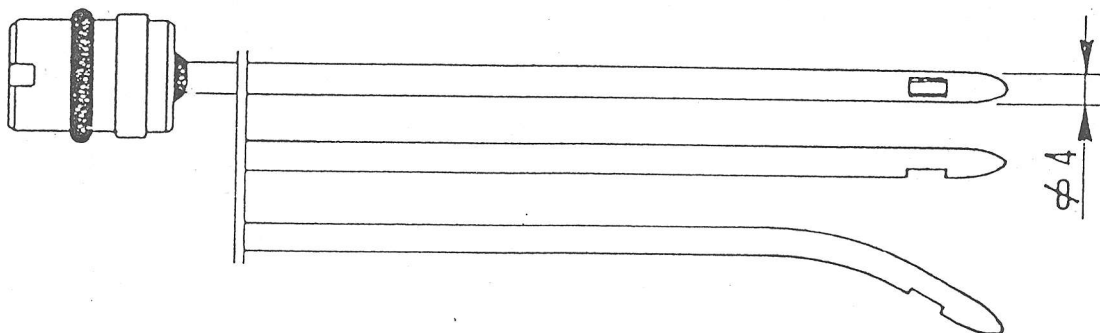


DIAMETRO MM.5

CL27-

diritta, 1.mm.180
straight

CL28-curva, 1.mm.180
curved

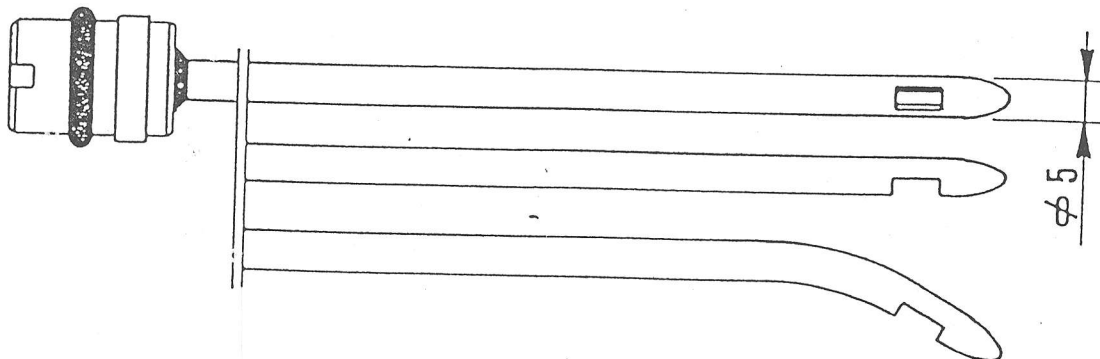

DIAMETRO MM.6

CL1-

diritta, 1.mm.185
straight

CL2-curva, 1.mm.185
curved

