

Návod na použití chirurgické odsávačky

KATASPIR

Úvodní informace:

- elektrická odsávačka KATASPIR 30 napájená ze sítě 230 V
- zvláště vhodná jako mobilní v nemocnicích, při tracheostomii, při menších chirurgických zákrocích a postoperační léčbě v domácnostech
- vhodná pro odsávání tělních tekutin
- přístroj je konstruovaný pro nepřetržitý i přerušovaný provoz

Tělo tohoto přístroje je vyrobeno z plastických materiálů se zvýšenou elektrickou a tepelnou izolací podle evropských standardů určených pro tyto přístroje.

Technické parametry:

Model	KATASPIR
Rozměry	350 x 180 x 200 mm
Hmotnost	4,5 kg
Napájení	230 V, 50 Hz
Maximální podtlak	-0,80 bar
Maximální průtok	30 litrů/min

Čištění a údržba

Při čištění příslušenství přístroje používejte rukavice na jedno použití při dodržení následujících pravidel:

1. Uchopte sběrnou láhev a odšroubujte víko
2. Odšroubujte plovákový systém od víčka láhve (červená kónická část přišroubovaná k víčku)
3. Po odšroubování držáku plováku vyjměte též vlastní plovák
4. Desinfikujte láhev včetně plovákového systému denaturovaným lihem nebo desinfekčními prostředky běžně používanými ve zdravotnictví

- Po ukončení čištění a desinfekce zkompletujte plovák a přišroubujte jej k víčku (před kompletací řádně vysušte vlastní plovák i vodící klec)

Periodická kontrola a údržba přístroje

Tento přístroj je navržen tak, aby vyžadoval minimální údržbu. Je však nezbytné provádět každodenní kontrolu před vlastním použitím.

- Připojte přívodní šňůru k elektrické zásuvce
- Přepněte hlavní vypínač na přístroji do polohy ON
- Přiložte prst na zdíčku pro odsávání na čelní straně přístroje
- Nastavte maximální tlak odsávání
- Zkontrolujte, zda-li tlak na manometru dosáhl hodnoty -0,80 bar
- Točte knoflíkem pro regulaci tlaku a kontrolujte, zda-li se mění odsávací tlak na manometru

Možné závady a jejich odstraňování:

Závada	Příčina závady	Odstranění
Špatné nebo vůbec žádné odsávání	Špatně přišroubované víčko láhve	Odšroubujte a znovu přišroubujte víčko láhve
Špatné nebo vůbec žádné odsávání	Špatně přišroubovaný plovákový systém na víčku láhve	Rozeberte a znovu složte držák plováku (dbejte na to, aby byl plovák přesně uprostřed držáku).
Špatné nebo vůbec žádné odsávání	Mokrý plovák po čištění láhve	Rozeberte plovákový systém a řádně vysušte plovák
Špatné nebo vůbec žádné odsávání	Prasklé hadičky	Kontrola hadiček a jejich připojení, výměna za nové
Nefunguje nožní spínání	Vypnutý nožní spínač	Na boku přístroje zapněte spínač do polohy ON

Instrukce pro používání přístroje

viz obrázek na str. 8 originálního návodu

- Propojte krátkou spojovací hadici (1) s filtrem k odsávací zdířce (2) na čelní stěně přístroje. Druhý konec kratší hadice musí být připojen k trubičce na víčku láhve s označením VACUUM (3).
- Připojte dlouhou hadici (4) k druhé trubičce na víčku láhve.
- Na druhém konci dlouhé hadice (4) je připojena sonda (5), na kterou je podle potřeby možno připojit další koncovky
- Připojte jeden konec přívodního kabelu ke zdířce na zadní straně přístroje a druhý konec k síťovému napětí, které musí souhlasit s napětím uvedeným v tomto návodu
- Přepněte spínač (6) do polohy ON

Záruka:

Na výše popsaný přístroj se poskytuje záruka 1 rok od data prodeje na závady vzniklé výrobní vadou. Záruka se neuznává v případě nešetrného zacházení s přístrojem, na závady zaviněné nedodržením výše uvedených postupů ovládání přístroje a v případech např. živelných událostí nebo neštěstí.

Model: KATASPIR

Výrobce: MEDEL, Italy

Výrobní číslo: 99-1655

Datum prodeje: 7.12.2000

Prodejní organizace:


CHIRONAX s.r.o. Brno
 Mlýnská 44
658 32 Brno

Zákazník: