

Návod na přenosnou akumulátorovou odsávačku

OB MINIVAC

*Provozní akumul. 5 let
sems. prohl. a'2r*

Elektrické parametry:

- akumulátor 12V, hermetický, kapacita 1,2 Ah
- možnost připojení na externí zdroj 12 V - 15 V
- v případě vybití akumulátoru lze přímo napájet v 12V zdroje

Technické parametry:

- vnitřní agregát s jedním pístem s max. podtlakem 750 mbar, odsávací výkon 10 litrů/min
- velmi tichý chod
- ergonomické provedení, hmotnost 2,2 kg
- taška přes rameno, všechno příslušenství je uloženo v tašce
- adaptér 230 V, plně automatické nabíjení
- v příslušenství je i kabel na připojení na 12 V externí zdroj (např. palubní síť automobilu)

Obsluha přístroje:

Přístroj se uvede do chodu pomocí tlačítka **O/I**. Regulace podtlaku se provádí pomocí otočného knoflíku. Zvětšování požadovaného podtlaku se provádí otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček. Nastavený podtlak je zobrazován na manometru.

Význam jednotlivých kontrol:

LED zelená - plně nabitý akumulátor

LED žlutá - 50% nabitý stav akumulátoru

LED červená - vybitý akumulátor, je nutno okamžité nabití

Při nabíjení akumulátoru se rozsvítí oranžová LED, která stále svítí po dobu nabíjení.

Nabíjení z externího zdroje 230 V/50 Hz prostřednictvím akumulátoru:

Po zasunutí adaptéru do síťové zásuvky a připojení druhého konce k odsávačce se na adaptéru rozsvítí zelená kontrolka LED v případě, že je akumulátor odsávačky je zcela nabitý. Akumulátor je chráněn proti přepólování zkratu a přepětí

Doba nabíjení akumulátoru:

1. Při nabíjení z palubní sítě automobilu (12 V až 15 V) je doba nabití asi 8 až 12 hodin
2. Při nabíjení ze síťového adaptéru je doba nabití 9 až 15 hodin

Pozn1: Akumulátor lze neustále dobíjet, lze tím dosáhnout vždy plně nabitého stavu.

Pozn2: Akumulátor odsávačky lze dobíjet pouze v případě, že je v palubní síti automobilu napětí větší než 10 V.

Upozornění:

Odsávačku nelze používat v okolí otevřeného ohně, dále ve výbušném prostředí, v prostředí s únikem plynů či jiném nebezpečném prostředí.

Možné závady a jejich odstraňování:

Závada	Příčina závady	Odstanění
Velká hlučnost a špatné odsávání	Poškozený agregát nebo vnitřní okruh nasávání	Kontaktovat servisní firmu
Připojený externí zdroj, kontrolka svítí, ale přístroj neodsává	Poškozený agregát	Kontaktovat servisní firmu
Přístroj nefunguje, ale je připojen na externí zdroj	Přepálená pojistka nebo poškozený akumulátor	Výměna pojistky 5 A se zpožděním nebo kontaktovat servisní firmu
Přístroj neodsává	Sběrná láhev není připojena k hadičkám, prasklé hadičky, plná láhev nebo poškozený plovák	Kontrola hadiček a jejich připojení, vyprázdnění lahve, kontrola, zda-li je láhev ve vertikální poloze, kontrola plováku, výměna antibakteriálního filtru, kontrola utěsnění lahve
Nelze regulovat podtlak	možná překážka ve vnitřním hydraulického okruhu	Kontaktovat servisní firmu
Při připojení adaptéru k elektrické síti nedojde k rozsvícení oranžové LED	Napájecí kabel může být přerušen nebo je poškozena elektrická část	Kontrola přívodu el. proudu, výměna kabelu nebo kontakt na servisní firmu

Rozsvícení zelené kontrolky na adaptéru	Plně nabitý akumulátor nebo závada na nabíječe	V případě závady na nabíječe kontaktovat servisní firmu
---	--	---

Technická data:

Rozměry	165 x 198 x 68 mm (šířka x výška x hloubka)
Hmotnost	přibližně 2 200 gramů
Regulace podtlaku	0 až 750 mbar
Pohonná jednotka	pístový kompresor 12 V DC
Měřič podtlaku	manometrický, tolerance $\pm 10\%$
Odběr proudu při sání naprázdno	0,9 A
Odběr proudu při maxim. sání	1,5 A
Sběrná láhev	500 ml
Autonomní provoz	cca 60 minut
Akumulátor	12V, olověný, kapacita 1,2 Ah
Indikátory stavu akumulátoru	3 x LED dioda v různých barvách s indikací stavu v toleranci $\pm 5\%$
Indikátor nabíjení 12 V	LED kontrolka v oranžové barvě
proudová ochrana	pojistka 5 A se zpožděním
Napájecí kabel	hnědá - kladný, modrá - záporný
Provozní teplota	-10° C až +60°C

Záruka:

Na výše popsany přístroj se poskytuje záruka 1 rok od data prodeje na závady vzniklé výrobní vadou. Záruka se neuznává v případě nešetrného zacházení s přístrojem, na závady zaviněné nedodržením výše uvedených postupů ovládání přístroje a v případech např. živelných událostí nebo neštěstí.

Model:**OB MINIVAC****Výrobce:****Oscar Boscarol SRL****Via Bivio, 19 - I 391 00 Bolzano, Italy****Výrobní číslo:****Datum prodeje:****10. 7. pros. 1999****Prodejní organizace:**

FAZZINI CZECH REPUBLIC s.r.o.
zdravotnická technika
Opuštěná 4, 602 00 Brno
Tel.: 05/ 43163220
IČO: 634 96 259

