

Odsávací pumpa chirurgická SM 124

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ:

- 1) Před připojením přístroje k síti se přesvědčte, zda napětí v síti souhlasí s napětím uvedeným na přístroji. Zapojte přístroj do sítě.
- 2) Připevněte kratší hadičku na vstup přístroje označený "Aspirazione".
- 3) Druhý konec připojte k víčku na vstup „Vacuum“
- 4) Delší hadičku napojte k druhému vstupu na víčku láhve označeném „Pacient“
- 5) Stlačením vypínače uveďte přístroj do činnosti.
- 6) Pomocí otočného knoflíku můžete regulovat intenzitu odsávání

Na tento výrobek se poskytuje záruka po dobu 1 roku od data prodeje. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé výrobní vadou, nevztahuje se na závady zaviněné špatnou obsluhou nebo údržbou.

Datum prodeje:

Prodejní organizace