

3. TECHNICKÁ DATA

Napájecí tlak : 3 + 5 bar
Zvlhčení kyslíku : 95 + 97% r. v.
Průtok kyslíku : 0 + 15 l/min

4. ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCE A STERILIZACE

Následující postupy lze aplikovat na celý přístroj kromě průtokoměru.

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky!

K čištění polykarbonátových částí se nesmí používat rozpouštědla, desinfekční a abrazivní čisticí prostředky. Použití těchto chemikálií může způsobit nevratné poškození plastových komponentů. Polykarbonátové části neponořujte do desinfekčních prostředků a na jejich čištění nepoužívejte žádné hořlavé látky.

Před umístěním do autoklávu láhev pečlivě vysušte a odstraňte všechny zbytky vody:

- láhev umísťujte do autoklávu vždy dnem vzhůru
- vždy autoklávujte láhev a víčko odděleně
- nepokládejte těžké věci na láhev v autoklávu
- autoklávujte polykarbonát při teplotách nepřevyšujících 120 °C (max. 15 min.)

5. ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Záruční doba je 1 rok. Záruční a pozáruční servis zajišťuje firma Cheirón a.s. nebo smluvní organizace. Po uplynutí záruční lhůty doporučujeme preventivní prohlídky autorizovaným opravcem každých 5 měsíců.

6. LIKVIDACE ODPADU

Jednorázový spotřební materiál je nutno likvidovat dle platných hygienických předpisů.

7. VÝROBCE

CHEIRÓN a.s.

Sídlo: Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6

Provozovna: Blatenská 1073/27a, 326 00 Plzeň

Website: www.cheiron.cz

Tel.: 377 590 422 (obch. odd.)

Tel.: 377 590 455 (servis)

Fax: 377 590 435

E-mail: obchod@cheiron.cz

Cheirón®

... dýcháme za Vás.

Návod k použití

RotaOX a UniOX

Kyslíkové zvlhčovače

CHEIRÓN a.s., Blatenská 1073/27a, 326 00 Plzeň

Tel.: 377 590 422 (obch. odd.), fax: 377 590 435

E-mail: obchod@cheiron.cz

CE 0120

1. POPIS

Kyslíkové zvlhčovače RotaOX a UniOX jsou specializovaná zařízení určená pro dávkování a účinné zvlhčování kyslíku během kyslíkové terapie. Požadované koncentrace kyslíku ve vdechované směsi plynů je dosaženo nastavením odpovídajícího průtoku kyslíku na průtokoměru.

Společnost CHEIRÓN a.s. použila v přístroji nový patentovaný konstrukční prvek, kterým je zajištěna podstatně vyšší hodnota relativní vlhkosti kyslíku než byla dosahována pomocí dosud používaných zvlhčovačů. Vdechovaná směs kyslíku se vzduchem má pokojovou teplotu, tudíž u pacienta není nutné tuto směs přehřívat. Pacienta lze připojit kyslíkovou maskou nebo nosními sondami.


Zvlhčovače RotaOX a UniOX jsou vyrobeny z nerozbitného polykarbonátu a chromované mosazi. Přístroje lze resterilizovat autoklávováním do 125 °C.

Mezi další významné přednosti lze zařadit : vysokou účinnost, spolehlivost, univerzálnost použití, velmi jednoduchou obsluhu a snadnou údržbu.

Kyslíkové zvlhčovače jsou vyráběny ve dvou modifikacích :


RotaOX

Kompaktní kyslíkový zvlhčovač s průtokoměrem – rotametrem. Celý přístroj je možno upevnit přímo do rychlospojky centrálního rozvodu kyslíku, popř. do rychlospojky redukčního ventilu na kyslíkové lahvi.

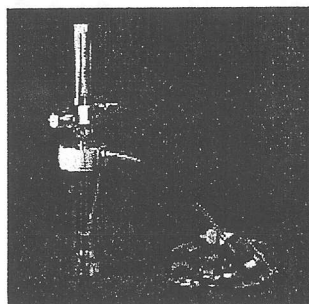

Sestava kompletního přístroje :

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| • Průtokoměr – rotametr 0 + 15 l | Obj. č.: 162-087-001 |
| • Zvlhčovač | Obj. č.: 021-087-004 |

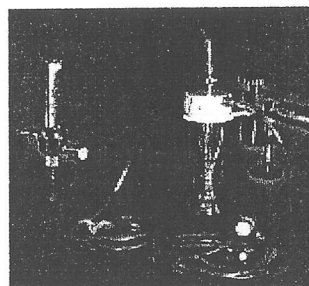

UniOX

Kyslíkový zvlhčovač upevnitelný na lůžko nebo přístrojovou lištu u lůžka pomocí speciálního držáku. Ke zdroji kyslíku je připojen samotný průtokoměr – rotametr, který je ke zvlhčovači připojen hadičkou se šroubením.

Sestava kompletního přístroje :

- | | |
|--|---|
| • Průtokoměr – rotametr 0 + 15 l | Obj. č.: 162-087-001 |
| • Zvlhčovač <i>O₂ (na O₂ kysle) by Cheiron</i> | Obj. č.: 021-087-004 |
| • Propojovací hadice se šroubením | Obj. č.: 021-888-007 <i>hadice</i> |
| • Univerzální držák | Obj. č.: 021-888-005 <i>propojení přístroje automaticky</i> |

Příslušenství :

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| • Kyslíková maska pro dospělé | Obj. č.: 213-008-003 |
| • Kyslíková maska pro děti | Obj. č.: 213-008-004 |
| • Nosní sondy pro dospělé | Obj. č.: 213-083-001 |

2. UVEDENÍ DO PROVOZU

Do nádoby zvlhčovače nalijeme destilovanou vodu tak, aby hladina vody byla mezi značkami MIN. a MAX. Na naplněnou láhev našroubujeme víčko zvlhčovače a vložíme do kyslíkové rychlospojky (RotaOX) resp. Do držáku (UniOX). Na výstup ze zvlhčovače připojíme kyslíkovou masku nebo nosní sondy.

Po připojení pacienta nastavíme na průtokoměru – rotametru požadovaný průtok kyslíku v litrech za minutu.

☐ Upozornění :

Po každém použití musí být zvlhčovač vyčištěn, vydezinfikován, popř. sterilizován. Kyslíková maska a nasální kanyly musí být vyměněny za nové. Plnit se výhradně destilovanou vodou. Možné je přidat i alkohol např. při plicním otoku.