

## Návod na použití – vizitové vozíky

Vozíky jsou určeny k uložení dokumentace a drobných pomůcek potřebných k výkonu práce na pracovišti.

Vozíky jsou vybaveny zámkem na roletě a v případě, že roleta při zavření nekryje zásuvku, je tato zásuvka též vybavena zámkem. Zámky na vozíku jsou sjednoceny pro používání jednoho typu klíče.

Roleta slouží k uzamykání dokumentů. Vertikální roleta musí být během pohybu vozíku uzavřena, aby nedošlo k samovolnému zavření ořesy a zabránilo se tak případnému úrazu.

Sklopná deska vozíku poskytuje dostatek prostoru pro odkládání dokumentace i ošetrovatelských pomůcek a provádění poznámek do dokumentace. Sklopná deska není určena pro opírání, sezení či zatěžování těžkými předměty. Za sklopnou desku se nesmí při manipulaci s vozíkem brát. V případě porušení těchto pravidel může dojít k poškození upevnění sklopné desky, případně k překlopení vozíku!

Pro manipulaci s vozíkem nám slouží velké boční madlo. Pouze za toto tlačné madlo je možné brát při manipulaci s vozíkem!

Manipulace zásuvek je povolena jen za úchytky/madla umístěných na jednotlivých zásuvkách. Zavírání zásuvek pomocí nohou či tlakem na korpus zásuvky mimo madla/úchytky není dovoleno. V případě takovéto manipulace může dojít k poškození výsuvů. **Nikdy nevysouvejte najednou všechny zásuvky, mohlo by dojít k převážení vozíku!**

V případě požadavku na zabezpečení vozíku proti pohybu jsou dvě kolečka vybavena brzdou. Aby bylo zabrzdění funkční, musí být vždy zabrzděny obě kolečka s brzdou. Brzda i uvolnění brzdy se provádí nožně.

Vozíky otíráme navlhčeným hadrem. Pro čištění je možno použít běžné desinfekční prostředky. Vozíky nejsou určeny pro čištění oplachem.

Na vozících není dovoleno sedět, jezdit či je samostatně posílat po pracovišti.

Nosnost :

malá zásuvka - max 2 kg

velká spodní zásuvka - max 10 kg

celková nosnost vozíku je - max 25 kg