

KYSLÍKOVÝ ZVLHČOVAČ

KopaktOX / UniOX

30 39 70
NAVIC

Návod na použití

POPIS A URČENÍ :

Kyslíkové zvlhčovače KompaktOX a UniOX jsou specializovaná zařízení určená pro dávkování a účinné zvlhčování kyslíku během kyslíkové terapie. Požadované koncentrace kyslíku ve vdechované směsi plynů je dosaženo nastavením odpovídajícího průtoku kyslíku na průtokoměru.

- Vdechovaná směs kyslíku se vzduchem má pokojovou teplotu. Pacienta lze připojit kyslíkovou maskou nebo kyslíkovými brýlemi.
- Mezi významné přednosti těchto zvlhčovačů lze zařadit: vysokou účinnost, spolehlivost, univerzálnost použití, velmi jednoduchou obsluhu a snadnou údržbu.

NÁVOD NA POUŽITÍ

Do nádoby zvlhčovače nalijeme destilovanou vodu tak, aby hladina vody byla mezi značkami MIN a MAX. U typu KompaktOX I. / II. našroubujeme na naplněnou láhev víčko zvlhčovače s průtokoměrem a vložíme do kyslíkové rychlospojky. U typu UniOX I. / II. našroubujeme na naplněnou láhev víčko zvlhčovače a zvlhčovač vložíme do držáku. Poté ho spojíme s průtokoměrem pomocí propojovací hadičky se šroubením a průtokoměr vložíme do kyslíkové rychlospojky. Na výstup ze zvlhčovače připojíme kyslíkovou masku nebo kyslíkové brýle. Na průtokoměru nastavíme požadovaný průtok kyslíku v litrech za minutu a připojíme pacienta.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kyslíkové zvlhčovače jsou dodávány ve dvou základních modifikacích:

KompaktOX

Kompaktní kyslíkový zvlhčovač s průtokoměrem. Celý přístroj je možno upevnit přímo do rychlospojky centrálního rozvodu kyslíku, popř. do rychlospojky redukčního ventilu na kyslíkové ahvi. KompaktOX je dodáván ve dvou variantách I. (obj.č. P 00237) a II. (obj.č. P 00238).

Seznam komponentů:

- | | |
|--|--|
| • Zvlhčovač trvanlivý / autoklávovatelný | Obj. č. P 00095 / P 00096 (KompaktOX I. / II.) |
| • Průtokoměr 0 - 15 l | Obj. č. P 00257 |

UniOX

Kyslíkový zvlhčovač upevnitelný na lůžko nebo přístrojovou lištu u lůžka pomocí speciálního držáku. Ke zdroji kyslíku je připojen samotný průtokoměr, který je spojen se zvlhčovačem hadičkou se šroubením. UniOX je dodáván ve dvou variantách I. (obj.č. P 00239) a II. (obj.č. P 00240).

Seznam komponentů:

- | | |
|--|--|
| • Zvlhčovač trvanlivý / autoklávovatelný | Obj. č. P 00095 / P 00096 (UniOX I. / II.) |
| • Průtokoměr 0 - 15 l | Obj. č. P 00257 |
| • Hadicový nástavec k průtokoměru | Obj. č. P 00259 |
| • Univerzální držák I / držák II | Obj. č. P 00803 / P 00804 (UniOX I. / II.) |
| • Propojovací hadička se šroubením | Obj. č. P 00260 |

6 ks (pro nosní brýle)

Príslušenství a náhradní díly: (pro obě modifikace)

- Kyslíková maska pro dospělé
 - Kyslíková maska pro děti
 - Kyslíkové bryle pro dospělé
 - Kyslíkové bryle pro děti
 - Kyslíkové bryle pro novorozence
 - Náhradní kamínky do zvlhčovače s hadičkou
- Obj. č. P 00107 nebo P 01068
Obj. č. P 00108
Obj. č. P 00103 nebo P 01067
Obj. č. P 00262
Obj. č. P 00264
Obj. č. P 00097

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Zvlhčovač trvanlivý lze dezinfikovat či resterilizovat studenou cestou, nebo do 65°C. Zvlhčovač autoklavovatelný lze autoklavovat do 120°C.

Kamínky zvlhčovače je vhodné vyměnit po každém pacientovi, kvůli udržení vysoké účinnosti zvlhčovače.

Skladujte v čistém a suchém prostředí.

ZÁRUČNÍ LHŮTA A SERVIS

Záruka se vztahuje na výrobní vady a vady materiálů, nevztahuje se na neodbornou manipulaci a používání v rozporu s návodem na jeho používání. Záruční lhůta na zvlhčovač je 6 měsíců ode dne prodeje (resp. ode dne zdanitelného plnění). Den zdanitelného plnění je uveden na dokladu (faktura, dodací list, prodejka).

Záruční a pozáruční servis zajišťuje firma:

POLYMED medicínská technika, s.r.o
P. Jilemnického 197, 503 01 Hradec Králové 16
tel.: 049 - 561 0206, fax: 049 - 561 1387
IČO: 25953958