


DVOUKOMOROVÝ PÍSKOVAČ

typ: D-89

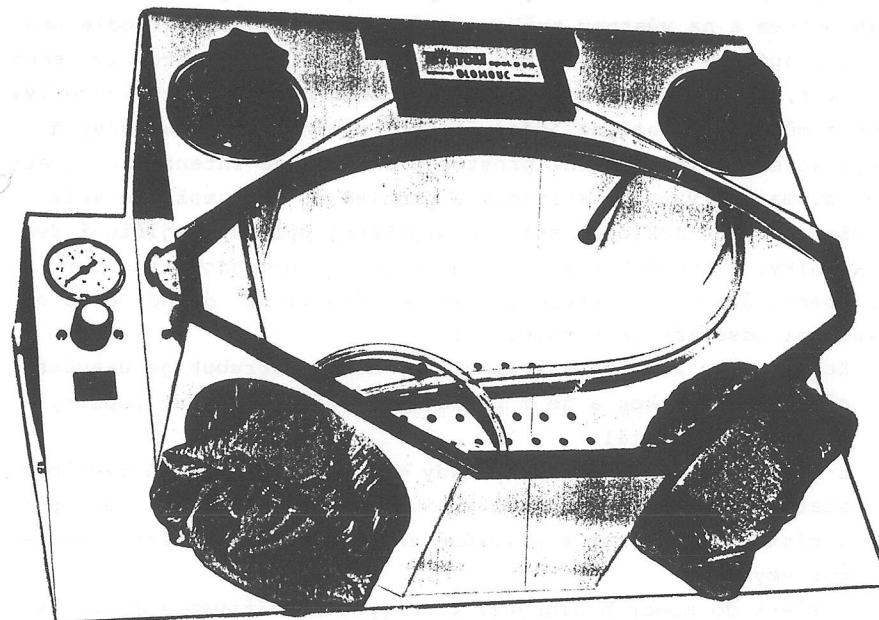

TRYSTOM

spol. s.r.o.

PŘÍSTROJOVÁ
A ZDRAVOTNICKÁ
TECHNIKA

tř. 17. listopadu 50, 772 00 OLOMOUC
Tel. / fax 068 / 5225262

CZECH REPUBLIC

Pískovač je určen pro používání ve stomatologických laboratořích a to zvláště k jemnému dočišťování a zdrsňování stykových kovových ploch pro aplikace kompozitních materiálů a keramiky. Umísťuje se na pracovní stůl, kde předpokládá práci vsedě.

Pískovač je opatřen dvěma komorami, které mohou být naplněny různými druhy a zrnitostmi pískovacího materiálu. Každá komora je opatřena elektromagnetickým ventilem, regulátorem tlaku, manometrem a na výstupu tužkovou pískovací koncovkou. Podle polohy přepínače je při sešlápnutí nožního spínače v provozu jedna z komor, ze které je rozvířený písek hnán do pískovací koncovky, která může být opatřena jednou ze tří výměnných tvrdokovových tryskacích hubic. Vnitřní prostor pískovače je intenzívně osvětlen dvěma zářivkovými svítidly a průhled do něj umožňuje velkoplošné tvrzené odklopné sklo. Manipulační přístup zajišťují dva rukávnický. Šikmé dno pískovače je opatřeno propadovými otvory do sběrné šachty, ze které má být odsáván vzduch do odlučovače. Napojení odsávače je variabilní:

- A/ Ze spodního zadního nátrubku, kdy horní nátrubek je uzavřen příslušnou zátkou a je z pískovače odsáván veškerý použitý pískovací materiál.
- B/ Z horního zadního nátrubku, kdy ve sběrné šachtě zůstává podstatná část pískovacího materiálu, který můžeme při naklopení z pískovače vysypat a případně znovu použít pro méně náročné potřeby.

Písek do komor doplňujeme při vypnutém síťovém spínači, kdy po odšroubování horní matice sundáme plexi víčko. Písek plníme asi 5 cm pod horní okraj komory. Koncovka pro přívod tlakového vzduchu umožňuje napojení prostřednictvím typizované rychlospojky $\varnothing$ 12 nebo navlečení a utažení tlakové hadice vnitřní $\varnothing$ 10 mm.

Poznámky:

1. Pískovač plníme suchým pískovacím materiálem a rovněž přívodní tlakový vzduch musí být dostatečně vysušen pomocí odlučovačů nebo nejlépe kondenzačního sušiče. Suchý vzduch je podmínkou pro bezporuchovou funkci přístroje.
2. Vadné zářivkové světlo vyměníme při vytažené přívodní elektrické šňůře ze zástrčky vyšroubováním z patice E 14.

3. Je vhodné při pískování pracovat v rukavicích.

Technická data

Elektrické napájení	220V, 50Hz, 30VA
Elektrická instalace ve třídě I s ochranou nulováním	
Přívod tlakového vzduchu	max. 0,8 MPa, 150 l/min
Připojení tlakového vzduchu - rychlospojka $\varnothing$ 12 nebo hadicí $\varnothing$ 10	
Objem každé komory	0,5 l
Průměr odsávacího nátrubku	$\varnothing$ 40 mm
Vnější rozměry přístroje: šířka	420
výška	230
hloubka	350 mm
Hmotnost přístroje bez náplně	8 kg
Použitá zářivková svítidla: OSRAM DULUX EL 7W-230V-E14	

Příslušenství: 1 ks nožní spínač

- 1 ks krytka odsávacího nátrubku
- 1 ks tvrdokovová tryskáč hubice $\varnothing$ 0,5 /jeden zápich/ pro zrnitost pískovacího materiálu 25-50 μ m
- 1 ks tvrdokovová tryskáč hubice $\varnothing$ 0,8 /dva zápichy/ pro zrnitost pískovacího materiálu 50-110 μ m
- 1 ks tvrdokovová tryskáč hubice $\varnothing$ 1,2 /tři zápichy/ pro zrnitost pískovacího materiálu 110-250 μ m

Výrobce zajišťující záruční
i pozáruční servis:

TRYSTOM PŘÍSTROJOVÁ
A ZDRAVOTNICKÁ
spol. s.r.o. TECHNIKA

tř. 17. listopadu 50, 772 00 OLOMOUC
Tel. / fax 068 / 5225262

Odbyt tel.: 068/5222031