

MANŽETA PRO PŘETLAKOVOU INFUZI látková

Návod k použití

POPIS

Manžeta pro přetlakovou infuzi sestává z následujících dílů :

a/ povlak manžety pro obsah 0,5 l, látkový

b/ vzdušnice manžety 0,5 l na přetlakovou infuzi s 2 hadičkami

c/ dmuchadlo s vypouštěcím ventilkem, manometr a klamp (pojišťovací záklopka)

URČENÍ

Tento zdravotnický prostředek je určen na podávání přetlakové infuze při použití pro jednoho pacienta. Smí jej používat pouze odborný a zaškolený pracovník poskytovatele zdravotní péče v daném medicínském oboru.

NÁVOD NA POUŽITÍ

Přetlakovou manžetu zavěsíme např. na infuzní stojan. Mezi manžetu a sítku, která tvoří s manžetou jeden celek, vložíme vak s daným infuzním roztokem. Zkontrolujte dotažení vypouštěcího ventilku, tj. otočení šroubu ventilku ve směru hodinových ručiček do krajní polohy.

Opakovaným stlačováním dmuchadla se nafukuje manžeta, která stlačuje vak s infuzní tekutinou na požadovaný tlak, který je indikován na manometru. Vypuštění manžety a snížení navozeného tlaku docílíme otočením vypouštěcího ventilku do polohy otevřeno proti směru hodinových ručiček.

Tlak v manžetě stabilizujeme klampem (pojišťovací záklopkou).

Aplikace tohoto zdrav. prostředku vyžaduje stálý dohled zdrav. personálu pro úpravu tlaku v manžetě v průběhu podávání přetlakové infuze.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Přetlakové manžety jsou dodávány pro objem infuzního 0,5 l.

Povlak manžety je látkový, vzdušnice a dmuchadlo z pryže, manometr kovový. Při poškození lze jednotlivé díly vyměnit. Manžetu lze vyprat. Na zadní straně povlaku je zip.

KONTROLA - UPOZORNĚNÍ

Periodicky je třeba kontrolovat, zda tlakový manometr je plně funkční. Tuto kontrolu je třeba provést zejména před každým použitím.

Manžetu nenafukujte na hodnotu tlaku přes 300 mmHg!

Hrubé a nešetrné zacházení s tímto prostředkem může ovlivnit přesnost měření.

ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ

Obj.č.	Název výrobku
P 00502	Přetlaková manžeta 0,5 l, látková - komplet
P 00503	Povlak manžety 0,5 l, látkový
P 00504	Vzdušnice manžety 0,5 l
P 00174	Dmuchačlo kompletní
P 00505	Manometr
P 00745	Klampa 6,8 mm

ZÁRUČNÍ LHŮTA A SERVIS

Záruka se vztahuje na výrobní vady a vady materiálů, nevztahuje se na neodbornou manipulaci a používání v rozporu s návodem na jeho používání. Záruční lhůta na kompletní manžetu je 6 měsíců ode dne prodeje (resp. ode dne zdanitelného plnění). Den zdanitelného plnění je uveden na dokladu (faktura, dodací list, prodejka).

Záruční a pozáruční servis zajišťuje firma:

POLYMED medicínská technika, s.r.o
servisní oddělení

P. Jilemnického 197, 503 01 Hradec Králové
Tel. + fax: 495 220 206, 495 211 387

