

Stolní (deformační) hodinkový tonometr **průměr 150 mm**

Obj.č. P 00509

Návod na použití

POPIS

Dvouhadicový stolní hodinkový tonometr patří mezi přesná měřidla krevního tlaku. Je vhodný pro použití v ordinaci. Na konci jedné hadice je nasazeno dmuchadlo, na konci druhé je nasazen manometr.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pacientovi ovíneme manžetu kolem obnažené levé paže tak, aby spodní okraj manžety byl umístěn 1+3 cm nad loketním ohybem a položíme pacientovi ruku volně dlaní nahoru, aby manžeta byla přibližně v úrovni srdce. Přiložíme fonendoskop na brachiální artérii pod manžetou. Přesvědčíme se zda je utažený šroub vypouštěcího ventilku a začneme stlačováním balónku zvyšovat tlak v manžetě až na tlak cca. o 40 mmHg vyšší, než je předpokládaný systolický tlak. Povolováním šroubu na vypouštěcím ventilku snižujeme tlak v manžetě a posloucháme úder srdce. Tlak při prvním slyšitelném úderu srdce se nazývá systolický (horní). Tlak při posledním slyšitelném úderu srdce se nazývá diastolický (dolní). Rychlost vypouštění manžety by měla být přibližně 3 mmHg za vteřinu.

Po měření vyfoukneme zbylý vzduch z manžety.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Pozor na přetlakování: Při samotném měření, nebo při jakémkoliv jiném zkoušení manometru je důležité věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby nedošlo k přetlakování přes 300 mmHg. Toto vede k nevratnému poškození, které nelze uznat jako záruku.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozsah měření tlaku: 0 ÷ 300 mmHg

Přesnost: ± 2 mmHg

DOPORUČENÍ

Doporučujeme uživateli předkládat tonometr jednou za dva roky k úřednímu ověření přesnosti.

ZÁRUČNÍ LHŮTA A SERVIS

Záruka se vztahuje na vady materiálu, vady vzniklé při výrobě a za podmínky, že výrobek je používán v souladu s návodem na jeho používání. Záruční lhůta na přístroj a příslušenství je 6 měsíců ode dne prodeje (resp. ode dne danitelného plnění). Den zdanitelného plnění je uveden na dokladu (faktura, dodací list, prodejka).

Záruční a pozáruční servis zajišťuje dovozce:

POLYMED medicínská technika, s.r.o
servisní oddělení

P. Jilemnického 197, 503 01 Hradec Králové 16
tel./fax: 495 220 206, 495 211 387

