


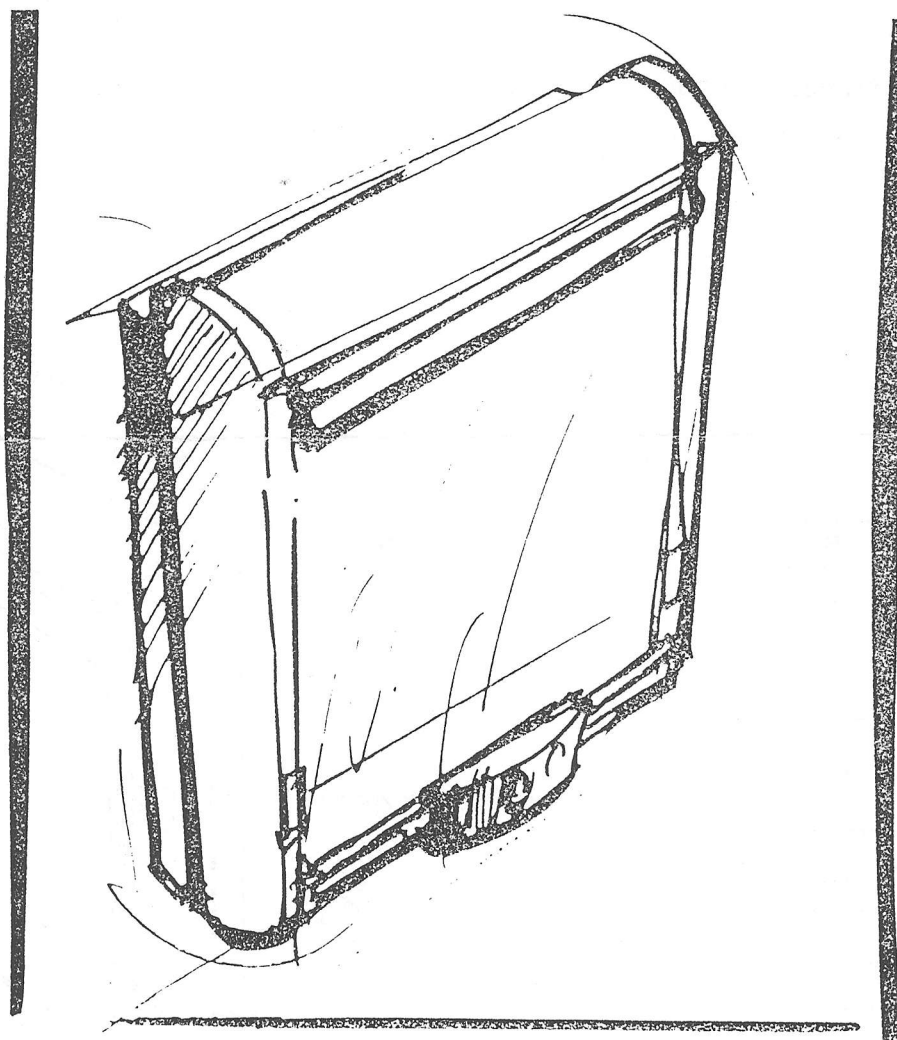

INSTALACE
A ÚDRŽBA
NEGATOSKOPŮ



QUAL'X



Tyto negatsokopy jsou vyráběny
ve shodě s EMC Directive 89/336 EEC




Návod k instalaci negatoskopů QUAL'X

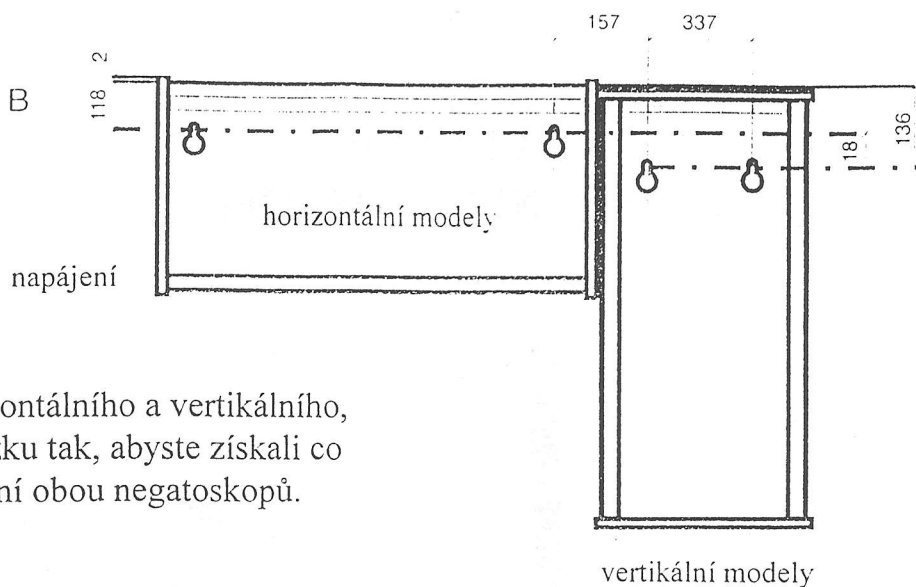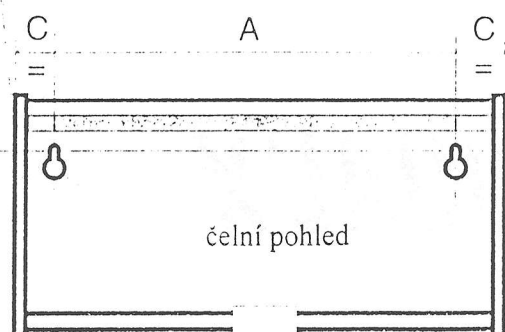


Při instalaci dvou negatoskopů, horizontálního a vertikálního, vedle sebe dodržte rozměry dle obrázku tak, abyste získali co možná nejlepší vzájemné přizpůsobení obou negatoskopů.

	A	B	C
NQ 2 NQ 2.2	612	118	71
NQ 3 NQ 3.3	964	118	71
NQ 4 NQ 4.2 NQ 4.4	1332	118	71
NQ 5 NQ 5.5	1692	118	71
NQV 2	337		
NQV 3	337		

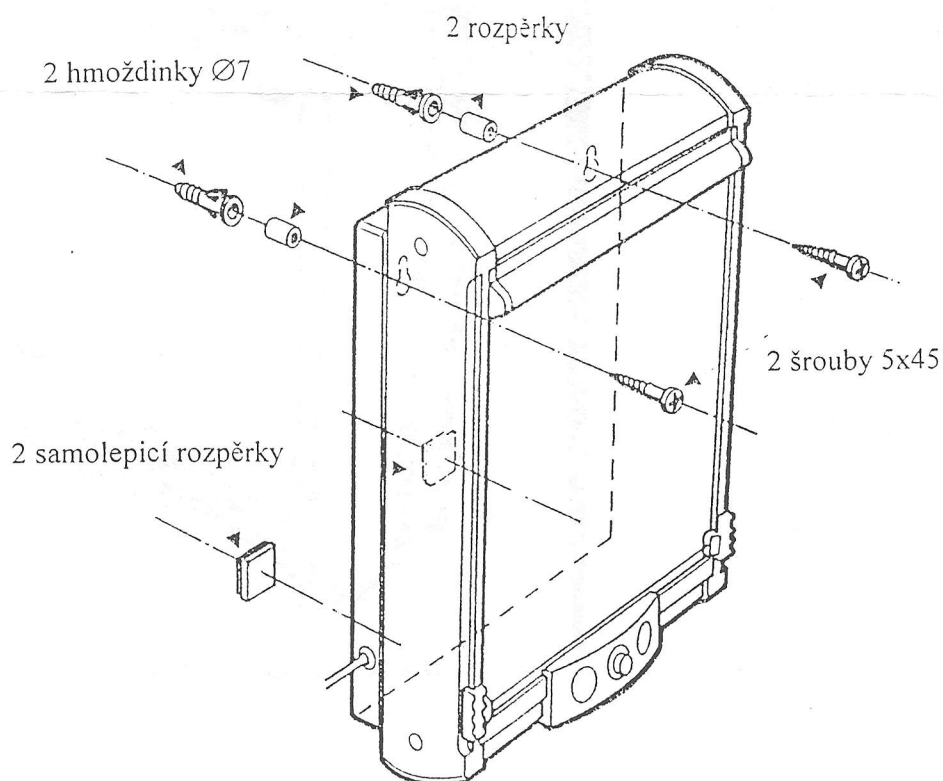


UPOZORNĚNÍ! Pro zajištění správné funkce by instalace výrobků této řady měla být prováděna přesně podle těchto instrukcí.


Návod k údržbě negatoskopů QUAL'X

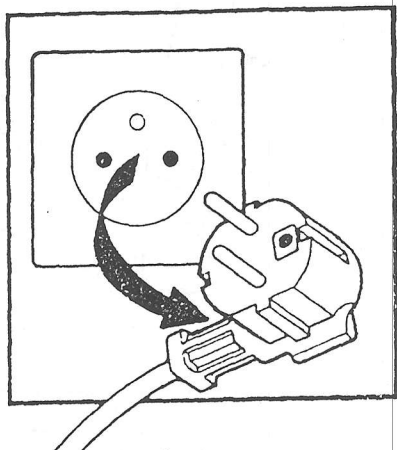


1 Vypněte zařízení ze sítě.

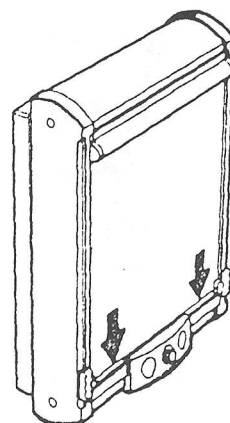


2 Odsuňte posuvnou svorku dolů.

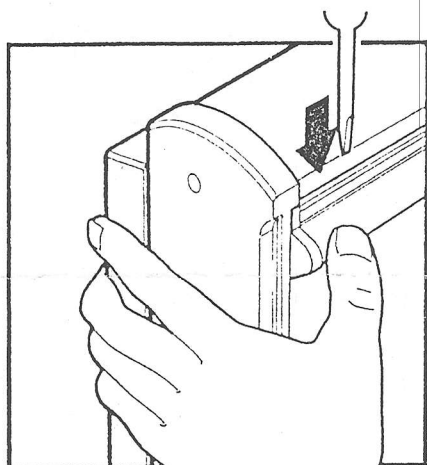


3 Jemně zatlačte na svorku pro film a vložte za ní konec malého plochého šroubováku.

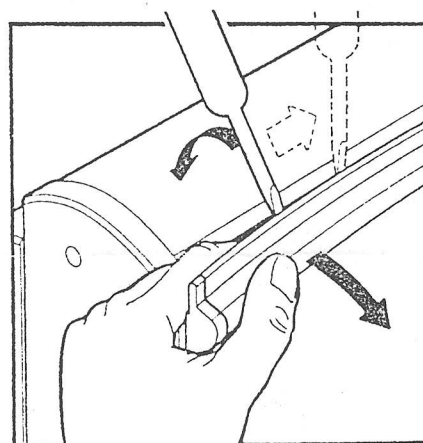


4 Uvolněte svorku pro film pomocí šroubováku, který vždy po několika centimetrech zasunete za svorku.

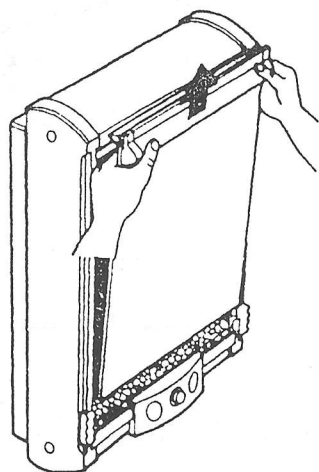

5 Průsvitnou desku spolu se svorkou uchopte a zdvihněte.



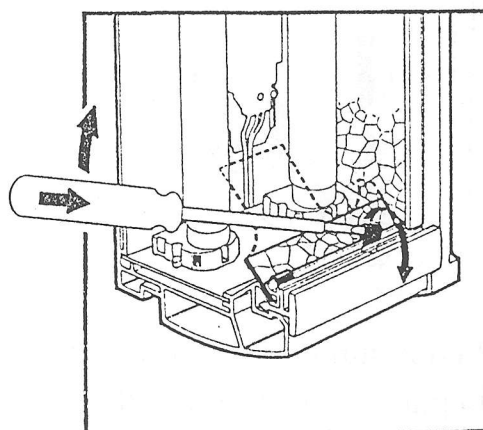


6 Pomocí malého šroubováku sejměte černé svorky z dolního reflektoru.

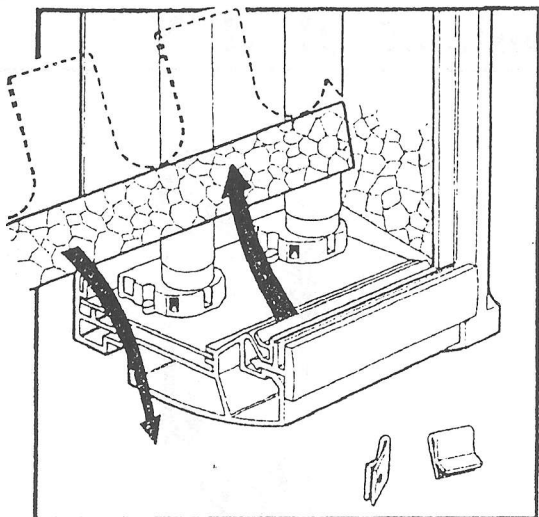


7 Zvedněte dolní reflektor směrem vzhůru.


8 Otočte lampou o 90° vlevo a vyjměte ji z držáku.

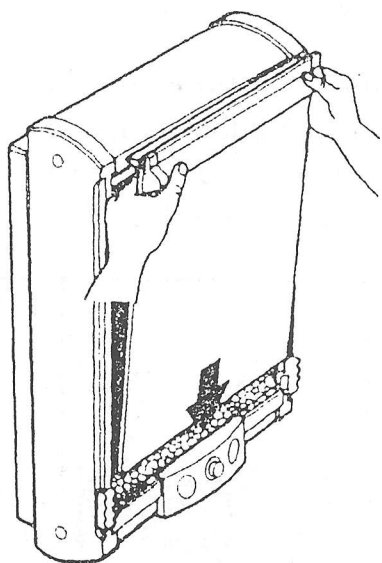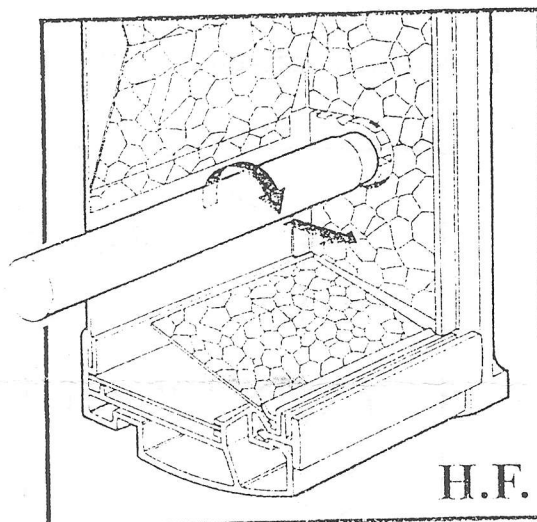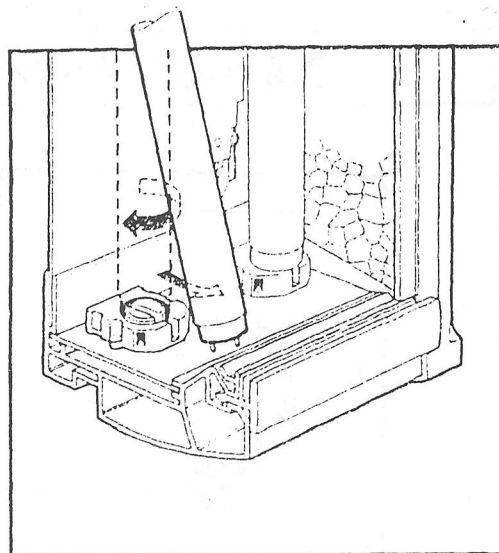


9 Před zasunutím reflektoru zpět do plastické štěrbině vložte zpět na své místo obě černé svorky. Nainstalujte zpět průsvitnou desku.

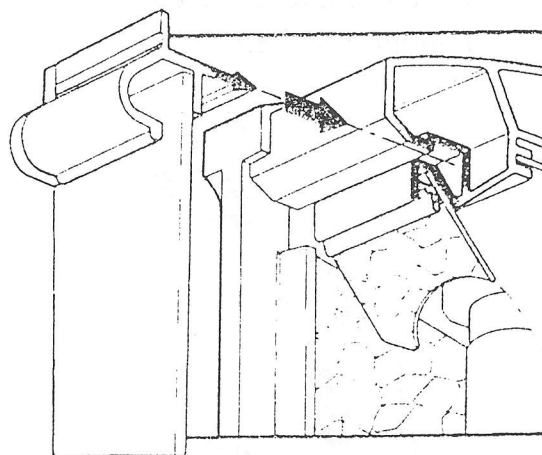


10 Zatlačte na okraj desky ve směru šípek tak, aby tento okraj zapadl do odpovídající štěrbině.

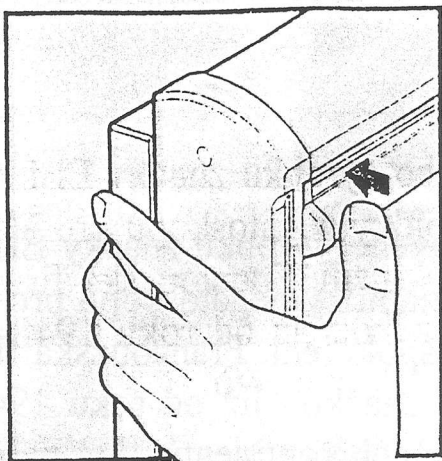


- 11 Zatlačte na svorku pro film nejprve po obou stranách.

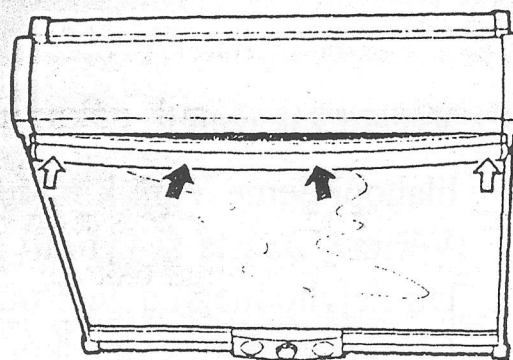

- 12 Poté zatlačte na prostřední část svorky.

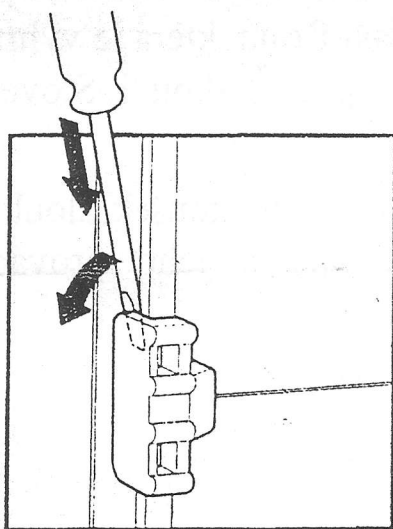

Posuvný drát odstraníte páčivým pohybem pomocí šroubováku zasunutého za unašeč.

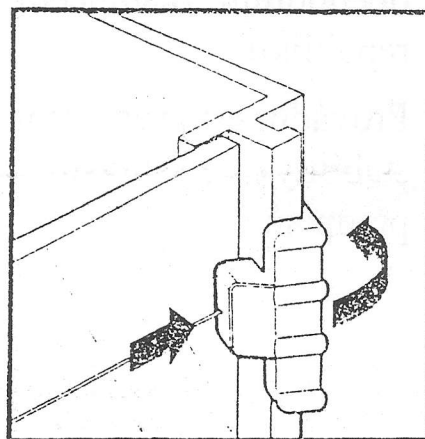

Zpět unašeč vrátíte tak, že nejprve umístíte jeho vnitřní část, a potom část vnější.

UPOZORNĚNÍ: Pro udržení konstatní úrovně jasů a jeho homogenity doporučujeme výměnu zářivek každé dva roky.
Barevná teplota světla 6 500 K (denní světlo).

ČIŠTĚNÍ: Čelní desku i celou skříň je možné čistit pomocí jemného hadru a antistatického spreje.

Vážení zákazníci,

blahopřejeme Vám k nákupu špičkového výrobku značky ELLA. Věříme, že jste si vybrali ze široké nabídky negatoskopů pro Vás ten nejvhodnější a že s ním budete spokojeni. Francouzská firma Legros vyrábí negatoskopy s touto značkou již od roku 1948 a vyváží je do mnoha zemí prakticky všech kontinentů.

Pokud budete potřebovat jakoukoliv informaci, radu nebo technickou pomoc, záruční i pozáruční servis, náhradní světelné zdroje, fotometr na měření jasu negatoskopů aj., obraťte se prosím na svého dodavatele nebo přímo na naši firmu, která je výhradním obchodním zástupcem firmy Legros pro Českou i Slovenskou republiku.

Provádíme i proměření negatoskopů v rámci zkoušek dlouhodobé stability ve smyslu atomového zákona a jeho prováděcích předpisů.



LABORATORNÍ A ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA
výroba, prodej, servis



OPTINGservis
Bohumínská 61

710 00 OSTRAVA 10

Tel.: 069/624 17 85

Tel. + fax: 069/624 18 52

Tel.: 069/624 19 60

Mobil: 0602-714 222