

NEGATOSKOP typ NEGA 1r

Návod na použití

obj. č. P 01056

POPIS A URČENÍ

Tento prostředek je určen pro popis a vyhodnocování RTG snímků na odborných pracovištích zdravotnických zařízení. Poskytuje možnost osazení maximálně 1 snímku standardně velkého formátu.

Fixace snímků na negatoskop je zajištěna vlastní hmotností sady válečků umístěných pod horní lištou observační plochy negatoskopu.

NÁVOD NA POUŽITÍ

Po přikotvení negatoskopu na stěnu pracoviště, které provedeme dle návodu (viz níže) zapojíme napájecí kabel do zásuvky rozvodu el. energie (230 V, 50 Hz). Otočením ovládacího spínače na boční straně negatoskopu ve směru hodinových ručiček rozsvítíme observační plochu (difuzor) negatoskopu. Tento spínač má současně funkci regulátoru jasu.

Osazení RTG snímků na observační plochu negatoskopu provedeme nasunutím snímků pod horní lištu negatoskopu při použití mírného tlaku na spodní okraj snímku tak, aby snímek byl válečky pod touto lištou přitlačen na opálové sklo (difuzor) negatoskopu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Celkové rozměry negatoskopu	: šířka 400 mm, výška 500 mm, hloubka 120 mm
Hmotnost	: 6 kg
Parametry zdroje el. energ.	: 230 V, 50 Hz
Zdroje světla	: 2 x zářivka Osram 15W/72-965 Biolux, dl. 438 mm (při náhradě nutno dodržet tuto kvalitu zářivek)

UPOZORNĚNÍ !

Poškozené a nefunkční zářivky jsou z hlediska zákona o odpadech nebezpečným odpadem, který podléhá příslušné evidenci a jeho likvidace musí být svěřena k likvidaci oprávněné organizaci či firmě, která má příslušné oprávnění k likvidaci tohoto nebezpečného odpadu (zák.č. 37/2000 Sb.).

MONTÁŽ NEGATOSKOPU

Montáž negatoskopu na stěnu pracoviště vyžaduje demontáž horní krycí lišty opálového skla negatoskopu. Při demontáži této lišty postupujeme po uvolnění kotvicích šroubků tak, že lištu odklopíme s přidržováním její spodní hrany na opálovém skle, abychom zajistily polohu volně uložených válečků pod touto lištou. Následně vysuneme sklo negatoskopu směrem nahoru. Uvnitř korpusu negatoskopu jsou umístěny 4 otvory pro vyznačení polohy kotevních šroubů, které jsou včetně hmoždinek k negatoskopu přiloženy. Po přikotvení korpusu negatoskopu na stěnu pracoviště se provede zpětná montáž skla a horní lišty negatoskopu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Při čištění negatoskopu odpojte negatoskop ze sítě. Opálový difuzor i korpus negatoskopu je možné čistit pomocí vlhkého hadříku. Opálový difuzor pak vyleštíte přípravkem určeným k čištění oken. Nepoužívejte abrasivní prostředky. Při čištění negatoskopu nerozdělávejte. O výměnu zářivek a vyčištění negatoskopu uvnitř požádejte vaši servisní organizaci.

ZÁRUČNÍ LHŮTA A SERVIS

Záruční lhůta na přístroj je 6 měsíců ode dne prodeje (resp. ode dne zdanitelného plnění) a platí za podmínky že výrobek je používán v souladu s návodem na jeho používání. Den zdanitelného plnění je uveden na dokladu (faktura, dodací list, prodejka).

Záruční a pozáruční servis zajišťuje výrobce:

POLYMED medicínská technika, s.r.o.
Petra Jilemnického 197, 503 01 Hradec Králové
tel./ fax.: 495 220 206, 495 211 387
IČO: 25953958

Schéma NEGA 1r

