

## Vak koupací s oporou hlavy Polyester 25015


Materiál: Polyesterová síťovina

Zakončení: Polyester

Nosnost: 250 kg

Velikost: JS, JM, S, M, L, XL

Praní: viz. etiketa

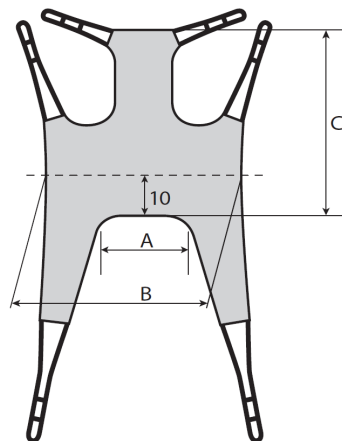

Velikost		Barva	A	B	C
JS	Junior Small - Dětský malý	Fialová	17	62	63
JM	Junior Medium - Dětský střední	Šedá	21	64	70
S	Small - Malý	Červená	25	77	78
M	Medium - Střední	Žlutá	30	87	87
L	Large - Velký	Zelená	35	94	96
XL	Extra large - Extra velký	Modrá	40	98	105

## Vak koupací s oporou hlavy Polyester 25015

 HUMAN CARE  
Lifts




 ERILENS®

Pacientský Vak koupací s oporou hlavy Polyester 25015 je převážně určený pro přesun osob na a z invalidního vozíku, tvarovaných sedaček a pod. Závěs nemá žádné držadla ani vyztužení. Díky tomu může být ponechán na křesle či vozíku pod přepravovanou osobou bez nebezpečí vzniku dekubitů.



Závěs je vyroben z polyesterové síťoviny, která snadno a rychle schne. Proto je závěs vhodný pro koupání či sprchování.

Vak je navržen pro dvoubodové i tříbodové zavěšení.

### Důležité!

 Zvedání a přeprava osob vždy přináší rizika. Pečlivě se seznamte s instrukcemi pro použití patientských závěsů a zvedacích zařízení před jejich použitím. Ujistěte se, že používáte zvedací zařízení vhodné pro daný účel. Jako ošetřovatel odpovídáte za bezpečnost osob, kterým poskytujete péči a musíte si být jisti jejich schopností zvládnout tuto manipulaci bez nebezpečí poškození zdraví. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte svého dodavatele.



## Zvedání z ležící pozice

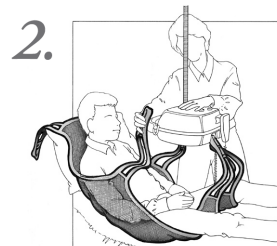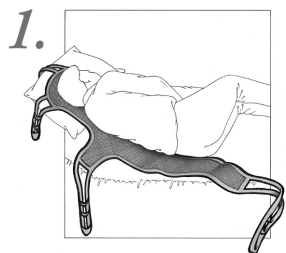

Otočte ležícího pacienta na bok. Závěs s jednou polovinou složenou umístěte těsně za záda pacienta. Závěs orientujte štítkem ven. Spodní okraj závěsu by měl být v úrovni kostrče. Překulte pacienta na druhý bok na rozloženou polovinu závěsu a urovnejte druhou polovinu závěsu. Pacienta otočte zpět na záda. Zkontrolujte a případně upravte správné umístění závěsu. Pokud je postel polohovací, ležící pozice je pro tuto manipulaci vhodnější.

Stehenní část závěsu protáhněte mezi stehny pacienta. Spusťte zvedací kazetu nad jeho břicho. Pokud je to vhodné, můžete provléknout levou stehenní část závěsu skrz poutko na pravé stehenní části závěsu. Po zavěšení bude mít pacient kolena blíže u sebe. Zavěste obě stehenní části závěsu na přední hák kazety. Zahákněte obě zádové části závěsu na háky nastavitelného ramene kazety. Při zvedání kontrolujte pohyb zvedací kazety, aby nedošlo k poranění hlavy pacienta.


*Alternativa: Závěs může být zavěšen i na dvou bodech. V tom případě neprovlékejte levou stehenní část závěsu poutkem na pravé stehenní části závěsu. Stehenní část zavěste křížem na háky nastavitelného ramene.*

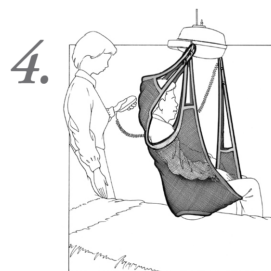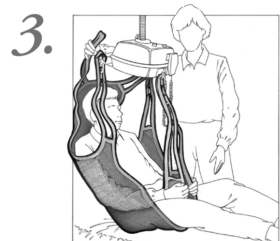

Zahákněte opěrku hlavy za háky nastavitelného ramene kazety. V této pozici zkontrolujte, zda jsou všechny popruhy závěsu přiměřeně napnuté, bezpečně zavěšené a zda nejsou zaháknuty za jakékoli jiné předměty.

Pokračujte ve zvedání. Přizvedněte pacientovy nohy při přesunu mimo lůžko, pokud je to potřeba. Během přepravy přidržujte pacienta okolo ramen pro jeho pocit bezpečí.


## Zvedání ze sedící pozice

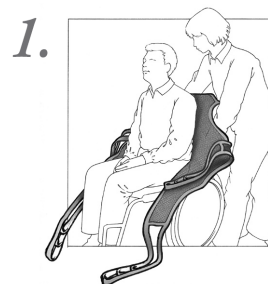

Mírně předkloněte pacienta a zasuňte závěs za záda pacienta. Závěs orientujte štítkem ven. Spodní okraj závěsu by měl být v úrovni kostrče. Stehenní část závěsu srovnajte podél nohou pacienta.

Stehenní část závěsu protáhněte mezi stehny pacienta. Spusťte zvedací kazetu nad jeho břicho. Pokud je to vhodné, můžete provléknout levou stehenní část závěsu skrz poutko na pravé stehenní části závěsu. Po zavěšení bude mít pacient kolena blíže u sebe. Zavěste obě stehenní části závěsu na přední hák kazety. Zahákněte obě zádové části závěsu na háky nastavitelného ramene kazety. Při zvedání kontrolujte pohyb zvedací kazety, aby nedošlo k poranění hlavy pacienta.

*Alternativa: Závěs může být zavěšen i na dvou bodech. V tom případě neprovlékejte levou stehenní část závěsu poutkem na pravé stehenní části závěsu. Stehenní část zavěste křížem na háky nastavitelného ramene.*

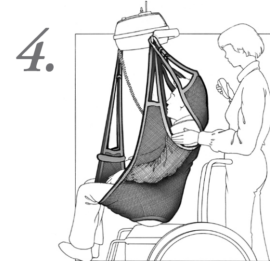

Zahákněte opěrku hlavy za háky nastavitelného ramene kazety. V této pozici zkontrolujte, zda jsou všechny popruhy závěsu přiměřeně napnuté, bezpečně zavěšené a zda nejsou zaháknuty za jakékoli jiné předměty.

Pokračujte ve zvedání. Během přepravy přidržujte pacienta okolo ramen pro jeho pocit bezpečí.