


## Vak přepravní 25030

Materiál: Polyester  
Zakončení: Polyester  
Nosnost: 250 kg  
Velikost: JS, JM, S, M, L, XL  
Praní: viz. etiketa

## Vak koupací 25035

Materiál: Polyesterová síťovina  
Zakončení: Polyester  
Nosnost: 250 kg  
Velikost: S, M, L, XL  
Praní: viz. etiketa

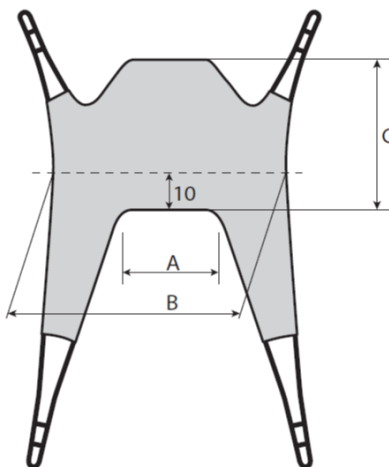

Velikost	Barva	A	B	C	
JS	Junior Small - Dětský malý	Fialová	9	54	52
JM	Junior Medium - Dětský střední	Šedá	15	60	58
S	Small - Malý	Červená	30	75	63
M	Medium - Střední	Žlutá	36	85	63
L	Large - Velký	Zelená	42	95	63
XL	Extra large - Extra velký	Modrá	47	102	63




<http://www.erilens.cz>

ERILENS s.r.o.  
Papírenská 114/5  
160 00 Praha 6

Tel: 234 123 362  
Fax: 234 123 360  
Email: [roomer@erilens.cz](mailto:roomer@erilens.cz)

## Vak přepravní 25030

## Vak koupací 25035

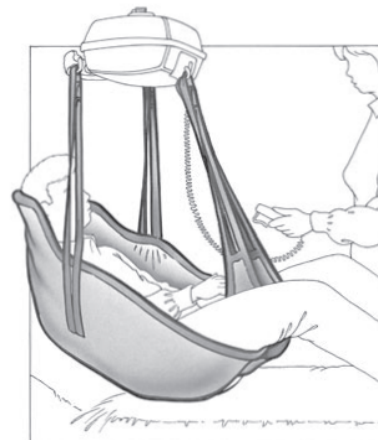

Pacientský Vak přepravní 25030 je převážně určený pro manipulaci s osobami z lůžka na invalidní vozík a obráceně. Závěs má zádovou část vyztuženou plastovými výztuhami, což umožňuje přepravu ve vzpřímené sedící poloze například na invalidní vozík. Závěs lze doplnit hrudním popruhem 25145/25146.


Pacientský Vak koupací 25035 je střihem podobný Vaku přepravnímu 25030. Je vyrobený z polyesterové síťoviny a tím se hodí převážně na koupání a sprchování. Zádová část závěsu je vyztužena plastovými výztuhami.

Závěsy jsou navrženy pro dvoubodové i tříbodové zavěšení.

### Důležité!

**⚠** Zvedání a přeprava osob vždy přináší rizika. Pečlivě se seznamte s instrukcemi pro použití patientských závěsů a zvedacích zařízení před jejich použitím. Ujistěte se, že používáte zvedací zařízení vhodné pro daný účel. Jako ošetřovatel odpovídáte za bezpečnost osob, kterým poskytujete péči a musíte si být jisti jejich schopností zvládnout tuto manipulaci bez nebezpečí poškození zdraví. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte svého dodavatele.

## Zvedání z ležící pozice

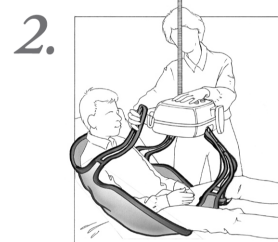


Pokud je postel polohovací, nastavte ji s pacientem do sedící pozice. Mírně předkloňte pacienta a zasuňte závěs za záda pacienta. Spodní okraj závěsu by měl být v úrovni kostrče.

*Alternativa: Otočte ležícího pacienta na bok. Závěs s jednou polovinou složenou umístěte těsně za záda pacienta. Spodní okraj závěsu by měl být v úrovni kostrče. Překulte pacienta na druhý bok na rozloženou polovinu závěsu a urovnejte druhou polovinu závěsu. Pacienta otočte zpět na záda. Zkontrolujte a případně upravte správné umístění závěsu.*

Stehenní část závěsu protáhněte mezi stehny pacienta. Spusťte zvedací kazetu nad jeho břicho. Pokud je to vhodné, můžete provléknout levou stehenní část závěsu skrz poutko na pravé stehenní části závěsu. Po zavěšení bude mít pacient kolena blíže u sebe. Zavěste obě stehenní části závěsu na přední hák kazety. Zahákněte obě zadové části závěsu na háky nastavitelného ramene kazety. Při zvedání kontrolujte pohyb zvedací kazety, aby nedošlo k poranění hlavy pacienta.


*Alternativa: Závěs může být zavěšen i na dvou bodech. V tom případě neprovlékejte levou stehenní část závěsu poutkem na pravé stehenní části závěsu. Stehenní část zavěste křížem na háky nastavitelného ramene.*

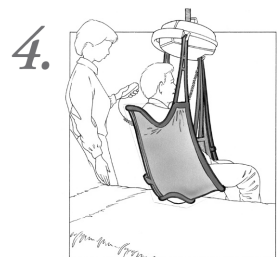


V této pozici zkontrolujte, zda jsou všechny popruhy závěsu přiměřeně napnuté, bezpečně zavěšené a zda nejsou zaháknuty za jakékoli jiné předměty.

Pokračujte ve zvedání. Přizvedněte pacientovy nohy při přesunu mimo lůžko, pokud je to potřeba. Během přepravy přidržujte pacienta okolo ramen pro jeho pocit bezpečí.

## Zvedání ze sedící pozice

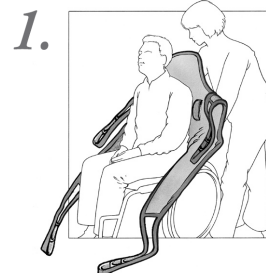

Mírně předkloňte pacienta a zasuňte závěs za záda pacienta. Závěs orientujte štítkem ven. Spodní okraj závěsu by měl být v úrovni kostrče. Stehenní část závěsu srovnajte podél nohou pacienta.

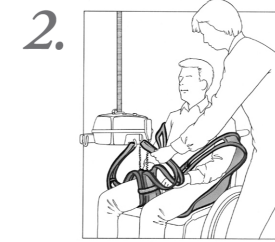


Stehenní část závěsu protáhněte mezi stehny pacienta. Spusťte zvedací kazetu nad jeho břicho. Pokud je to vhodné, můžete provléknout levou stehenní část závěsu skrz poutko na pravé stehenní části závěsu. Po zavěšení bude mít pacient kolena blíže u sebe. Zavěste obě stehenní části závěsu na přední hák kazety. Zahákněte obě zadové části závěsu na háky nastavitelného ramene kazety. Při zvedání kontrolujte pohyb zvedací kazety, aby nedošlo k poranění hlavy pacienta.

*Alternativa: Závěs může být zavěšen i na dvou bodech. V tom případě neprovlékejte levou stehenní část závěsu poutkem na pravé stehenní části závěsu. Stehenní část zavěste křížem na háky nastavitelného ramene.*



V této pozici zkontrolujte, zda jsou všechny popruhy závěsu přiměřeně napnuté, bezpečně zavěšené a zda nejsou zaháknuty za jakékoli jiné předměty.

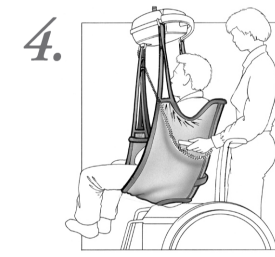

Pokračujte ve zvedání. Během přepravy přidržujte pacienta okolo ramen pro jeho pocit bezpečí.