


Vak toaletní Plus 25080

Materiál: Polyester
Zakončení: Polyester
Nosnost: 250 kg
Velikost: JS, JM, S, M, L, XL
Praní: viz. etiketa

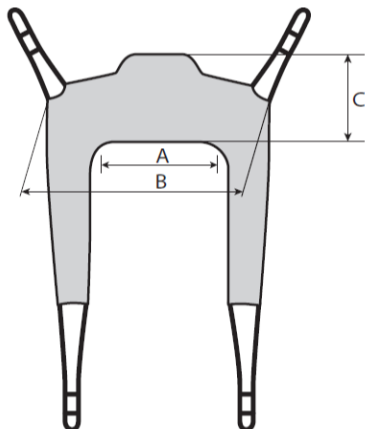


Vak toaletní Plus Polyester 25085

Materiál: Polyesterová síťovina
Zakončení: Polyester
Nosnost: 250 kg
Velikost: S, M, L, XL
Praní: viz. etiketa

Velikost	Barva	A	B	C	
JS	Junior Small - Dětský malý	Fialová	28	62	22
JM	Junior Medium - Dětský střední	Šedá	30	69	26
S	Small - Malý	Červená	35	75	30
M	Medium - Střední	Žlutá	50	87	33
L	Large - Velký	Zelená	55	94	33
XL	Extra large - Extra velký	Modrá	61	100	37

Vak toaletní Plus 25080 Vak toaletní Plus Polyester 25085

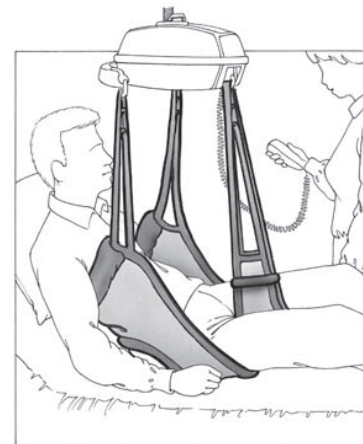


Pacientský Vak toaletní Plus 25080 a Vak toaletní Plus polyester 25085 jsou převážně určené pro použití toalety. Závěs má vyztuženou zádovou část a v oblasti podpaží je vybaven měkkou vycpávkou. Díky velkému vystřížení v oblasti hýždí jsou závěsy použitelné i pro usazování na úzký invalidní vozík nebo tvarované sedačky.

Vaky jsou navrženy pro dvoubodové i třibodové zavěšení.


Důležité!

Zvedání a přeprava osob vždy přináší rizika. Pečlivě se seznamte s instrukcemi pro použití patientských závěsů a zvedacích zařízení před jejich použitím. Ujistěte se, že používáte zvedací zařízení vhodné pro daný účel. Jako ošetřovatel odpovídáte za bezpečnost osob, kterým poskytujete péči a musíte si být jisti jejich schopností zvládnout tuto manipulaci bez nebezpečí poškození zdraví. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte svého dodavatele.

Zvedání z ležící pozice

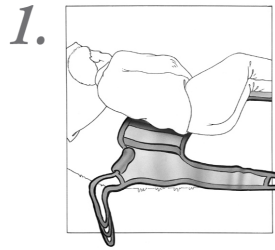


Otočte ležícího pacienta na bok. Závěs s jednou polovinou složenou umístěte těsně za záda pacienta. Závěs orientujte štítkem ven. Překulte pacienta na druhý bok na rozloženou polovinu závěsu a urovnejte druhou polovinu závěsu. Pacienta otočte zpět na záda. Zkontrolujte a případně upravte správné umístění závěsu. Pokud je postel polohovací, ležící pozice je pro tuto manipulaci vhodnější.

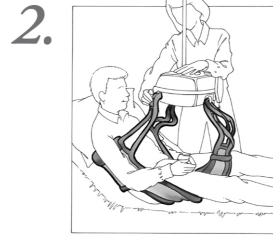


Stehenní část závěsu protáhněte mezi stehny pacienta. Pokud přesouváte pacienta na toaletu, rozepněte v této fázi jeho kalhoty. Spusťte zvedací kazetu nad jeho břicho. Pokud je to vhodné, můžete provléknout levou stehenní část závěsu skrz poutko na pravé stehenní části závěsu. Po zavěšení bude mít pacient kolena blíže u sebe. Zavěste obě stehenní části závěsu na přední hák kazety. Zahákněte obě zádové části závěsu na háky nastavitelného ramene kazety. Při zvedání kontrolujte pohyb zvedací kazety, aby nedošlo k poranění hlavy pacienta.

Alternativa: Závěs může být zavěšen i na dvou bodech. V tom případě neprovlékejte levou stehenní část závěsu poutkem na pravé stehenní části závěsu. Stehenní část zavěste křížem na háky nastavitelného ramene.

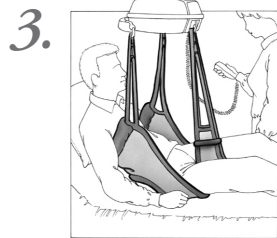

V této pozici zkontrolujte, zda jsou všechny popruhy závěsu přiměřeně napnuté, bezpečně zavěšené a zda nejsou zaháknuty za jakékoli jiné předměty.

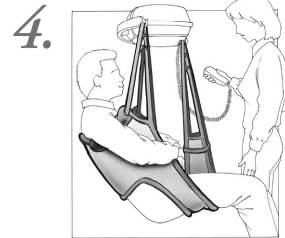


Pokračujte ve zvedání. Přizvedněte pacientovy nohy při přesunu mimo lůžko, pokud je to potřeba. Během přepravy přidržujte pacienta okolo ramen pro jeho pocit bezpečí. Před použitím toalety svlékněte pacientovi kalhoty co nejvíce je to možné. Následně ho usadte na toaletu. Kazetu spusťte na úroveň břicha a odhákněte spodní popruhy vaku (pokud pacient stabilně sedí, můžete vak odháknout celý). Zvedněte kazetu nad pacientovu hlavu. Pacient takto bude vakem podpírán a stabilizován.

Zvedání ze sedící pozice




Mírně předkloněte pacienta a zasuňte závěs za záda pacienta. Závěs orientujte štítkem ven. Stehenní část závěsu srovnajte podél nohou pacienta.

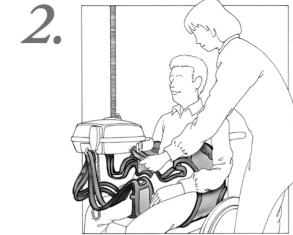

Stehenní část závěsu protáhněte mezi stehny pacienta. Spusťte zvedací kazetu nad jeho břicho. Pokud je to vhodné, můžete provléknout levou stehenní část závěsu skrz poutko na pravé stehenní části závěsu. Po zavěšení bude mít pacient kolena blíže u sebe. Zavěste obě stehenní části závěsu na přední hák kazety. Zahákněte obě zádové části závěsu na háky nastavitelného ramene kazety. Při zvedání kontrolujte pohyb zvedací kazety, aby nedošlo k poranění hlavy pacienta.

Alternativa: Závěs může být zavěšen i na dvou bodech. V tom případě neprovlékejte levou stehenní část závěsu poutkem na pravé stehenní části závěsu. Stehenní část zavěste křížem na háky nastavitelného ramene.

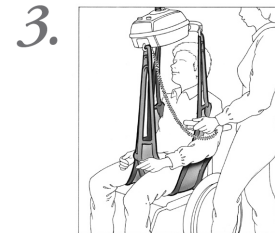

V této pozici zkontrolujte, zda jsou všechny popruhy závěsu přiměřeně napnuté, bezpečně zavěšené a zda nejsou zaháknuty za jakékoli jiné předměty.



Pokračujte ve zvedání. Během přepravy přidržujte pacienta okolo ramen pro jeho pocit bezpečí. Pokud pacienta usazujete na toaletu, řiďte se instrukcemi u obr. 4 „Zvedání z ležící pozice“.