

RESI[®]

**UNIVERZÁLNÍ NÁVOD
K OBSLUZE LEHÁTEK
ŘADY JORDAN**



UNIVERZÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE LEHÁTEK ŘADY JORDAN

Tento návod k obsluze se vztahuje na lehátka firmy
RESI Třeboň spol. s r.o.

- Stoly JORDAN jsou určeny pro využití ve zdravotnických zařízeních k rehabilitaci a fyzioterapii.
- Uvedení do provozu, vybalení, sestavení a připojení na síť zajišťuje pověřená a zaškolená osoba.
- Je zakázáno přenášet stůl za pohyblivé části nebo přídavná zařízení.
- Pojezdová kolečka jsou určena pro přemísťování nezatíženého stolu po rovné ploše. Toto se netýká lehátka s označením HOSPITAL.
- Výrobce doporučuje kontrolovat uložení šroubů pohybových částí a správnou funkci aretačních mechanismů, stav el. příslušenství a zvláště mechanické poškození el. kabelů a přetížení podhlavníku.
- V případě zjištění závady nebo špatné funkce ihned odstavte stůl mimo provoz a volejte servis.
- Výrobce doporučuje provádění roční prohlídky výrobcem nebo jím zmocněné firmy či osoby.
- Uživatel je povinen u výrobků s elektrickým zařízením provádět pravidelné revize dle platných předpisů.

Technické parametry:


hmotnost lehátek dle typu	70 – 150 kg
zátěž lehátka dle ČSN (EN) 60601-2-38	170 kg
krytí dle	IP 55
napájení elektromotoru	230V/50-60Hz
celkový příkon	740 W
maximální proud	3,2 A
provozní hlučnost	max. 45dB (A)

Instalace lehátka:

- 1. Sejmeme obalový materiál.
- 2. Podhlavník dáme do vodorovné polohy přidržením ovládací páčky.




- 3. Elektrický kabel od motoru zasuneme do odpovídající zásuvky. Nasuneme vzduchovou hadičku na motor.

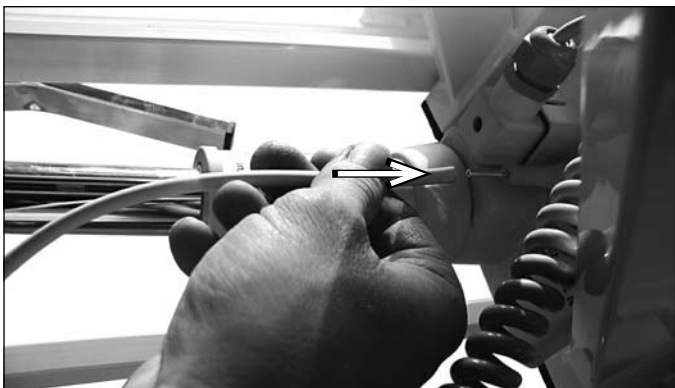


- 4. Vyzkoušíme polohovat lehátko buď pomocí ručního ovladače



nebo konstrukčního ovladače, dle výbavy lehátka.

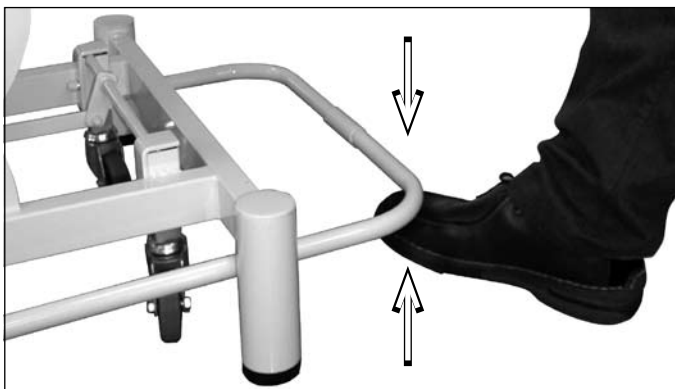

- 5. Přesvědčíme se, zda nejsou zapnuta kolečka (pokud jsou ve výbavě). Jestliže ano, zvedneme je nohou pomocí ovladače koleček.

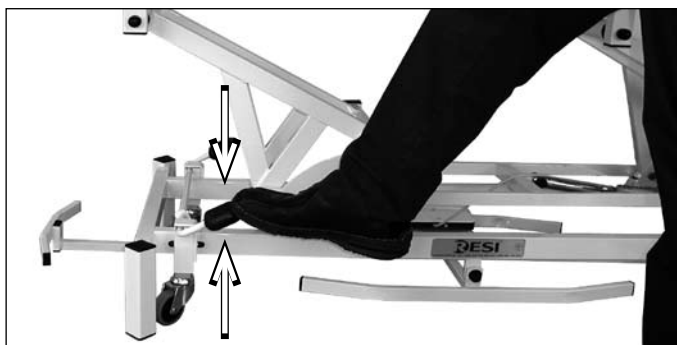


- 6. Lehátko je připraveno k používání.


Obsluha lehátka:

● **Nastavení podhlavníku:**

Podhlavník se nastavuje do určité polohy nadzvednutím a přidržením pákového mechanismu. Po uvolnění se podhlavník zablokuje v poloze, ve které se podhlavník nachází. Podhlavník je konstrukčně řešen na max. zátěž 60 kg . Při přetížení může nastat propad pístu nebo jeho znehodnocení.

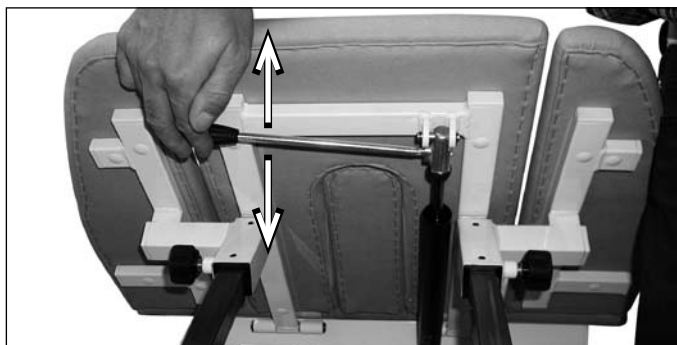

Při 3-dílném podhlavníku se postranní dílce sesouvají. Nejdříve musíte povolit křídlové matice. Po sesunutí je třeba křídlové matice dotáhnout.

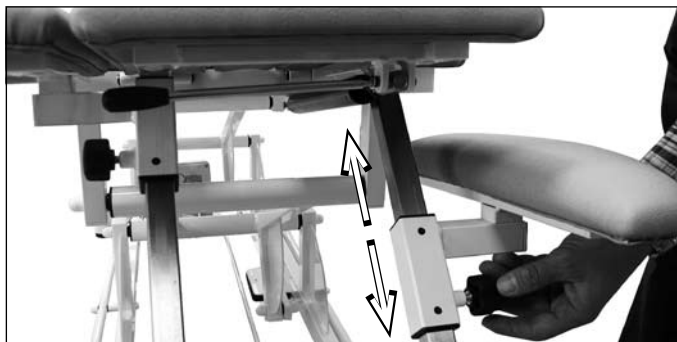


● **Nastavení segmentu na nohy:**

Výška nastavení tohoto segmentu se nastavuje nadzvednutím a přidržením pákového mechanismu pístu. Do rovné polohy se segment opět nastavuje nadzvednutím a přidržením pákového mechanismu pístu.

● **Polohování celého lehátka:**

1. Ruční ovladač elektromotoru (obr. str. 3) – pomocí tlačítkového spínače ve směru vyznačené šipky.
2. Nožní ovladač – spínač vysunutý na podlahu. Ovládá se dolní končetinou ve směru šipek.

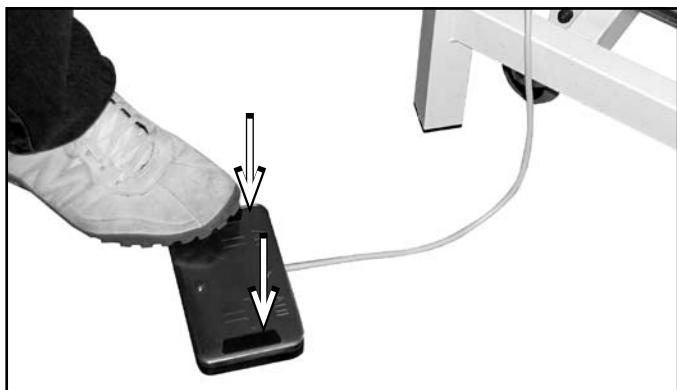

3. Konstrukční ovladač (obr. str. 3) – spínač zabudovaný do lehátka. Ovládá se dolní končetinou nadzvednutím nebo naopak sešlápnutím.

Krajní polohy (nejnižší a max. zdvih jsou zastaveny automaticky). Segmenty na úložné ploše jsou nastavovány pomocí vychýlení páček, které ovládají plynové pružiny.

● **Možné závady a jejich odstranění:**

1. Podhlavník nedrží polohu už při malé zátěži. Možné odstranění: pootočením tělesa plynového pístu ve směru hodinových ručiček lze nastavit tlak v pružině a tím i sílu odporu pružiny.
2. Nelze elektricky výškově polohovat. Možné odstranění: přehřátí tepelné pojistky - vyčkejte 15 min.
3. Ostatní závady: volejte servis.

● **Bezpečnostní pokyny:**

1. Lehátko je určeno pouze pro napájecí napětí 230V.
2. Používat a obsluhovat přístroj nesmějí děti zejména proto, aby nedošlo ke stlačení mezi jednotlivé díly.
3. Nepřetěžovat povolenou max. hranici zatížení 150kg.
4. Elektromotor je vybaven tepelnou pojistkou proti přehřátí, která způsobuje zastavení chodu motoru při polohování zhruba 5 minut bez pauzy. V tomto případě vyčkejte minimálně 15 minut než vychladne tepelná pojistka.

Údržba lehátka:

Kvalitní lehátka vyžadují řádnou péči, aby nedocházelo k předčasnému znehodnocení.

Lehátka chraňte před nadměrným vlhkem a teplem. Čalounění chraňte před nárazy o ostré hrany ostatního nábytku a před působením slunečních paprsků.

Prach utírejte vlhkou utěrkou.

Desinfekci čalouněných částí docílíte desinfekčním přípravkem INCIDIN LIQUID, který je dodáván včetně rozprašovače spolu s lehátkem. Tyto desinfekční prostředky můžete následně objednat u firmy RESI Třeboň spol. s r.o..



Znečištění všech ostatních částí lehátek můžete odstranit pomocí saponátových prostředků, např. Corona, Universal apod. za použití houby nebo hadříku. K čištění nikdy nepoužívejte organických rozpouštědel (benzol, trichlorethylen, aceton a pod.). Chromované části ošetřete prostředky zn. Neoxyd, Silichrom a pod.

Upozornění !

Nebudou-li dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu, neručí výrobce za eventuální škody vzniklé neodbornou obsluhou nebo ošetřováním.



Servis, opravy a poradenská služba:

RESI[®]
www.resi.cz

RESI Třeboň spol. s r. o.
Konviktská 291/24
110 00 PRAHA 1 - Staré Město
Czech Republic

Korespondenční adresa,
Výrobní závod:
RESI Třeboň spol. s r. o.
Novohradská 1153
379 01 Třeboň, Czech Republic
Tel.: +420 384 724 292
Fax: +420 384 724 293