

Vážený zákazník

Velice nás potěšilo Vaše rozhodnutí o zakoupení rollatoru TROJA, ECCO
(vítěz testu **Journal Gesundeit 09/2005**),

který vyniká perfektní manévrovací schopností, hmotností
a jednoduchostí a rychlostí složení.

Rollator je určen jak pro vnitřní tak venkovní použití.

Doufáme, že s touto pomůckou bude Vaše pohybovací schopnost lepší a Vy se stanete
nezávislejší.

Mnoho úspěchů Vám přeje

Radim HOLBA

Podmínky záruky: **24 měsíců** – nevztahuje se na vady vzniklé nevhodným, nesprávným
zacházením a běžným opotřebením

Technické data:

Materiál: Hliníkové profily potažené plastem,
spojené skleněnými vlákny
a vyztužené nylonem
Sedátko vyrobené ze Synteenu
Košík – polyesterová síť

Normy a certifikáty

CE
NS - EN ISO 9001:2000
NS - EN ISO 14001

Transportní rozměry a váha:

Výška:	800mm
Délka:	660mm
Šířka:	240mm

Váha:	7,8 kg
Max. váha uživatele:	125kg

Rollator TROJA	814 750
Rollator ECCO (do 140 cm)	814 770

Extra příslušenství (není v základním balení musí být objednáno)

Pouzdro na hole	814 751
Stolík	814 752
Opěradlo	814 765

Před použitím

Z transportní do pracovní pozice

Odjistěte transportní pojistku (1) otočením zprava do leva, uchopte každou rukou jednu stranu kostry sedátka (2) a rozložte: současně dolů a do stran. Postranní rámy (3) se rozjedou do stran a zatlačením na kostru sedátka směrem kolmo dolů a slyšitelným cvaknutím je rollator v připravené pracovní pozici.

Výškové nastavení rukojeti:

Otočením hvězdicových šroubů (6) umístěných na obou postranních rámech do leva, můžeme posouvat rukojeti rollatoru směrem nahoru a dolů a tak přizpůsobit výšku pro používající osobu. Po nastavení vhodné výšky, hvězdicové šrouby pevně utáhněte pohybem doprava. Extra příslušenství (není v základním balení musí být objednáno)

Automatické nastavení rukojeti:

využívá se při nutnosti dosáhnout co nejmenší transportní velikosti (24cm x 80cm) rozhodni se pro výšku rukojeti od země – spočítej volné dírky na zadní straně profilu rukojeti (4) mezi rámem a rukojetí. Hvězdicové šrouby (6) úplně vyšroubuj z postranních rámu (3) směrem doleva. Tahem nahoru vytáhni profily rukojetí (4), upevňovací kousek (7) a výškovou pojistku (5) úplně ven z postranních rámu (3). Upevňovací kousek (7) zasuň tak, aby mezi kouskem (7) a rukojetí byl stejný počet volných otvorů, které jsi spočítal na začátku. Potom pod upevňovací kousek (7) zastrč do profilu rukojeti (4) také výškovou pojistku (5).
Příklad:
Při pracovní pozici jsou na zadní straně profilu rukojeti (4) volné 3 otvory. Vytáhni profil (4) úplně ven z rámu (3). Nastav kousek (7) tak, aby mezi rukojetí a kouskem (7) byly 3 volné otvory (které jsi spočítal na začátku) a pod kousek (7) zasuň výškovou pojistku (5).
Takto upravený profil rukojeti (4) zasuň směrem dolů do rámu (3) a hvězdicové šrouby (6) zatáhni směrem doprava.
Výsledný efekt:
Při každém rozložení z nejmenší transportní pozice do pracovní se profil rukojeti (4) při vysouvání z rámu (3) automaticky zastaví na Vámi přednastavenou výšku.

Během používání

Brzdy:brzdové páčky (8) ovládají každé kolečko samostatně

Přibrzdit: brzdové páčky (8) přitáhnout prsty směrem nahoru k rukojeti

Zaparkovat – sednout: brzdové páčky (8) zacvaknout směrem dolů

Překonávání překážky: přibrzdit, našlápnout na plochu (9) a lehkým tahem rukojetí k sobě nadzvednout přední kolečka .

Ochrana koleček:brzdový blok (10) chrání kolečka před naražením (zeď, roh)

Z pracovní do transportní nebo skladové pozice:

Provlékni prst stříbrným páskem (11) a zatáhni směrem nahoru, rollator se složí a poté zaklapni transportní pojistku (1)

Údržba:

Rollator může být omýván vodou s běžným čistícím prostředkem. Zvláštní péči věnuj brzdovému bloku (10) a brzdové pružině v případě potřeby promazej olejem ve spray. Košík se může odepnout a vyprat samostatně.

Výrobce:

TOPRO rehabilitation products Norway

**Výhradní distributor pro ČR a SR:
(servis + náhradní díly)**

**SMC
Radim Holba
Poličná 407
757 01 Valašské Meziříčí**

telefon: (00420) 777 599 400

Nákres

