

Důležité pokyny:

- 1) Před použitím pozorně přečtěte návod k obsluze (týká se všech osob, které s přístrojem zacházejí).
- 2) Povrch přístroje i uzávěr jsou během provozu velmi horké.  
Během provozu nelze přístroj přemísťovat!
- 3) Před každým přemístěním přístroje musí být přístroj vypnutý, vychládlý a vyprázdněný.
- 4) Při odchodu z pracoviště odpojte přístroj od sítě!
- 5) Přístroj nelze používat v prostředí obsahujícím výbušniny.
- 6) Výrobce si vyhrazuje další možná zdokonalení, která však nezakládají nárok na dodatečné vybavení.
- 7) KaVo nebere zodpovědnost za škody vzniklé použitím mylných informací, škody způsobené neodbornou opravou a používáním nevhodného příslušenství (jinak je záruka 12 měsíců ode dne prodeje).

Návod k použití

- 1) Nástroje očistit obvyklým způsobem a vložit do kazety. Násadce KaVo očistit a namazat dle návodu výrobce a uložit do kazety otvorem dolů. Mezi nástroje vložit 1 indikátor, poté kazetu uzavřít posunutím víka (obr. str. 5). Před nasazením kazety do držiče zkontrolovat, zda výstupky na víku zapadly úplně do příslušných výřezů.
- 2) Do držiče kazet lze současně upevnit až 6 kazet otvory v horním víku (obr. na str. 6 nahoře).
- 3) Přístroj naplnit přesně 0,75 l dest. vody. Hladina musí dosahovat přesně k rysce (str. 6 dole), nesmí být nižší, ale ani vyšší.
- 4) Držič s kazetami zasunout do přístroje (str. 7 nahoře).
- 5) Kryt nasadit kolmo, značka na krytu musí souhlasit se značkou na přístroji (str. 7 uprostřed). Pozor, kryt musí nasedat pevně na těsnicí kroužek! Potom otáčet krytem ve směru ručiček hodinových, až se obě rukojeti překrývají.
- 6) Ventil k vypouštění páry musí být uzavřen (poloha "0" na obr. str. 7 dole).
- 7) Červený ukazatel přetlakového bezpečnostního ventilu nesmí přesahovat jeho pryžový kryt (fixaci).
- 8) Přístroj musí být umístěn na podložce odolné proti vysokým teplotám (kov, laminát). Podložky ze skla nebo nelakovaného dřeva nelze použít.

9) Přístroj zapneme zasunutím kabelu do uzeměné zásuvky. Rozsvítí se zelené světlo ("power on" - viz schema na druhé straně obálky). Přístroj lze vypnout pouze přerušením přívodu proudu.

10) Stisknutím tlačítka "Start cycle" začne vlastní sterilizace. Při tom se rozsvítí oranžová kontrolka "heating". Během sterilizačního cyklu se voda přivede k varu, celý povrch přístroje je horký! Zakrátko dojde k vypouštění vzduchu a páry bezpečnostním přetlakovým ventilem. Ventil automaticky stoupá, objeví se červená značka, načež se opět automaticky uzavře. Krátce před dosažením sterilizační teploty zabliká oranžová kontrolka signalizující, že sterilizační cyklus brzo začne. Jeho začátek signalizuje žlutá kontrolka "Sterilizing", oranžová kontrolka se rozsvítí vždy, když se znovu automaticky zapne topení. Po ukončení sterilizačního cyklu se rozsvítí zelená kontrolka "sterilizing complete" a topný proudokruh se automaticky vypne. POZOR ! Celý povrch přístroje je horký nejen během sterilisace, ale i po jejím skončení. Během provozu se přístroj nesmí přemísťovat!

11) Přístroj nutno několik minut nechat chládnout. Jakmile poklesne červený ukazatel bezpečnostního ventilu, není již přístroj pod tlakem a může být otevřen.

12) Kryt lze nyní bez nebezpečí odejmout. K tomu je nutno otáčet horní rukojetí proti dolní proti ručičkám hodinovým a kryt svisle vyzvednout. Odložíme jej na podložku, která je odolná vůči vysoké teplotě. Kazety vyjímáme zvedačem (obr. str. 9 uprostřed) a kontrolujeme, zda indikátory vykazují zřetelnou barevnou změnu. Aby kazety rychleji vychládly a oschly, stavíme je vertikálně.

13) Před další sterilisací nutno zkontrolovat hladinu vody a případně ji doplnit. Pak opakovat postupy sub 1) až 12).

14) Je-li zapotřebí použít nástrojů bezprostředně po rozsvícení kontrolky "Sterilizing complete", pootočíme ventil k vypouštění páry proti ručičkám hodinovým (obr. na str. 9 dole). Pára uniká směrem od obsluhující osoby. Otevřít možno stejně, jako sub 12), jakmile červený ukazatel přetlakového ventilu poklesne. Tímto se sterilizační cyklus zkrátí cca o 10 min. Asi po 5 min. lze ventil uzavřít a začít s novým cyklem. POZOR! Tento ventil nelze ručně obsluhovat během sterilisace!