



Provoz

- U dávkovacích kontejnerů je nutné zkontrolovat hladinu a případně je doplnit.
- Otevřete uzavírací ventily (studená, teplá, DI voda) a zapnete hlavní vypínač zařízení.

Na displeji se zobrazí typ zařízení a verze současného softwaru. Spustí se automatický vnitřní test. Následně bude zobrazeno aktuální datum a čas. Po automatickém vnitřním testu je zařízení připraveno k použití a zobrazí „Prog. selection“.

Otevřená dvířka mycí komory:

Stlačením klávesy „Stop“ se dvířka automaticky otevrou. Vyjměte mycí stojan.

Předběžné zpracování endoskopu:

- Proveďte vizuální kontrolu endoskopu.
- Proveďte ruční zkoušku prosakování podle pokynů výrobce endoskopu.

Setřete vnější povrch endoskopu hadříkem.

Vložení mycího stojanu:

Na mycí stojan umístěte předměty určené k mytí a vložte stojan do mycí komory. Uzavřete dvířka mycí komory.

Volba programu:

Je nutné zvolit program vhodný pro umývané předměty. V uživatelských příručkách je možné v tabulkové formě vyhledat programy, kterými zařízení disponuje. Dále je možné zvolit „Předmytí“ a/nebo „Sušení“ jako volitelnou součást programu pomocí kláves „V“ (předmytí) nebo „T“ (sušení).

Spuštění programu:

Stlaďte klávesu Start a automaticky se spustí nastavený program.

Pořadí programu:

Během zpracování se na displeji zobrazují informace:

- číslo programu (např. P1)
- teplota mycí komory a sušičky (°C)
- doba chodu programu (min.)
- název současného kroku (např. mytí)

Displej:

P1 45°C 9min
Mytí

Během celého mycího procesu zůstávají dvířka mycí komory uzavřená a zablokovaná.

- Aby nedošlo k nekvalitnímu mytí.
- Aby nedošlo k rozlití vody v okolí zařízení.

Kapitola 10 “Chybová hlášení”

Viz uživatelské a technické návody.



Poznámka!

Konec programu

Po úspěšném skončení programu se na displeji zobrazí „Program end“. Nyní je možné otevřít dvířka mycí komory stlačením klávesy „Stop“ a můžete vyjmout mycí stojan.



**Umývané prvky mohou být horké
Riziko zranění!**

Přerušení programu uživatelem:

Stlačením klávesy „Stop“ je možné přerušit probíhající program. Displej zobrazuje chybovou zprávu. Zobrazení chybové zprávy potlačte klávesou „Stop“. Program je nutné znovu spustit.



**Z důvodu přerušení programu nemusí
být omývané prvky řádně
dezinfikovány. Takto nedomyté prvky
je nutné označit jako kontaminované.**

V případě přerušení programu nebo výpadku napájení dáváte při otevírání dvířek komory na hladinu vody v komoře. Zablokovaná dvířka je možné otevřít nouzovým odemčením (viz další strana).

Vyřazení z provozu:

- Otevřete dvířka mycí komory pomocí klávesy „Stop“.
- Vypněte hlavní vypínač.
- Uzavřete přírodní ventily vody.

Plánujete-li delší odstávku zařízení, je nutné provést vyčištění. Z dávkovacích kontejnerů vyjměte dávkovací hadičky současně s přírodními trubkami a ponořte trubky do kontejneru s čistou teplou vodou. Vyberte program (např. P1) a dvakrát spusťte bez vložení prvků určených pro mytí.

Plánujete-li delší odstávku zařízení, je nutné provést vyčištění, aby nedošlo ke krystalizaci průtokoměrů a hadiček/trubiček.

(Před uvedením stoje do běžného provozu zapněte dva prázdné cykly (bez umývaných prvků) s čističem a dezinfekcí, kterou budete používat).

Pročtěte si pokyny pro údržbu a bezpečnostní pokyny na další straně.




Poznámka!



Upozornění!



Údržba	Denně	Týdně	Měsíčně	500 – 1000 cyklů
Čištění sítěk filtru	X			
Kontrola hybnosti rozstřikovacích ramen a zablokování trysek	X			
Kontrola hladin chemikálií v kontejnerech	X			
Kontrola funkce hlavního vypínače	X			
Čištění mycí komory		X		
Kontrola sacích hadiček dávkovacích čerpadel		X		
Vyčištění sacích filtrů dávkovacích čerpadel		X		
Čištění fólie na klávesnici			X	
Výměna sterilního filtru				X
Kontrola opotřebení uhlíků na turbíně sušičky				X
Kontrola opotřebení ložisek otočných ramen				X
Reset počítadla údržby				X

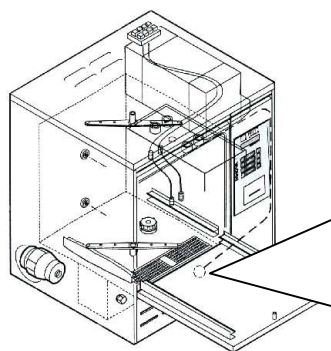

Zablokované
dveře je možné
otevřít
vytažením
systému zámků
nouzových
dvířek (systém
odemčení
nouzových
dvířek je
přístupný po
odstranění
malého panelu
pod dvířky).

Nouzové odemčení dveří



Poznámka!

SERVISNÍ HOTLINE
+49 821 27893-37

BHT Hygienetechnik GmbH
Messerschmittstr. 11
86368 Gersthofen, Německo.

Bezpečnostní pokyny



Upozornění!

Při práci s chemikáliemi postupujte opatrně. Noste bezpečnostní brýle a rukavice. Nebezpečí popálení chemikáliemi!



Upozornění!

Umývané předměty je možné zpracovat pouze při uložení na vhodný nosič. Umývané předměty musejí být odolné zvoleným čisticím a dezinfekčním procedurám.



Varování!

Při vyjímání předmětů z komory postupujte opatrně. Předměty mohou být horké. Nebezpečí popálení.



Upozornění!


Denně kontrolujte hladinu chemikálií v kontejnerech. Nedošlo-li po několika cyklech ke změně hladiny chemikálií, musí funkci překontrolovat specialista a okamžitě informujte autorizovanou servisní společnost.



Upozornění!

Účinek čištění a dezinfekce by se mohl závažným způsobem snížit.

Pro zajištění optimálních výsledků celého procesu si přečtěte pokyny výrobců jednotlivých endoskopů.

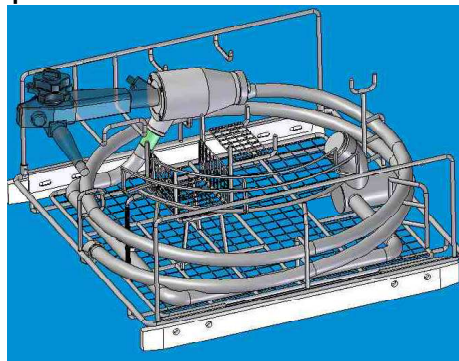

Poškozené nebo popraskané těsnění stojanů je nutné okamžitě vyměnit. Adaptéry tlakové zkoušky musejí být k endoskopu a zařízení připevněné po celou dobu procesu. Přečtěte si bezpečnostní pokyny uvedené v příručce s pokyny!

V případě nedostatečné údržby a oprav ze strany neoprávněné třetí strany ruší výrobce (BHT Hygienetechnik GmbH) případné existující záruční an servisní smlouvy.



Important
Note!

Změny nebo úpravy zařízení v jakékoliv formě včetně změn softwaru bez písemného povolení výrobce má za následek zrušení nároků ze záruky.