



HEINE
OPTOTECHNIK

Návod k obsluze

Hlavové světlo HEINE 3S LED

Použití: HEINE 3S LED. hlavové světlo je určené pro vyšetření a ošetření

Bezpečnost: HEINE 3S LED se musí používat jen se zdrojem energie HEINE. V dentální medicíně lze použít žlutý filtr pro zabránění předčasněho tvrdnutí kompozita. Pro zachování záruky musíte vždy používat originální příslušenství HEINE.

Použití hlavového světla: - Zapojte koncovku hlavového světla do zdroje energie. Pokud používáte akumulátor accubox II-L zapojte konektor do něj. Pomocí regulace intenzity na boku hlavového světla (viz originál obr.2) zapněte světlo.

- Nasadíte hlavové světlo na hlavu a přizpůsobte na svou hlavu pomocí horního a zadního otáčecího stabilizátoru. (viz originál obr. 3 a 4).
- Regulace intenzity světla, může být umístěna jak na levé části hlavového světla tak na pravé části.
- Když začne u akumulátoru accubox II-L docházet energie, začne hlavové světlo HEINE 3S LED blikat a po čase se automaticky vypne.
- Pokud si přejete vyšetřovat dlouho, můžete jednoduše hlavové světlo, HEINE 3S LED, zapnout do síťového transformátoru E 10.

Nastavení pohledu a zaostření:

- Pomocí nastavovací páky (viz originál obr. 7) si přizpůsobte světelný paprsek dle vlastního požadavku.
- Pomocí nastavovacího, otáčecího šroubu na boku světla (viz originál obr. 6) můžete nastavit světlo do libovolné polohy. Po nastavení opět šroub utáhněte.

K upevnění HEINE binokulární lupy a videa použijte adaptér, který je možno dodat jako originální příslušenství.

Nastavení velikosti světelného bodu: - Pomocí rotace (viz originál obr. 4) si nastavte velikost světelného bodu.

- Při práci ve sterilním prostředí nasadíte na světlo koncovku.

Sterilizace: Nedotýkejte se koncové čočky. Čočku můžete čistit látkou z mikrovláken. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Zbytek hlavového světla může být desinfikován v roztoku s trochou alkoholem.