Stručná referenční příručka

Pro Focus 2202 Color



we specialize because you do

Zdířka mech. snímače

Zapínání a vypínání přístroje

Použijte zelený vypínač standby.

Zapnutí přístroje:

 Stiskněte JEDNOU. Vyčkejte, dokud se nezobrazí úvodní obrazovka. Přistroj je připraven k použití.

Vypnutí přístroje:

 Přesvědčte se, zda je přístroj kompletně zapnutý. JEDNOU stiskněte vypínač standby.

Upozornění: Nikdy neodpojujte zapnutý přístroj z el. zásuvky! Před odpojením přístroj vypněte a vyčkejte, než zhasne kontrolka na vypínači.

Připojení snímačů

Elektronické snímače

Připojení:

1. Zasuňte zástrčku snímače do zdířky.

Vypínač standby

2. Otočte zajišťovací páčkou na zástrčce snímače ve směru chodu hodinových ručiček.

Odpojení:

- 1. Otočte zajišťovací páčkou na zástrčce proti směru chodu hodinových ručiček.
- 2. Vytáhněte zástrčku ze zdířky.

Mechanické snímače

Připojení:

- 1. Vyrovnejte červenou značku na zástrčce s červenou tečkou na zdířce pro snímač.
- 2. Zastrčte zástrčku do zdířky.

Odpojení:

- 1. Zatáhněte za zajišťovací mechanismus zástrčky (objímku).
- 2. Vytáhněte zástrčku ze zdířky.



Zdířka el. snímače

Zadání informací o pacientovi

1. Stiskněte [2 ID]. Otevře se okno Patient.

						-	
Worklist				L. L.	Jodate	Today only	¥.
Date 🔶	Time	Name	Birth Date	ID	Sex	Description	Mo
<			iu.				8
]
Last		First	Mid				
Patient ID							
NOID							
-							
Keep I	mage setti	ngs					
Edit						OK	Cancel

- 2. Zadejte údaje o pacientovi. Mezi poli přecházejte pomocí klávesy tabulátoru.
- 3. Klepněte na OK.

Výběr balíčku Pro Package a předvoleb snímače (diagnostického nastavení)

1. Stiskněte [📎].



- 2. Vyberte balíček Pro Package a diagnostické nastavení.
- 3. Klepněte na Close.



Často používané klávesy

- 1. ID: Otevře okno Patient a můžete začít vyšetření.
- Snímač/Aplikace: Stiskněte a zvolte balíček Pro Package nebo diagnostické nastavení.
- 3. Zesílení: Světlejší/Tmavší.
- 4. Punkce: Aktivuje linie vpichu nebo matici brachy.
- 5. Rozdělená obrazovka: Aktivuje simultánní zobrazení.

Zobrazí 2 obrazovky.

6. Zvětšení: Zapíná rámeček výřezu. Opakovaným stisknutím provedete zvětšení. Třetím stisknutím vybranou oblast obnovíte. Jestliže je funkce Zvětšení zapnutá, dlouhým stisknutím ji vypnete.

Funguje při zastaveném i pohyblivém obrazu.

 Rozlišení: Zvyšuje rozlišení (snižuje snímací frekvenci) nebo obráceně v režimu B nebo v barevném režimu.

- 8. Frekvence: Mění frekvenci v MHz.
- 9. Měření: Aktivuje kurzory pro základní měření.
- Hloubka: Mění maximální hloubku (vzdálenost od snímače). Stisknutím + objekty zvětšíte, stisknutím je zmenšíte.
- 11. Uložit: Uloží obraz na pevný disk.
- 12. Zvolit: Stisknutím zvolte možnost.
- 13. Tisk: Odešle obraz na tiskárnu.
- 14. Zastavit snímání

Zobrazení vyšetření

Použijte prohlížeč dokumentů u dolního okraje obrazovky.



- 1. Klepněte na **View Exam**. Na panelu obrázků se zobrazí miniatury dokumentů vyšetření.
- 2. Najeďte na dokument, který chcete zobrazit.



V pravém horním rohu miniatury se zobrazí ikona lupy.



 Klepněte na lupu. Malý rámeček kolem změní barvu na modrou. Dokument se zobrazí v oblasti snímání.

Kopírování na jednotku paměti flash

Obrázky jsou kopírovány na jednotky paměti flash okamžitě.

- 1. Zasuňte jednotku paměti flash do portu USB.
- 2. Klepněte na každý obrázek, který chcete zkopírovat. Rámeček kolem obrázku změní barvu na modrou.
- 3. Klepněte na Copy Flash nebo Copy -ID Flash.

(Pokud není požadovaná možnost kopírování zobrazena, najeďte na zobrazenou možnost kopírování a klepnutím na trojúhelník zobrazte volby.)



4. Klepněte na **USB Eject** a vyjměte jednotku paměti flash.

Kopírování na disk CD

Když klepnete na **Copy CD**, vybrané obrázky se hned **NEZKOPÍRUJÍ** na disk CD. Zkopírují se do přípravné oblasti.

Kopírování:

- 1. Klepněte na každý obrázek, který chcete zkopírovat. Rámeček kolem obrázku změní barvu na modrou.
- 2. Klepněte na Copy CD nebo Copy -ID CD.

(Pokud není požadovaná možnost kopírování zobrazena, najeďte na zobrazenou možnost kopírování a klepnutím na trojúhelník zobrazte volby.)



3. Vložte disk CD do jednotky CD.



4. Klepněte na Burn CD.

CD Type: Archive								
Label 1850archive								
Percent of Staging Area Used: 1% of 700 MB								
Burn	Cancel	Clear Staging Area	Show Details					
Burning can take several minutes !								

5. Pojmenujte (označte) disk CD a klepněte na Burn.

P1: P2: Základní měření P3: P4: P5: P6: e 8

Klávesové zkratky - kláves<mark>y P</mark>

F1:
F2:
F3:
F4:
F5:
F6:
F7:
F8: Zpráva
F9:
F10: Přidání šipky ukazatele do obrázku

Vaše poznámky

Stručná referenční příručka není kompletní návod k použití. Než začnete přístroj používat, přečtěte si *Návod k používání přístroje Pro Focus 2202*. Ten obsahuje důležité bezpečnostní informace a informace o tom, jak zabránit poškození zařízení.



World Headquarters Mileparken 34 DK-2730 Herlev Denmark

Tel.: (45) 44 52 81 00 • Fax: (45) 44 52 81 99 • www.bkmed.com

Více než 30 let se zabýváme inovacemi ultrazvukových zařízení. Společnost B-K Medical se specializuje na vývoj, výrobu a distribuci vyhrazených ultrazvukových řešení. Ústředí společnosti B-K Medical je poblíž Kodaně v Dánsku a kanceláře a distributory má společnost po celém světě.

Stoprocentně vlastněná dceřiná společnost společnosti Analogic Corporation

,	- n
Váš místní zástupce	1
I	1
I	- I
I	1
1	- I
I	1
I	1
1	- I
I	1

Zastoupení

Argentina • Austrálie • Rakousko • Bangladéš • Belgie • Bolívie • Brazílie • Bulharsko • Kanada • Chile • Čína • Kolumbie • Kostarika • Chorvatsko • Česká republika • Dánsko • Ekvádor • Egypt • Estonsko • Finsko • Francie • Německo • Ghana • Řecko • Guatemala • Hongkong • Maďarsko • Island • Indie • Indonésie • Irán • Irák • Irsko • Izrael • Itálie • Japonsko • Jordánsko • Kazachstán • Korea • Kuvajt • Lotyšsko • Libanon • Litva • Lucembursko - Malajsie - Malta • Nizozemsko • Nový Zéland • Norsko • Pákistán • Peru - Filipíny • Polsko - Portugalsko • Rumunsko • Rusko • Saúdská Arábie • Srbsko a Černá hora • Singapur • Slovensko • Slovinsko • Jihoafrická republika • Španělsko • Švédsko • Švýcarsko • Sýrie • Tchaj-wan • Thajsko • Tunisko • Turecko • Ukrajina • Spojené arabské emiráty • Spojené království • Uruguay • USA • Venezuela • Vietnam