

NETTO

NÁVOD K OBSLUZE

KOJENECKÁ VÁHA

SOEHNLE

8310

Základní informace

Elektronická váha Soehnle 8310 umožňuje přesné a rychlé vážení všude, kde se nevyžaduje schválení pro obchodní užití. Váha sestává z plošiny s indikátorem a je napájena z baterie 9 V. Na plošinu lze nasunout plato pro vážení kojenců. Díky novému principu QUATTRO-TRONIC dostáváte vysoce spolehlivé univerzální zařízení, které prakticky nevyžaduje žádnou údržbu.

Důležitá upozornění

1. Opravy a zásahy do funkce váhy může provádět pouze autorizovaný servis.
2. Váha se nesmí čistit organickými rozpouštědly a čistícími prostředky. Na váhu nestříkejte vodu (IP 30).
Doporučujeme čistit váhu navlhčenou měkkou utěrkou.

Technická specifikace

Vážicí rozsah:	20 kg
Velikost dílku:	10 g
Minimální zatížení:	30 g
Hmotnost:	3,5 kg

Jednotky hmotnosti

Tato váha může zobrazit hmotnost v kg/g nebo lb/oz.

Přepnutí jednotek se provádí následovně:

1. Při vypnuté váze stisknete cca 15 s tlačítko.
2. Po následném krátkém stisknutí tlačítka se údaj v kg změní na lb/oz. Dalším stiskem opět na kg.
3. Dlouhým stisknutím tlačítka (cca 15 s) se vybrané jednotky zobrazení uloží do paměti váhy.

Uživatelská kalibrace


Jestliže se přesným kontrolním závažím zjistí nepřesnost stanovení hmotnosti, je možné váhu překalibrovat.

Postup rekaliibrace:

1. Váhu položte na pevnou, vodorovnou plochu.
2. Váhu zapněte. Objeví se údaj 0,00.
3. Stisknete tlačítko na cca 5 s. Na displeji se objeví "C 0". Počkejte až se zobrazí "C 100".
4. Položte přesné kalibrační závaží 20 kg na váhu a stisknete tlačítko. Počkejte až se na displeji objeví údaj "100".
5. Stiskem tlačítka přepnete váhu do normálního provozu.
6. Zapněte váhu a zkontrolujte kontrolním závažím přesnost. V případě potřeby zopakujte kalibraci.

Samoučelné přepínání jednotek zobrazení a rekaliibrace jsou nežádoucí. Popsané postupy použijte pouze v případech, kdy došlo chybnou obsluhou k přepnutí jednotek na libry a nebo je nutná rekaliibrace váhy.

OVLÁDÁNÍ VÁHY

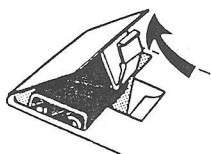

Uvedení do provozu

Vložte 9 V baterii do schránky umístěné ve spodní části váhy.



Vážení

1 x stiskněte tlačítko. Na displeji se objeví kontrolní údaj 8888 potom 0,00. Váha je připravena k vážení.

POZOR:

Tato váha je vybavena tzv. "weight lock" funkcí, která je aktivní od hmotnosti 2 kg. Pro lepší odečitatelnost je po zatížení a uklidnění váhy údaj na displeji fixován na dobu cca 10 s. Hodnota hmotnosti se znovu aktualizuje po 10 s.

Tárování

Po zvážení předmětu 1 x stiskněte tlačítko, objeví se údaj 0,00. Přidejte další vážený předmět. Je možné opakovat až do dosažení maximální váživosti 20 kg.


Celková hmotnost

Po zvážení posledního předmětu 1 x stiskněte, na displeji se objeví 0,00. Sejměte všechny vážené předměty z váhy. Na displeji se objeví celková hmotnost se znaménkem mínus.

Vypnutí

Váha se vypne:

- stisknutím tlačítka při údaji 0,00
- automaticky po 2 minutách od posledního vážení

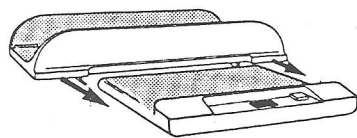

Plato pro vážení kojenců

Vodítko plata nasadte zezadu na váhu a zasuněte plato až na doraz dopředu.

Poruchová hlášení

PŘETÍŽENÍ

Zkontrolujte zatížení váhy.

PODKRITICKÉ ZATÍŽENÍ

Zapněte znovu váhu.

VYBITÁ BATERIE

Vyměňte baterii.

