

Držitel povolení : Fakultní nemocnice Olomouc Pracoviště : Radioterapeutické pracoviště Onkologické kliniky	List : 1 Výtisk č. : 1 Nahrazuje :
Název dokumentu : Provozní pokyny	Datum vydání : 1. 12. 2000 Schválil : RNDr. Ivo Přidal, CSc.

PROVOZNÍ POKYNY PRO KLINICKÝ PROVOZ PRACOVIŠTĚ CESIOTERAX 3N

1. Rozsvítit světlo

2. Zapnout ozařovač

- síťový vypínač v hlavním rozvaděči (tahem zapni)
- síťový vypínač vedle ovládacího pultu (tahem zapni)
- klíč na ovládacím pultu - otočit vpravo

3. Provést a dokumentovat zkoušku provozní stálosti - denní testy

4. Zkontrolovat parametry ozařovače stanovené při denním testu

- pracovník LFRO

5. Připravit ozařovací dokumentaci

6. Zahájit klinický provoz ozařovače

- uvést pacienta do kabinky
- seznámit se s údaji potřebnými pro nastavení ozařovače
- uložit pacienta na ozařovací stůl do předepsané polohy
- nastavit parametry ozařovače dle ozařovacího protokolu
- zaměřit cílový objem na pacientovi
- poučit pacienta o průběhu ozařování
- opustit ozařovnu
- vynulovat časovač
- nastavit ozařovací čas
- spustit ozáření tlačítkem START
- sledovat pacienta v průběhu ozáření na monitoru
- po ukončení ozáření zabezpečit pacienta
 - při opouštění ozařovacího stolu
 - odchodu z ozařovny
- informovat pacienta o dalším průběhu léčby
- dokumentovat průběh ozáření v ozařovacím protokolu

7. Ukončit klinický provoz ozařovače

- desinfikovat pracoviště

8. Dokumentovat statistické údaje o průběhu ozařovacího dne

9. Vypnout ozařovač

- klíč na ovládacím pultu – otočit vlevo
- síťový vypínač vedle ovládacího pultu (stiskem vypni)
- síťový vypínač v hlavním rozvaděči (stiskem vypni)