

Protokol o prohlídce přístroje Perfusor segura

B | BRAUN

Provozovatel: FN Olomouc
Novorozenecká JIP

Výrobce: B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, SRN

výr. č.: 0363
bj. č.: 8717524

Technickou prohlídku je nutné provést podle tohoto formuláře ve vazbě na návod k použití, na servisní návod a na případné změny přístroje po každých 24 měsících provozu.

Vizuální kontrola		
Provedený úkon	Zjištěné nedostatky	Potvrzení
Čistota, kompletnost, poškození		<input checked="" type="checkbox"/>
Těsnící manžeta pohonu		<input checked="" type="checkbox"/>
Foliová klávesnice, kryt hl. spínače		<input checked="" type="checkbox"/>
Ovládací jednotka, přítlačná klapka stříkačky, aretace pohonu		<input checked="" type="checkbox"/>
Napájecí kabel včetně koncovek		<input checked="" type="checkbox"/>
Systém přivolání obsluhy vedení, konektor		<input checked="" type="checkbox"/>
Int./ext. síťový zdroj (podle verze)		<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola pojistek		<input checked="" type="checkbox"/>

Funkční kontrola – naměřené hodnoty musí být zaznamenány

Provedené měření / kontrola	Naměřené hodnoty	Potvrzení	Provedené měření / kontrola	Naměřené hodnoty	Potvrzení
Změřit napájecí síťové napětí	228 V		Systém přivolání obsluhy - v klidu sepnuty kont. 3 - 5 - alarm sepnuty kont. 3 - 1		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Zapnout přístroj a sledovat: - průběh testu - všechny kontrolky		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Odstavení alarmu		<input checked="" type="checkbox"/>
Porovnat : - nastavenou rychlost s displejem - objem dávky s displejem		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Zkouška elektrické bezpečnosti přístroje		
Test akumulátoru - přepnutí síť / baterie / síť - zapnutí v režimu aku a sledovat průběh testu - změřit napětí aku. naprázdno - změřit napětí aku. při zatížení	7,2 V 7,0 V	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Odpor ochranného vodiče vč. přívodu max. 0,2 Ω	0,09 Ω	
Detektor přetlaku		<input checked="" type="checkbox"/>	Izolační odpor min. 2 MΩ	>20 MΩ	
Detektor vysunutí stříkačky a aretace pohonu - vysunutí stříkačky - alarm - uvolnění aretace - alarm		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Svodový proud - ochr. vodičem max. 0,03 mA - přes pacienta max. 5 μA	<0,03 mA <5,00 μA	
			Nechte dobít akumulátor !		
			Kontrola příslušenství: - kabel systému přivolání obsluhy - -		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Výsledek kontroly

Byly zjištěny nedostatky, které by mohly způsobit ohrožení pacienta, obsluhy nebo třetí osoby
 NE ANO - které:
Nový akumulátor.....

Termín příští kontroly: 11.2009 Kontrola provedena: datum / podpis 19.11. 2007 / Tománek
 Ev.č. D025863-000

Pozn. Zdravotnický prostředek splňuje požadavky uvedené výše a vyhovuje technickým předpisům, popř. technickým dokumentům nebo technickým normám, podle nichž byl vyroben.

B | BRAUN
 B. Braun Medical s.r.o.
 Servisní centrum
 HOTLINE
 IČ: 485 86 286 Tel. +420-271 091 555
 DIČ: CZ48586285 Fax +420-271 091 882